

PRD-IDEEN DES MONATS

jetzt – nochmal – fertig

Pustebilder

Endlich ist der Frühling da!

Mit etwas Puste und Wind können einzigartige Frühlingbilder gestaltet werden. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt: eine gelbe Sonne, eine bunte Blume oder ein cooler Typ mit Sonnenbrille?

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Dickeres Papier oder Pappe
- Strohhalme
- Wasserfarben
- Pinsel
- Ggf. Föhn

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- MINSPEAK®-Anwendungsprogramme Quasselkiste 45/60 oder Wortstrategie 84
- Anwendungsprogramme LoGoFoXX 32 oder LoGoFoXX 60
- Anwendungsprogramme Metatalk DE 5x9 oder Metatalk DE 6x11
- Wortschatz-App GoTalk Now
- GoTalk9+ oder GoTalk20+
- 1-2 sprechende Tasten (z.B. Step-by-Step oder 2 BIGmacks)
- Powerlink mit einer Taste (z.B. JellyBean oder JellyBeamer)

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Verwendet Ihr Benutzer die Wortschatz-App GoTalk Now, laden Sie die Vorlage "PRD-Idee Mai 2021" von unserer Homepage herunter (<https://www.prentke-romich.de/didaktische-materialien-fuer-prio-geraete/#1590655769353-345f93a2-af40>).
- Zur Benutzung des GoTalks verwenden Sie das beigefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Wird ein Powerlink verwendet, müssen eine Taste und ein Föhn angeschlossen werden.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Was soll denn gebastelt werden: eine Sonne, eine Blume oder ein Kopf mit wehendem Haar? Hier kann ggf. bereits Ihr Talkerbenutzer entscheiden!
- Drucken Sie die entsprechende Bastelvorlage aus und schneiden sie aus.
- Kleben Sie die Vorlage auf eine große Pappe auf und positionieren diese entsprechend weiter oben oder unten.
- Mit einem Pinsel wird Farbe auf die Malfläche (auf oder um das Gesicht herum) gekleckst. Die Farbe sollte schön wässrig sein, so dass sie gut verlaufen kann.
- Der Benutzer darf die Farbe auswählen und die gemeinsame Aktion steuern (z.B. „ich möchte gelb“, „jetzt rot“, „mehr grün“, „fertig“).
- Nun wird es windig! Die Farbe wird verteilt, indem der Farblecks mit dem Strohalm oder dem Föhn angepustet wird. Aber es darf erst beim Startzeichen „jetzt“ losgepustet werden!
- Betrachten Sie mit dem Benutzer gemeinsam das Pustebild. Soll „nochmal“ gepustet werden, vielleicht mit einer anderen Farbe oder es „fertig“?

PRD-IDEEN DES MONATS

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „*jetzt*“, „*nochmal*“ und „*fertig*“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei „Zielwörter und Kurzideen“.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH
Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation
Karthäuserstr. 3
34117 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de

