



Bedienungsanleitung

# ABC 45 3.0/50 3.0/60 3.0 und ABC 45 3.0/50 3.0/60 3.0 METACOM

## Für Chat

# Hinweise

© Prentke Romich GmbH 2017-2021. Kommerzielle Nutzung und Weiterveräußerung verboten.

ABC 45, ABC 50, ABC 60, LoGoFoXX 15, LoGoFoXX 24, LoGoFoXX 32, LoGoFoXX 60, LoGoFoXX 80, MultiFoXX und RehaFoXX sind Warenzeichen der Prentke Romich GmbH.

AeroSwitch, AeroText, Chat-Editor, ChatFusion, ChatPoint, NovaChat und RealizeLanguage sind Warenzeichen von PRC-Salttillo.

Acapela Group, © 2021. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung. Die Acapela Text-to-Speech-Technologie und die in der Software verwendeten synthetischen Stimmen dürfen nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von PRC-Salttillo in Lizenz verwendet.

METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation

Samsung, das Samsung-Logo und Galaxy Tab sind eingetragene Marken der Samsung Electronics.

The Picture Communication Symbols © 1981 - 2021 Tobii Dynavox. Weltweit alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung. Boardmaker® ist ein Warenzeichen von Tobii Dynavox.

SymbolStix © 2021 SymbolStix, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung. Die in der Software enthaltene Bibliothek mit Buchstaben- und Logo-Symbolen darf nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Chat-Editor ist Eigentum von PRC-Salttillo.

„Microsoft Voices“ sind Eigentum der Microsoft Corporation.

PRC-Salttillo erteilt die Berechtigung zur Nutzung des Chat-Editors auf jedem Computer, der zur Synchronisation oder zum Datenaustausch mit einem NovaChat-Gerät verwendet wird.

## ABC-Programme Bedienungsanleitung


Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuches sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung dieses Geräts oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung dieses Geräts oder der in dieser Anleitung gemachten Angaben ergeben.

## Dokumentenversion

100034v1 – 03.09.2021

Bezieht sich auf ABC 45, ABC 45 Metacom, ABC 50, ABC 50 Metacom, ABC 60 und ABC 60 Metacom für die Software Chat in Verbindung mit den Modellen NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10, NovaChat 12 und ChatFusion 10.

Hersteller	Der Bevollmächtigte in der EU	Importeur
		
<b>PRC-Salttillo</b> 1022 Heyl Road Wooster, OH 44691 U.S.A. Tel. +1 330 262-1984 Fax +1 330 262-4829 E-Mail info@prentrom.com Web prentrom.com	<b>Prentke Romich GmbH</b> Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de	<b>Prentke Romich GmbH</b> Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de

# Inhaltsverzeichnis

Hinweise .....	2
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>3</b>
Willkommen bei den ABC-Programmen .....	6
<b>ABC 45</b> .....	<b>7</b>
Version mit oder ohne Metacom-Symbole.....	7
Die SCHRIFT-SEITE .....	7
Grüne Funktionstasten .....	8
Die ZEICHEN-SEITE.....	9
Wortvorhersage .....	10
Die THEMEN-SEITEN.....	11
Die Seite ÜBER MICH.....	12
Die Seite FRAGEN .....	12
Die Seite ORTE .....	12
Die Seite ESSEN .....	13
Die Seite TRINKEN.....	13
Die Seite SÄTZE .....	13
Die Seite NAMEN .....	14
Die Seite WOHLFÜHLEN.....	14
Die Seite MEDIZIN .....	14
Die Seite ZEIT .....	15
Die Seite FLOSKELN .....	15
Die Seite FAMILIE .....	15
Die Seite KLEIDUNG .....	16
Die Seite PFLEGE.....	16
Die Seite KÖRPER.....	16
Die Seite MEINE SÄTZE 1.....	17
Die Seite MEINE SÄTZE 2.....	17
Die Seite LEUTE.....	17
Die Seite TELEFON .....	18
Die Seite CHAT .....	18
Die Seite ERZÄHLEN .....	18
Die Seite FREI 1 .....	19
Die Seite FREI 2 .....	19
Die Seite FREI 3.....	19
Die Seite FREI 4.....	20
Eigene Änderungen einfügen .....	21
Seiten ändern im Editiermodus .....	21
Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „TEXT SPEICHERN“ .....	24
Aussprache korrigieren.....	27
Besondere Funktionen des Talkers .....	28
Die Seite ERZÄHLEN .....	28
Die Seite EINSTELLUNGEN .....	29
Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen.....	30
Vokabular vom Gerät in den Chat-Editor kopieren.....	30
Vokabular vom Chat-Editor auf das Gerät kopieren .....	31
<b>ABC 50</b> .....	<b>32</b>
Version mit oder ohne Metacom-Symbole.....	32
Die SCHRIFT-SEITE .....	32
Grüne Funktionstasten .....	33
Die ZEICHEN-SEITE.....	34
Wortvorhersage .....	35
Die THEMEN-SEITEN.....	36

Die Seite ÜBER MICH.....	37
Die Seite FRAGEN .....	37
Die Seite ORTE .....	37
Die Seite ESSEN .....	38
Die Seite TRINKEN.....	38
Die Seite SÄTZE.....	38
Die Seite NAMEN .....	39
Die Seite WOHLFÜHLEN.....	39
Die Seite MEDIZIN .....	39
Die Seite ZEIT .....	40
Die Seite FLOSKELN .....	40
Die Seite FAMILIE .....	40
Die Seite KLEIDUNG .....	41
Die Seite PFLEGE.....	41
Die Seite KÖRPER.....	41
Die Seite MEINE SÄTZE 1.....	42
Die Seite MEINE SÄTZE 2.....	42
Die Seite LEUTE.....	42
Die Seite TELEFON .....	43
Die Seite CHAT .....	43
Die Seite ERZÄHLEN .....	43
Die Seite FREI 1 .....	44
Die Seite FREI 2 .....	44
Die Seite FREI 3 .....	44
Die Seite FREI 4 .....	45
Eigene Änderungen einfügen .....	46
Seiten ändern im Editiermodus .....	46
Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „TEXT SPEICHERN“ .....	49
Aussprache korrigieren.....	52
Besondere Funktionen des Talkers .....	53
Die Seite ERZÄHLEN .....	53
Die Seite FUNKTIONEN.....	54
Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen.....	55
Vokabular vom Gerät in den Chat-Editor kopieren.....	55
Vokabular vom Chat-Editor auf das Gerät kopieren .....	56
<b>ABC 60</b> .....	<b>57</b>
Version mit oder ohne Metacom-Symbole.....	57
Die SCHRIFT-SEITE .....	57
Grüne Funktionstasten .....	58
Die ZEICHEN-SEITE.....	59
Wortvorhersage .....	60
Die THEMEN-SEITEN.....	61
Die Seite ÜBER MICH.....	62
Die Seite FRAGEN .....	62
Die Seite ORTE .....	62
Die Seite ESSEN .....	63
Die Seite TRINKEN.....	63
Die Seite SÄTZE .....	63
Die Seite NAMEN .....	64
Die Seite WOHLFÜHLEN.....	64
Die Seite MEDIZIN .....	64
Die Seite ZEIT .....	65
Die Seite FLOSKELN .....	65
Die Seite FAMILIE .....	65
Die Seite KLEIDUNG .....	66

Die Seite PFLEGE.....	66
Die Seite KÖRPER.....	66
Die Seite MEINE SÄTZE 1.....	67
Die Seite MEINE SÄTZE 2.....	67
Die Seite LEUTE.....	67
Die Seite TELEFON .....	68
Die Seite CHAT .....	68
Die Seite ERZÄHLEN .....	68
Die Seite FREI 1 .....	69
Die Seite FREI 2.....	69
Die Seite FREI 3.....	69
Die Seite FREI 4.....	70
Eigene Änderungen einfügen .....	71
Seiten ändern im Editiermodus .....	71
Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „TEXT SPEICHERN“ .....	74
Aussprache korrigieren.....	77
Besondere Funktionen des Talkers .....	78
Die Seite ERZÄHLEN .....	78
Die Seite FUNKTIONEN.....	79
Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen.....	80
Vokabular vom Gerät in den Chat-Editor kopieren.....	80
Vokabular vom Chat-Editor auf das Gerät kopieren.....	81

## Willkommen bei den ABC-Programmen

Die ABC-Programme bilden eine Gruppe von schriftbasierten Wortschatzprogrammen für die Kommunikationshilfen NovaChat und ChatFusion. Sie kombinieren die Vorzüge einer Schrifteingabe, die von einer leistungsfähigen Wortvorhersage wirkungsvoll unterstützt wird, mit der Möglichkeit, häufig benötigte Wörter und Aussagen im Ganzen abzuspeichern, damit sie schnell zur Verfügung stehen. „ABC 45“, „ABC 50“ und „ABC 60“ sind flexible Kommunikationsprogramme, die in Verbindung mit dem Talker schnelle, eindeutige und damit effektive Kommunikation ermöglichen.

In dieser Einführung stellen wir Ihnen die Programme „ABC 45“, „ABC 50“ und „ABC 60“ vor und geben erste Hinweise, wie Sie individuelle Veränderungen vornehmen können.

An verschiedenen Stellen verweisen wir dazu auf das **Chat Software-Manual** und auf das **Kleine Handbuch**, die beide zum Lieferumfang des Talkers gehören.

# ABC 45

## Version mit oder ohne Metacom-Symbole

Das Wortschatzprogramm „ABC 45“ gibt es in 2 Versionen, eines mit und eines ohne Metacom-Symbole. Die Version ohne Metacom-Symbole verwendet lediglich Textlabel zur Kennzeichnung von Funktionstasten und Aussagen, die Version mit Metacom nutzt zusätzlich Metacom-Symbole.

GROSS	123	CHAT	a	b	c	d	ä	LEER
THEMEN			e	f	g	h	ö	ü
LÖSCHE DISPLAY			i	j	k	l	m	n
LÖSCHE WORT			o	p	q	r	s	t
LÖSCHE ZEICHEN			u	v	w	x	y	z

ABC 45 ohne Metacom-Symbole

ABC123	CHAT	a	b	c	d	ä	[LEER]	
GROSS	SONDERZEICHEN		e	f	g	h	ö	ü
THEMEN			i	j	k	l	m	n
LÖSCHE DISPLAY			o	p	q	r	s	t
Wort			u	v	w	x	y	z
LÖSCHE WORT								
LÖSCHE ZEICHEN								

ABC 45 mit Metacom-Symbolen

Die im Folgenden gemachten Angaben gelten für beide Versionen, auch wenn die Grafiken die Version ABC 45 mit Metacom-Symbolen zeigen.

## Die SCHRIFT-SEITE

Schalten Sie den Talker mit der Ein/Aus-Taste ein.

Nach dem Startvorgang erscheint folgendes Bild im Display:

ABC123	CHAT	a	b	c	d	ä	[LEER]	
GROSS	SONDERZEICHEN		e	f	g	h	ö	ü
THEMEN			i	j	k	l	m	n
LÖSCHE DISPLAY			o	p	q	r	s	t
Wort			u	v	w	x	y	z
LÖSCHE WORT								
LÖSCHE ZEICHEN								

Die oberste Zeile, die im Augenblick noch leer ist, heißt Textfenster. Hier erscheinen im Folgenden die Buchstaben und Wörter, die Sie schreiben.

Die Buchstaben auf der SCHRIFT-SEITE sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Die Vokale (Selbstlaute) A, E, I, O und U stehen in einer Spalte untereinander.

In den hellblauen Feldern erscheinen die Vorschläge der Wortvorhersage, sobald Sie zu schreiben beginnen. Tippen Sie auf ein Feld, um einen Vorschlag zu übernehmen.

Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen.




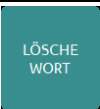

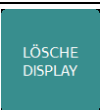

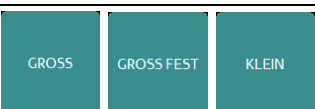

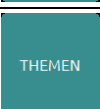

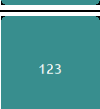

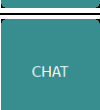
Tippen Sie z. B. nacheinander die einzelnen Buchstaben h a l l o und am Ende die Taste „LEER“ ganz oben rechts.

(Stören Sie sich bitte nicht daran, falls der Talker die einzelnen Buchstaben nicht laut ausspricht. Das liegt daran, dass die Sprache ausgeschaltet ist. Wie man die Sprachausgabe ein- und ausschalten kann, erfahren Sie bei den Erläuterungen zur Seite EINSTELLUNGEN weiter hinten in dieser Einführung.)

Im Textfenster in der oberen Zeile erscheint das Wort „hallo“. Tippen Sie auf das angezeigte Wort „hallo“, und der Talker spricht das ganze Wort.

## Grüne Funktionstasten

Auf der SCHRIFT-SEITE befinden sich auch einige grün unterlegte Tasten mit Funktionen, die beim Schreiben wichtig sind:

Version mit META-COM-Symbolen	Version ohne META-COM-Symbole	
		Zeichen löschen
		Wort löschen
		Inhalt des Textfensters löschen
		Wechsel zwischen Groß-, permanent Groß- und Kleinschreibung
		Wechsel zur THEMEN-SEITE
		Wechsel zur Seite SONDERZEICHEN
		Wechsel zur Seite CHAT



## Die Seite SONDERZEICHEN


123  
SONDERZEICHEN


Drücken Sie auf der SCHRIFT-SEITE die Taste

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen nun die Seite „SONDERZEICHEN“:

abc START	(	)	[	]	\	*	ß	[LEER]
THEMEN	1	2	3	+			'	"
LÖSCHE DISPLAY	4	5	6	=	/	€	@	&
Wort LÖSCHE WORT	7	8	9	#	!	;	:	-
B LÖSCHE ZEICHEN	Euro	0	Cent	%	?	,	.	-

Die Seiten „SONDERZEICHEN“ bleibt geöffnet, bis Sie sie manuell wieder schließen:


Drücken Sie die Taste  , um wieder auf die Startseite zu gelangen.

Drücken Sie die Taste  , um auf die THEMEN-SEITE zu gelangen.


## Wortvorhersage

Der Talker verfügt über eine leistungsfähige Wortvorhersage, bestehend aus einer Wortvervollständigung des gerade eingegebenen Wortes und einer Vorhersage des nächsten Wortes.

Beim Schreiben erscheinen auf den hellblauen Tasten Wortvorschläge, die Sie durch direktes Antippen auswählen können, um den Schreibprozess abzukürzen.

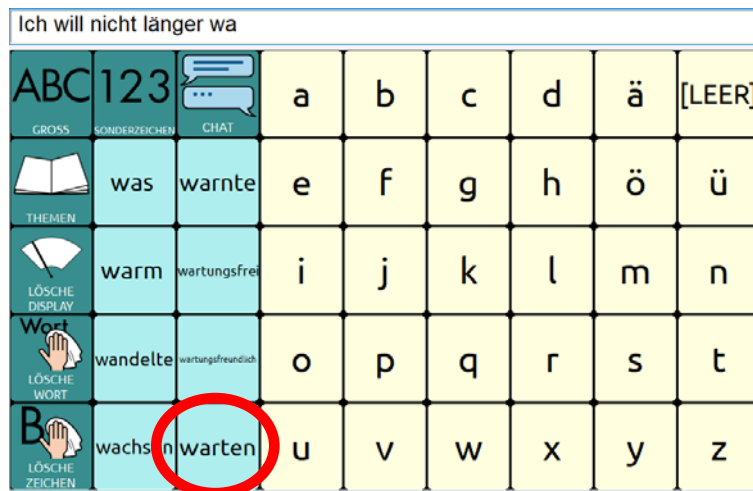

Hinweis: Über „Einstellungen – Schreibhilfen – Wortvorhersage“ können Sie Wörter zum Wortvorhersagelexikon hinzufügen.

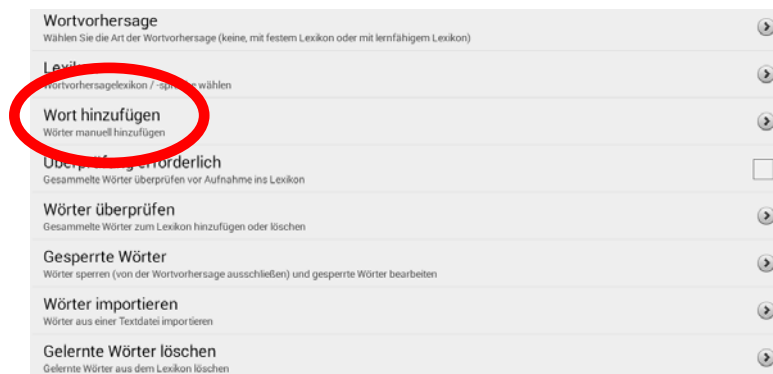


## Die THEMEN-SEITEN

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Schrifteingabe bietet der Talker auch die Funktion, Wörter und Sätze, die man häufig benötigt, als Ganzes abzuspeichern, damit man sie nicht jedes Mal wieder schreiben muss.



Drücken Sie die Taste „THEMEN“ auf der SCHRIFT-SEITE.  
Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen die THEMEN-SEITE:

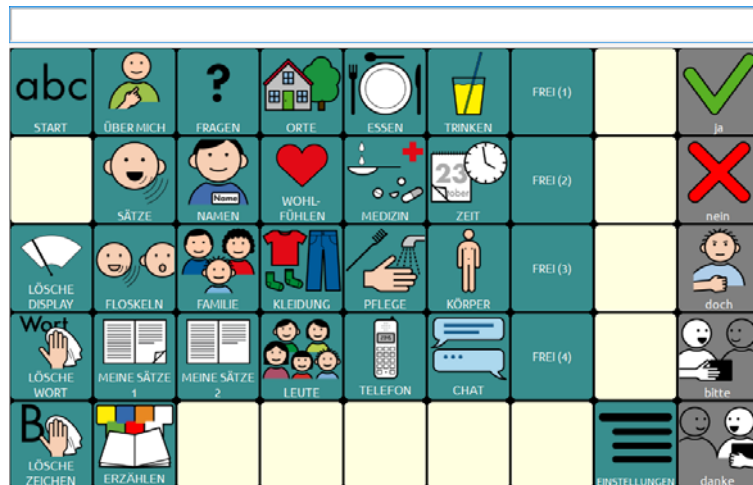

Die grün hinterlegten Tasten öffnen Seiten zu verschiedenen Themenbereichen, die Sie individuell verändern können (weiter hinten in dieser Einführung wird die entsprechende Vorgehensweise erläutert). Auf den Tasten steht jeweils der Name der damit zu öffnenden Seite.

Die grau hinterlegten Aussagen in der rechten Spalte „ja“, „nein“, „doch“, „bitte“ und „danke“ in der rechten Spalte sind auf allen Themenseiten zu finden. **Bei allen grau hinterlegten Tasten gilt: Die Tasten dienen dem Kommentieren, der jeweilige Inhalt wird nicht im Textfenster angezeigt!**



Wechsel zurück zur SCHRIFT-SEITE




Wechsel zurück zur THEMEN-SEITE



Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters.



Löscht das letzte Wort im Textfenster.

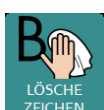

Löscht den zuletzt eingegebenen Buchstaben im Textfenster.

Im Folgenden sind alle Themenseiten abgebildet.

## Die Seite ÜBER MICH



abc START	Ich heiße	Ich wohne in	Ich bin Jahre alt	Meine Telefonnummer lautet	Meine e-mail Adresse lautet				ja
THEMEN									nein
LÖSCHE DISPLAY									doch
Wort LÖSCHE WORT									bitte
B LÖSCHE ZEICHEN									danke

## Die Seite FRAGEN



abc START	Was ist das?	Was gibt es Neues?							ja
THEMEN	Wann kommst du wieder?	Was hast du gestern gemacht?	Wie geht es dir?						nein
LÖSCHE DISPLAY	Wie viel kostet das?								doch
Wort LÖSCHE WORT									bitte
B LÖSCHE ZEICHEN									danke

## Die Seite ORTE




abc START	Apotheke	Bäcker	Bahnhof	Bank	Geschäft				ja
THEMEN	Kino	Kiosk	Kirche	Markt	Metzgerei				nein
LÖSCHE DISPLAY	Park	Post	Supermarkt	Tankstelle					doch
Wort LÖSCHE WORT									bitte
B LÖSCHE ZEICHEN									danke

## Die Seite ESSEN



abc								✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								doch
<b>Wort</b> LÖSCHE WORT								bitte
<b>B</b> LÖSCHE ZEICHEN	Ich habe Hunger.	Wann gibt es Essen?	Was gibt es zu Essen?	Ich möchte etwas anderes.	Das reicht.	Mir ist schlecht!	Das darf ich nicht essen!	danke

## Die Seite TRINKEN

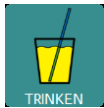

abc								✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								doch
<b>Wort</b> LÖSCHE WORT								bitte
<b>B</b> LÖSCHE ZEICHEN	Ich habe Durst.	Ich brauche Hilfe.	Was gibt es zu trinken?	Ich möchte etwas anderes.	Das reicht.	Mir ist schlecht!	Das darf ich nicht trinken!	danke

## Die Seite SÄTZE



abc								✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								doch
<b>Wort</b> LÖSCHE WORT								bitte
<b>B</b> LÖSCHE ZEICHEN								danke

## Die Seite NAMEN



abc								✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								doch
<b>Wort</b> LÖSCHE WORT								bitte
<b>B</b> LÖSCHE ZEICHEN	Wie heißt du?	Wie heißen Sie?						danke

## Die Seite WOHLFÜHLEN



abc								✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								doch
<b>Wort</b> LÖSCHE WORT								bitte
<b>B</b> LÖSCHE ZEICHEN	Mir ist langweilig.	So ist es gut!	So ist es nicht richtig.					danke

## Die Seite MEDIZIN



abc								✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								doch
<b>Wort</b> LÖSCHE WORT								bitte
<b>B</b> LÖSCHE ZEICHEN	Ich brauche ein neues Rezept.	Ich brauche Hilfe.	Ich möchte einen Arzt sprechen.	Das habe ich verstanden.	Das habe ich nicht verstanden.	Wann sehen wir uns wieder?		danke

## Die Seite ZEIT



Die Taste



sagt  
Datum und  
Uhrzeit an.

abc	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	✓
START	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	ja
THEMEN	1	2	3	4	5	6	Uhr	✗
LÖSCHE DISPLAY	7	8	9	10	11	12	Sekunde	doch
Wort	früh	spät	gestern	heute	morgen	nach	Minute	bitte
LÖSCHE WORT	Zeit/Datum anzeigen	Tag	Woche	Wochenende	Monat	Jahr	Stunde	danke
LÖSCHE ZEICHEN								

## Die Seite FLOSKELN



abc	Hello	Guten Tag	Tschüss	Auf Wiedersehen	Moin		✓
START	Hello	Guten Tag	Tschüss	Auf Wiedersehen	Moin		ja
THEMEN	Glückwunsch	Alles Gute	Entschuldigung	Frohe Weihnachten	Grüß Gott		✗
LÖSCHE DISPLAY							doch
Wort							bitte
LÖSCHE WORT							danke
LÖSCHE ZEICHEN							

## Die Seite FAMILIE



abc	Enkel	Sohn	Vater	Opa	Bruder	Schwieger-sohn	✓
START	Enkel	Sohn	Vater	Opa	Bruder	Schwieger-sohn	ja
THEMEN	Enkelin	Tochter	Mutter	Oma	Schwester	Schwieger-tochter	✗
LÖSCHE DISPLAY							doch
Wort							bitte
LÖSCHE WORT							danke
LÖSCHE ZEICHEN							

## Die Seite KLEIDUNG




abc								✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								nein
Wort								doch
LÖSCHE WORT								bitte
LÖSCHE ZEICHEN	Wie sehe ich aus?	Wie ist das Wetter heute?	Ich möchte mich im Spiegel sehen.					danke

## Die Seite PFLEGE



abc	Zähne putzen	waschen	duschen	baden				✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								nein
Wort								doch
LÖSCHE WORT								bitte
LÖSCHE ZEICHEN	Türe zu, bitte!	Ich brauche Hilfe!	Ich muss auf die Toilette!					danke

## Die Seite KÖRPER

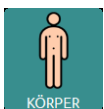

abc								✓
START								ja
THEMEN								✗
LÖSCHE DISPLAY								nein
Wort								doch
LÖSCHE WORT								bitte
LÖSCHE ZEICHEN	Ich möchte mich hinlegen.	Ich brauche Hilfe!	Es juckt mich.	Ich habe Schmerzen.	Mir ist schlecht!			danke



## Die Seite MEINE SÄTZE 1



abc START							TEXT SPEICHERN	ja
THEMEN								nein
LÖSCHE DISPLAY								doch
Wort LÖSCHE WORT								bitte
B LÖSCHE ZEICHEN								danke

## Die Seite MEINE SÄTZE 2



abc START							TEXT SPEICHERN	ja
THEMEN								nein
LÖSCHE DISPLAY								doch
Wort LÖSCHE WORT								bitte
B LÖSCHE ZEICHEN								danke

## Die Seite LEUTE



abc START	Besucher	Nachbar						ja
THEMEN	Frau	Mann						nein
LÖSCHE DISPLAY	Mädchen	Junge	Kind					doch
Wort LÖSCHE WORT	Krankenschwester	Pfleger						bitte
B LÖSCHE ZEICHEN								danke

## Die Seite TELEFON




abc START	Hallo!		Auf Wiederhören!						ja
THEMEN	Bitte warten Sie. Ich beantworte die Frage mit meinem Sprachcomputer.		Bitte stellen Sie mir eine Ja/Nein Frage.						nein
LÖSCHE DISPLAY	Bitte wiederholen Sie das.		Das habe ich nicht verstanden.	Das habe ich verstanden.					doch
Wort LÖSCHE WORT									bitte
B LÖSCHE ZEICHEN	Bitte rufen Sie später nochmal an.								danke

## Die Seite CHAT



abc START	Stelle mir bitte eine Ja/Nein Frage!	Ich bin gerade dabei, zu antworten.							ja
THEMEN									nein
LÖSCHE DISPLAY	Ich verstehe alles, was Sie zu mir sagen.	Wiederholen Sie bitte die Frage.							doch
Wort LÖSCHE WORT									bitte
B LÖSCHE ZEICHEN									danke

## Die Seite ERZÄHLEN

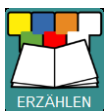

abc START	1	2	3	4	5	6	7		ja
THEMEN									nein
LÖSCHE DISPLAY									doch
Wort LÖSCHE WORT									bitte
B LÖSCHE ZEICHEN	AUFNEHMEN								danke

## Die Seite FREI 1

FREI (1)

abc START								✓ ja
THEMEN								✗ nein
LÖSCHE DISPLAY								doch
Wort LÖSCHE WORT								bitte
B LÖSCHE ZEICHEN								danke

## Die Seite FREI 2

FREI (2)

abc START								✓ ja
THEMEN								✗ nein
LÖSCHE DISPLAY								doch
Wort LÖSCHE WORT								bitte
B LÖSCHE ZEICHEN								danke

## Die Seite FREI 3

FREI (3)

abc START								✓ ja
THEMEN								✗ nein
LÖSCHE DISPLAY								doch
Wort LÖSCHE WORT								bitte
B LÖSCHE ZEICHEN								danke

# Die Seite FREI 4

FREI (4)

abc START								✓ ja
THEMEN 								✗ nein
LÖSCHE DISPLAY 								 doch
Wort LÖSCHE WORT 								 bitte
B LÖSCHE ZEICHEN 								 danke

## Eigene Änderungen einfügen

Bevor wir zu den Sonderfunktionen in der unteren Zeile der THEMEN-SEITE kommen, erfahren Sie, wie Sie eigene Änderungen in das Programm „ABC 45“ einfügen können.

### Seiten ändern im Editiermodus


Das Programm „ABC 45“ ist aus einzelnen Seiten zusammengesetzt. Um Änderungen auf einer Seite vorzunehmen, müssen Sie die jeweilige Seite zunächst öffnen (anzeigen lassen) und dann den Editiermodus aktivieren.

Im Folgenden wird dies Schritt für Schritt am Beispiel der Seite „ÜBER MICH“ erläutert.



Öffnen Sie die Seite „ÜBER MICH“, indem Sie **THEMEN** und **ÜBER MICH** auswählen

Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät.  
Aktivieren Sie den Editiermodus.

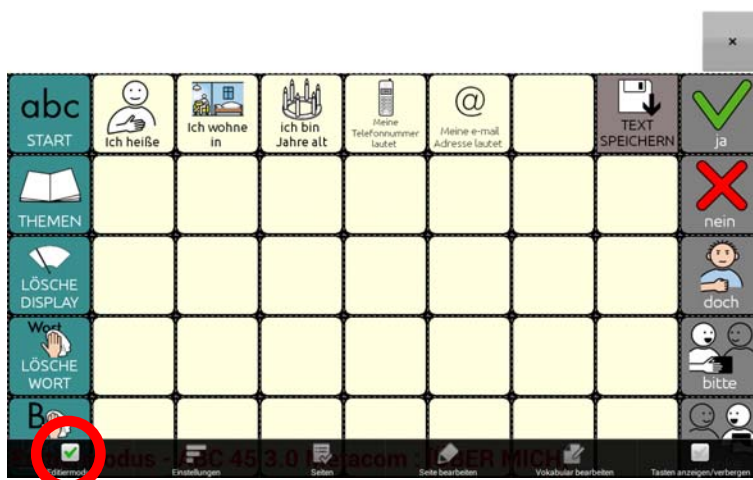


Unten steht: Editiermodus – ABC 45 3.0 Metacom : [ÜBER MICH]


Ändern Sie die für Ihren Namen, Adresse, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse vorbereiteten Tasten.

Tippen und halten Sie die Taste „Ich heiße“ gedrückt, bis im Display das Menüfenster erscheint.


Wählen Sie „Taste bearbeiten“.

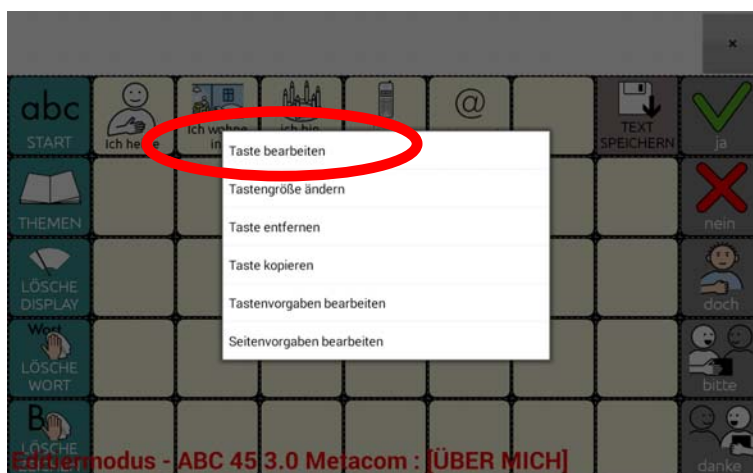


Die aktuelle Belegung der Taste wird angezeigt.

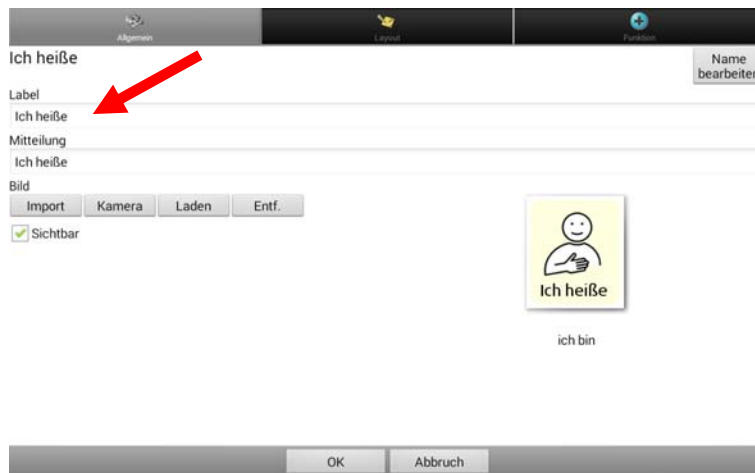


Tippen Sie im Feld „Label“ hinter das Wort „heiße“. Mit Hilfe der Buchstabentastatur, die dann erscheint, können Sie Ihren Namen ergänzen. Die Eingabe wird automatisch in das Feld „Mitteilung“ übernommen.

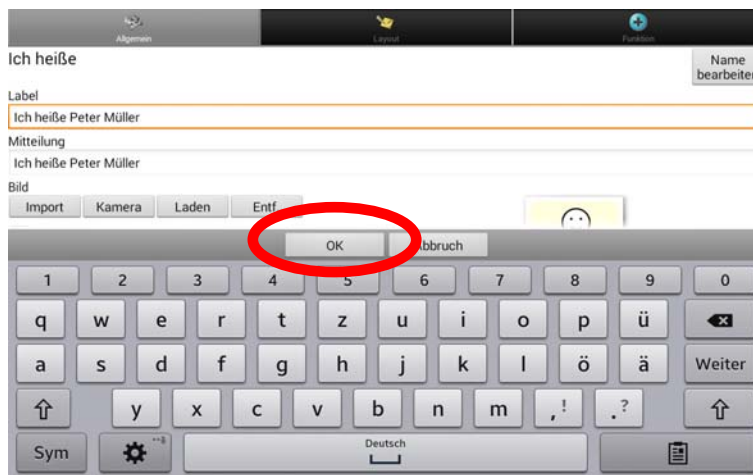

Mit den beiden Tasten  unten links und rechts können Sie die Groß- und Kleinschreibung verändern.

Beenden Sie die Eingabe mit .

Die Anzeige im Display springt zurück und Sie sehen den ergänzten Text:

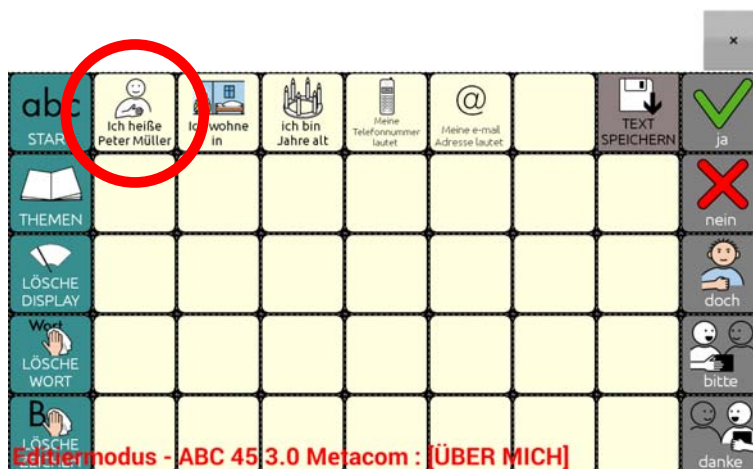



Um auch die Angaben auf den Tasten „Ich wohne in“, „Ich bin Jahre alt“, „Meine Telefonnummer lautet“ und „Meine e-mail-Adresse lautet“ zu ergänzen, tippen und halten Sie die jeweilige Taste und verfahren Sie wie im vorangegangenen Beispiel.


Felder, auf denen noch nichts gespeichert ist, können Sie selbst belegen, indem Sie einen eigenen Text eingeben. Tippen und halten Sie das Feld und wählen Sie die Option „Taste bearbeiten“.

Wenn der Text zu lang ist, um auf der Taste angezeigt zu werden, tippen Sie auf das Feld „Label“ und geben dort nur ein Stichwort als Merkhilfe ein.

Wenn Sie auf der Taste ein Bild hinzufügen möchten, gelangen Sie mit der Funktion „Bild – Laden“ in das Bildarchiv des Talkers. Sie können mittels „Bild – Import“ auch Bilder importieren oder mittels „Bild – Kamera“ Fotos mit der in das Gerät eingebauten Kamera anfertigen.

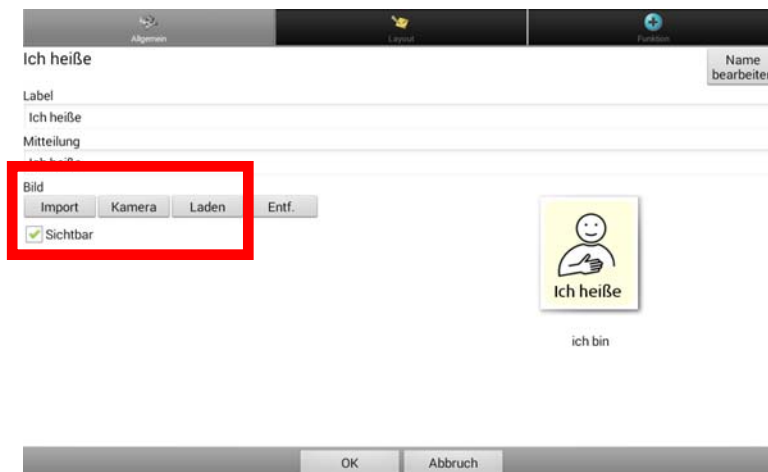


Nachdem Sie Ihre persönlichen Änderungen eingefügt haben, drücken Sie „OK“ und beenden Sie den Editiermodus. Drücken Sie dazu erneut die Taste „Menü“  auf dem Gerät und entfernen Sie den Haken bei „Editiermodus“.

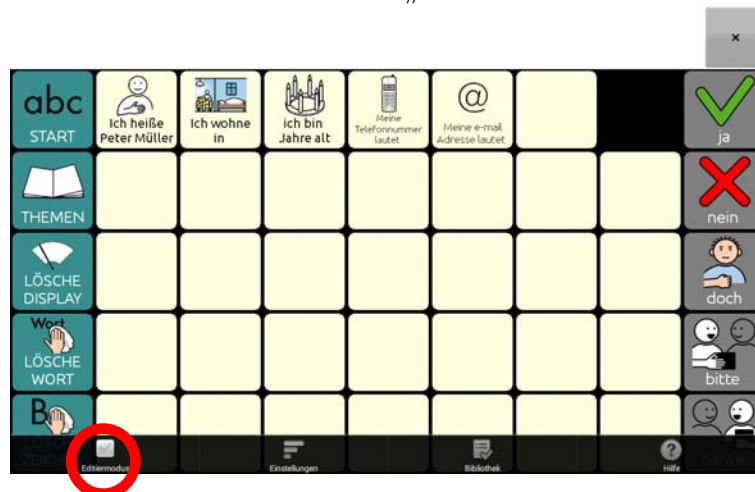

Ausführliche Informationen zum Thema „Seiten gestalten“ entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“ oder der Bedienungsanleitung im Kapitel „Tasten bearbeiten“.

## Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „TEXT SPEICHERN“

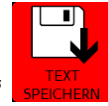



Alle Themenseiten enthalten rechts oben die Taste „TEXT SPEICHERN“, mit der Sie den aktuell im Textfenster befindlichen Text auf einer Taste der aktuellen Seite speichern können.

Haben Sie z. B. eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, weil Sie sie öfter verwenden wollen, können Sie sie mit Hilfe der Taste „TEXT SPEICHERN“ bequem auf einer Seite Ihrer Wahl dauerhaft speichern.

Bis auf die Seiten „MEINE SÄTZE 1“ und „MEINE SÄTZE 2“ ist die Taste „TEXT SPEICHERN“ zunächst ausgeblendet.


### Taste „TEXT SPEICHERN“ sichtbar machen

Wählen Sie die Seite aus, auf der Sie die Taste TEXT SPEICHERN nutzen wollen, z. B.

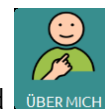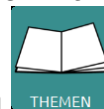


die Seite „ÜBER MICH“. Drücken Sie dazu die Tasten

Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät. Aktivieren Sie den Editiermodus.

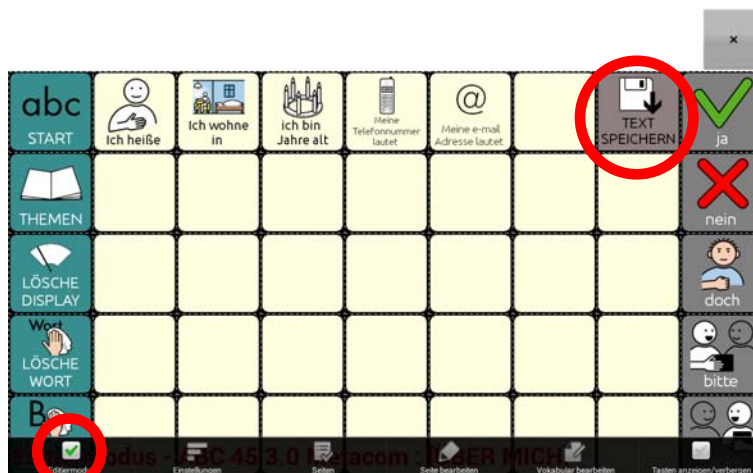

Tippen und halten Sie die Taste

Wählen Sie „Taste bearbeiten“.

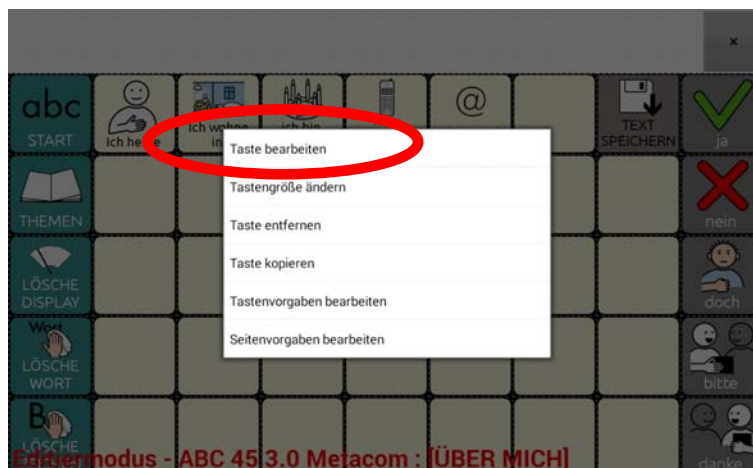





Setzen Sie den Haken bei „Sichtbar“. Wählen Sie anschließend „OK“.




Die Seite „ÜBER MICH“ wird wieder angezeigt. Das Feld „TEXT SPEICHERN“ ist nun nicht mehr ausgegraut.

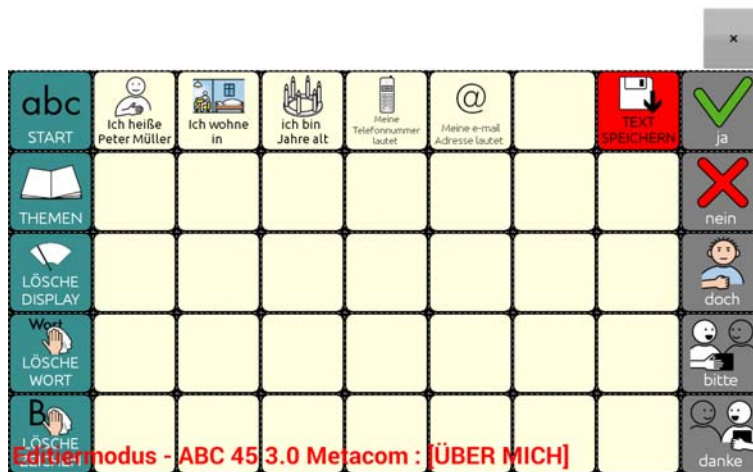

Beenden Sie den Editiermodus, indem Sie erneut die Taste „Menü“  auf dem Gerät drücken und den Haken bei „Editiermodus“ entfernen.


Die Taste „TEXT SPEICHERN“ ist nun auf der Seite „ÜBER MICH“ sichtbar und kann benutzt werden:

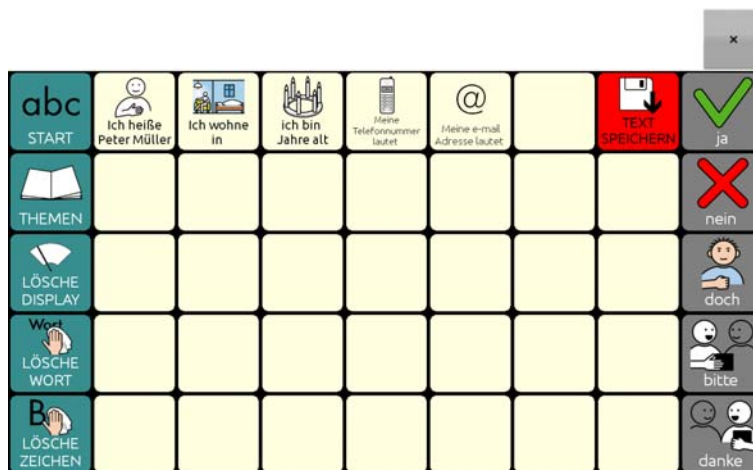


Verfahren Sie entsprechend mit allen Seiten, auf denen Sie die Taste „TEXT SPEICHERN“ nutzen wollen.

## Taste „TEXT SPEICHERN“ benutzen


Formulieren Sie eine Aussage. Öffnen Sie anschließend über die Seite „THEMEN“ die Themenseite, auf der Sie die Aussage dauerhaft speichern möchten (z. B. die Seite „ÜBER MICH“). Tippen Sie dort auf die Taste „TEXT SPEICHERN“.

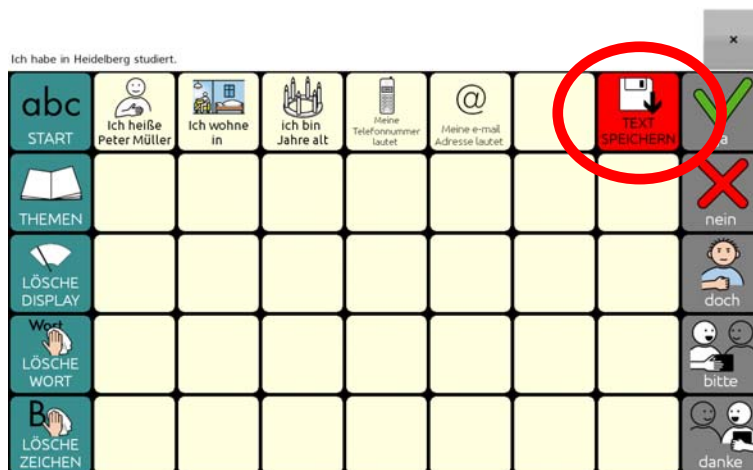

Beantworten Sie die Abfrage „Der Text im Textfenster wird auf der nächsten Taste gespeichert. Fortfahren?“ mit „Ja“.

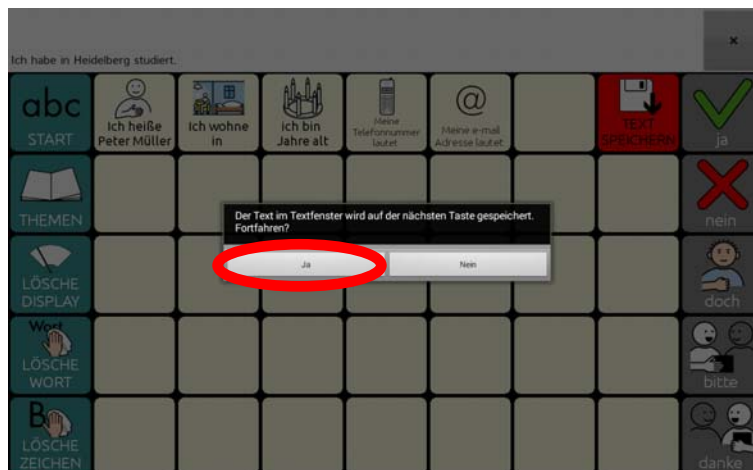

Wählen Sie die Taste aus, auf der die Aussage gespeichert werden soll. Achtung: Wenn Sie eine bereits belegte Taste auswählen, wird der Inhalt der Taste überschrieben!

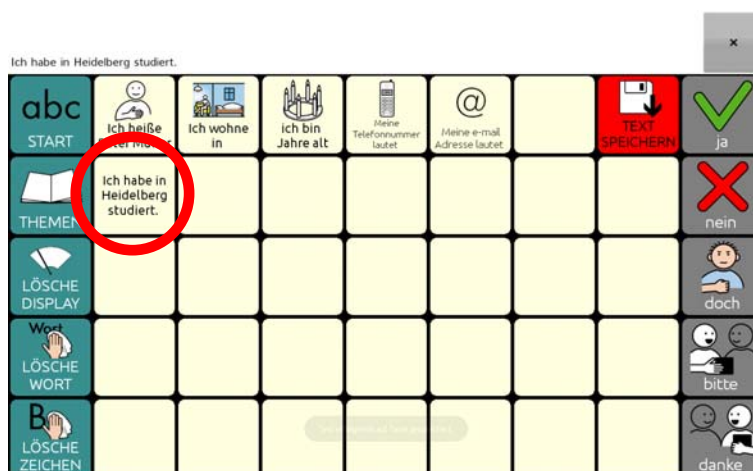

Die Aussage ist auf der Taste gespeichert.



## Aussprache korrigieren

Besonders bei Namen von Personen und Orten kann es vorkommen, dass der Talker den Namen mit der synthetischen Stimme nicht so ausspricht, wie Sie es gerne hätten. In diesem Fall sollten Sie das betreffende Wort zum Aussprache-Lexikon hinzufügen, damit der Talker lernt, den Begriff richtig auszusprechen.

Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät.


Wählen Sie „Einstellungen – Sprachausgabe – Sprachsynthese – Aussprache“.  
Das Aussprachelexikon wird angezeigt.



Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät und wählen Sie „Neu“ .  
Geben Sie in das Feld „Wort“ das Wort ein, dessen Aussprache Sie korrigieren möchten (z. B. „Marcel“).

Geben Sie in das Feld „Aussprache“ das Wort in einer phonetischen Schreibweise ein, die zu einer korrekten Aussprache des Worts führt (z. B. „mar sell“).

Tippen Sie auf „Anhören“, um die Aussprache der phonetischen Schreibweise zu testen.

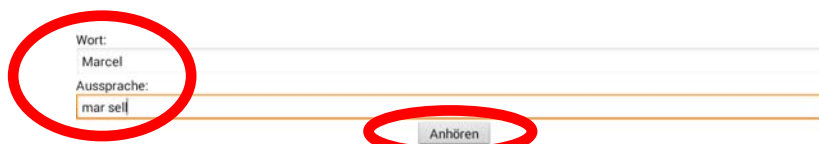


Tippen Sie auf „OK“, wenn Sie mit der Aussprache zufrieden sind. Das Wort wird im Aussprachelexikon gespeichert und ab sofort korrekt gesprochen.

## Besondere Funktionen des Talkers

Auf den Themenseiten „ERZÄHLEN“ und „FUNKTIONEN“ haben Sie Zugang zu besonderen Talkerfunktionen, die im Folgenden vorgestellt werden.


### Die Seite ERZÄHLEN


Auf der Seite „ERZÄHLEN“ können Sie aufgenommene Sprachmitteilungen wiedergeben bzw. Sprachmitteilung aufnehmen.

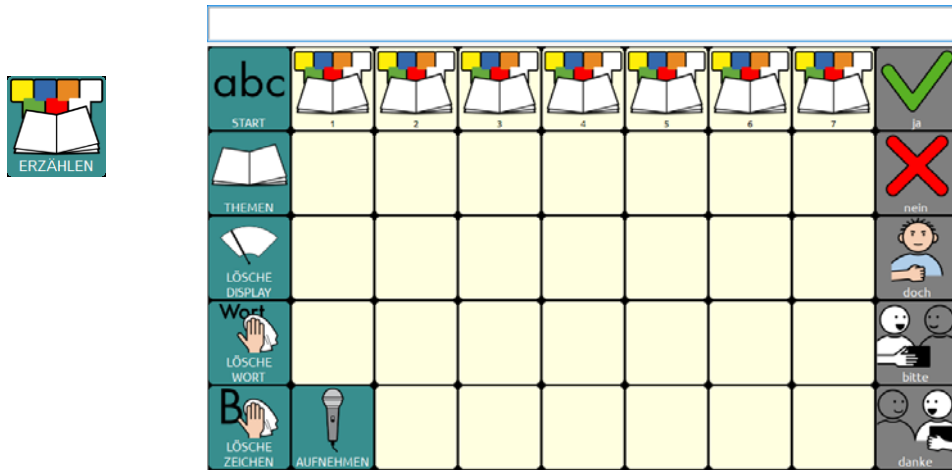

Zur Wiedergabe einer Sprachmitteilung drücken Sie eine der vorbereiteten Tasten 1-7. Die zugehörige Sprachmitteilung wird wiedergegeben.

Zur Neuaufnahme einer Sprachmitteilung drücken Sie die Taste „AUFNEH-


MEN“ . Die Seite zum Neuaufnehmen der Sprachmitteilungen wird angezeigt.

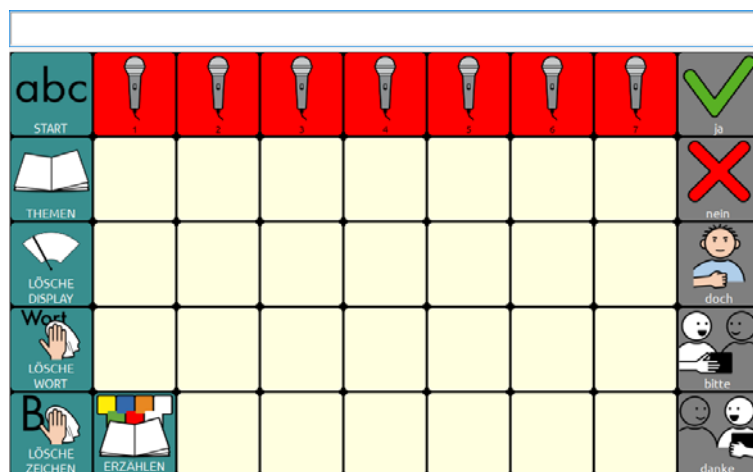

Zur Neuaufnahmen einer Sprachmitteilung drücken Sie die zugehörige Aufnahme-Taste und folgen Sie den Schritten zum Anfertigen einer Sprachaufnahme.


Lesen Sie dazu bitte auch das Kapitel „Sound aufnehmen“ im Chat-Software-Manual.

## Die Seite EINSTELLUNGEN

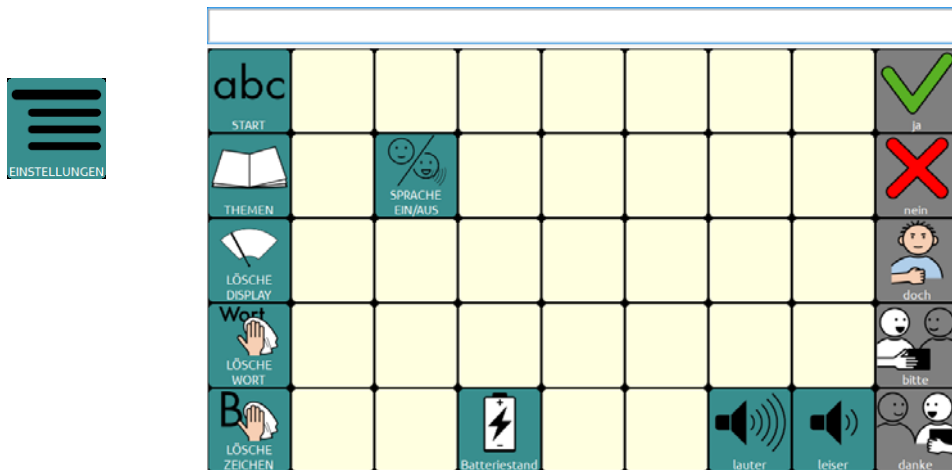

Diese Seite ermöglicht Zugriff auf wichtige Talker-Funktionen.

### Sprache an/aus

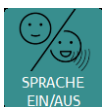

Die Taste **SPRACHE EIN/AUS** schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein.

### Batteriestand




Die Taste **Batteriestand** gibt Informationen zur Kapazität und zum Ladezustand der Geräte- und Verstärkerbatterie aus.

### Lauter



Die Taste **lauter** erhöht die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

### Leiser

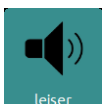


Die Taste **leiser** reduziert die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

## Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen


Sichern Sie regelmäßig das „ABC 45“ -Programm mit Ihren persönlichen Änderungen, damit Sie im Falle eines Datenverlustes (auch der Talker ist ein Computer!) eine Sicherungskopie Ihres Vokabulars in das Gerät zurück laden können.

### Vokabular vom Gerät in den Chat-Editor kopieren


Schließen Sie den Talker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an. Starten Sie auf dem PC den Chat-Editor. In der Menüzeile des Chat-Editors sollte „Gerät ist verbunden“ erscheinen.

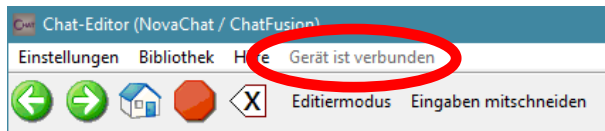

Wählen Sie im Chat-Editor „Bibliothek – Übertragen – Vokabular zum/vom Gerät“.

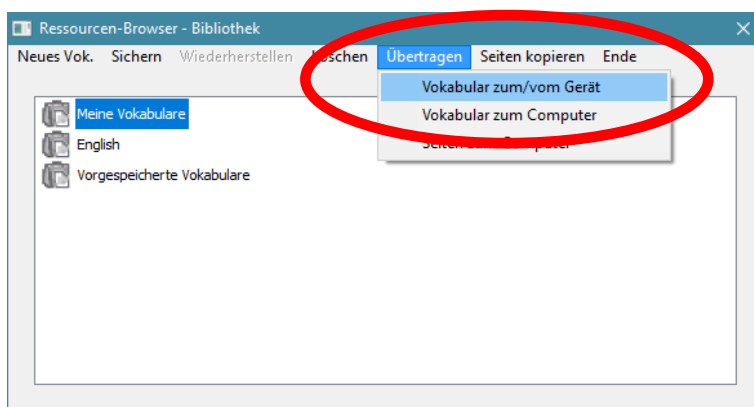


Wählen Sie im rechten Fenster („Vokabulare auf dem Gerät“) das Vokabular, das in den Chat-Editor kopiert werden soll:

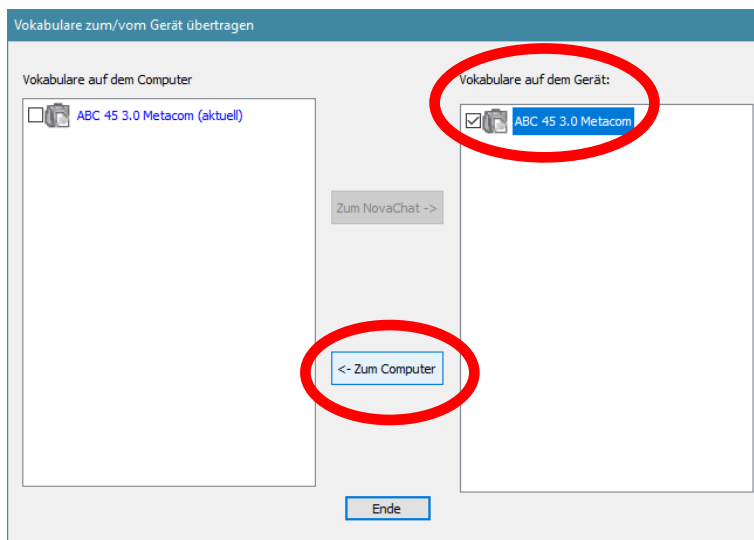


Klicken Sie anschließend auf „<- Zum Computer“. Das Vokabular wird auf den Computer kopiert.

## Vokabular vom Chat-Editor auf das Gerät kopieren


Schließen Sie den Talker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an.  
Starten Sie auf dem PC den Chat-Editor. In der Menüzeile des Chat-Editors sollte „Gerät ist verbunden“ erscheinen.

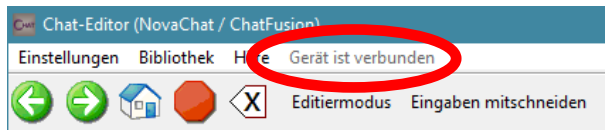

Wählen Sie im Chat-Editor „Bibliothek – Übertragen – Vokabular zum/vom Gerät“

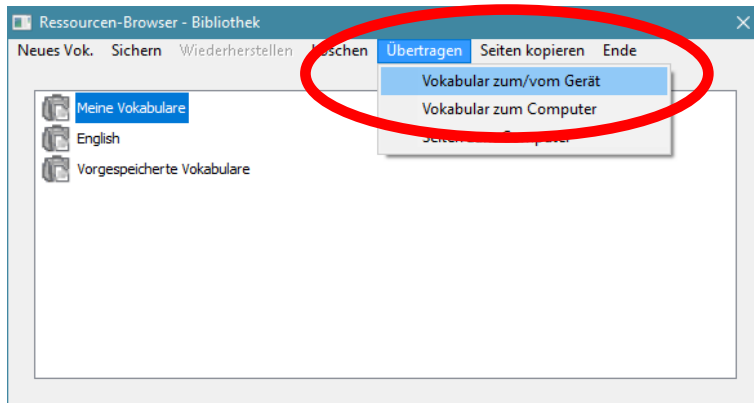

Wählen Sie im linken Fenster („Vokabulare auf dem Computer“) das Vokabular, das auf das Gerät kopiert werden soll:

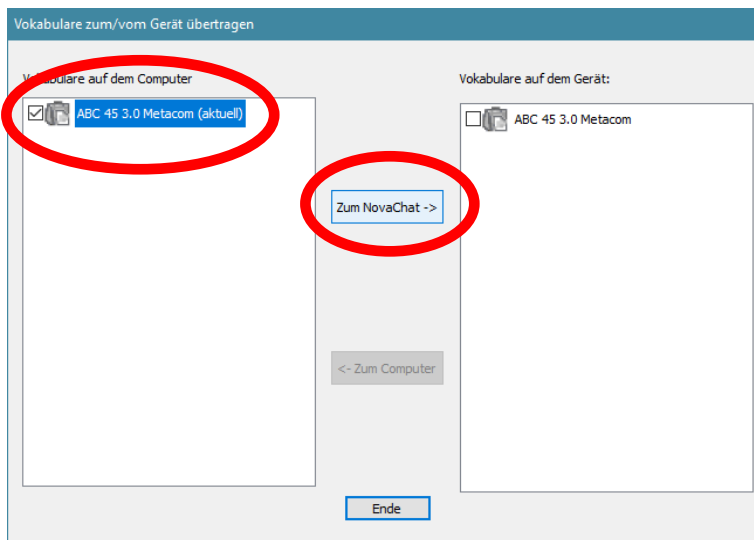

Klicken Sie anschließend auf „Zum NovaChat ->“. Das Vokabular wird auf das Gerät kopiert.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Talker!**

# ABC 50

## Version mit oder ohne Metacom-Symbole

Das Wortschatzprogramm „ABC 50“ gibt es in 2 Versionen, eines mit und eines ohne Metacom-Symbole. Die Version ohne Metacom-Symbole verwendet lediglich Textlabel zur Kennzeichnung von Funktionstasten und Aussagen, die Version mit Metacom nutzt zusätzlich Metacom-Symbole.



ABC 50 ohne Metacom-Symbole




ABC 50 mit Metacom-Symbolen

Die im Folgenden gemachten Angaben gelten für beide Versionen, auch wenn die Grafiken die Version ABC 50 mit Metacom-Symbolen zeigen.

## Die SCHRIFT-SEITE

Schalten Sie den Talker mit der Ein/Aus-Taste ein.

Nach dem Startvorgang erscheint folgendes Bild im Display:

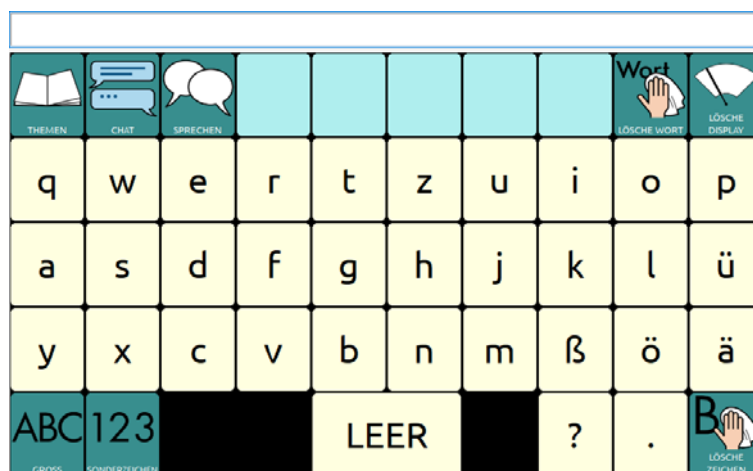

Die oberste Zeile, die im Augenblick noch leer ist, heißt Textfenster. Hier erscheinen im Folgenden die Buchstaben und Wörter, die Sie schreiben.

Die Anordnung der Buchstaben auf der SCHRIFT-SEITE orientiert sich an der QWERTZ-Reihenfolge einer PC-Tastatur.

In den hellblauen Feldern erscheinen die Vorschläge der Wortvorhersage, sobald Sie zu schreiben beginnen. Tippen Sie auf ein Feld, um einen Vorschlag zu übernehmen.

Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen.

Tippen Sie z. B. nacheinander die einzelnen Buchstaben h a l l o und am Ende die Taste „LEER“ unten in der Mitte.











(Stören Sie sich bitte nicht daran, falls der Talker die einzelnen Buchstaben nicht laut ausspricht. Das liegt daran, dass die Sprache ausgeschaltet ist. Wie man die Sprachausgabe ein- und ausschalten kann, erfahren Sie bei den Erläuterungen zur THEMEN-SEITE weiter hinten in dieser Einführung.)

Im Textfenster in der oberen Zeile erscheint das Wort „hallo“. Tippen Sie auf das angezeigte Wort „hallo“, und der Talker spricht das ganze Wort.

## Grüne Funktionstasten

Auf der SCHRIFT-SEITE befinden sich auch einige grün unterlegte Tasten mit Funktionen, die beim Schreiben wichtig sind:





Version mit META-COM-Symbolen	Version ohne META-COM-Symbole	
 LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE ZEICHEN	Zeichen löschen
 LÖSCHE WORT	LÖSCHE WORT	Wort löschen
 LÖSCHE DISPLAY	LÖSCHE DISPLAY	Inhalt des Textfensters löschen
 GROSS GROSS FEST KLEIN	GROSS GROSS FEST KLEIN	Wechsel zwischen Groß-, permanent Groß- und Kleinschreibung
 SONDERZEICHEN	123	Wechsel zur Seite SONDERZEICHEN
 THEMEN	THEMEN	Wechsel zur THEMEN-SEITE
 CHAT	CHAT	Wechsel zur CHAT-SEITE
 SPRECHEN	SPRECHEN	Spricht den Inhalt des Textfensters

## Die Seite SONDERZEICHEN

123

Drücken Sie auf der SCHRIFT-SEITE die Taste .

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen nun die Seite SONDERZEICHEN:


					[	]	"	Word 	
THEMEN								LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	1	2	3		(	)	'	\	/
	4	5	6		*	€	@	&	%
	7	8	9		!	;	:	-	+
ABC <small>ABC</small>	=	0	#	LEER	_	,	?	.	
								LÖSCHE ZEICHEN	

Die Seite SWONDERZEICHEN bleibt geöffnet, bis Sie sie manuell wieder schließen:



Drücken Sie die Taste , um wieder auf die START-SEITE zu gelangen.

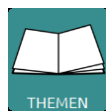


Drücken Sie die Taste , um auf die THEMEN-SEITE zu gelangen.


## Wortvorhersage

Der Talker verfügt über eine leistungsfähige Wortvorhersage, bestehend aus einer Wortvervollständigung des gerade eingegebenen Wortes und einer Vorhersage des nächsten Wortes.

Beim Schreiben erscheinen auf den hellblauen Tasten Wortvorschläge, die Sie durch direktes Antippen auswählen können, um den Schreibprozess abzukürzen.

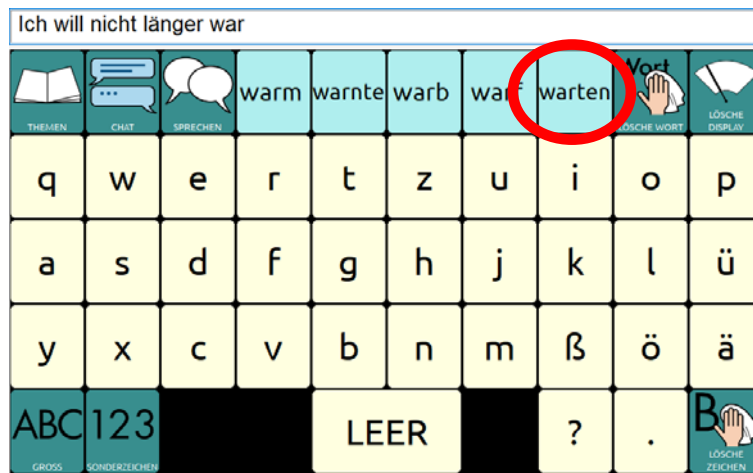


Hinweis: Über „Einstellungen – Schreibhilfen – Wortvorhersage – Wort hinzufügen“ können Sie Wörter zum Wortvorhersagelexikon hinzufügen.

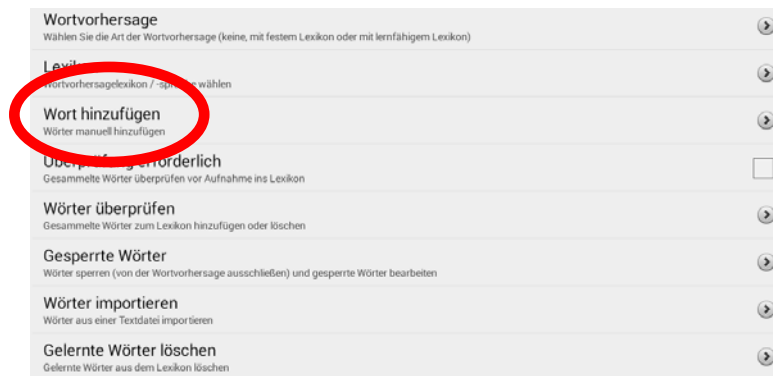


## Die THEMEN-SEITEN

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Schrifteingabe bietet der Talker auch die Funktion, Wörter und Sätze, die man häufig benötigt, als Ganzes abzuspeichern, damit man sie nicht jedes Mal wieder schreiben muss.

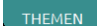

Drücken Sie die Taste Themen  auf der SCHRIFT-SEITE.  
Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen die THEMEN-SEITE:

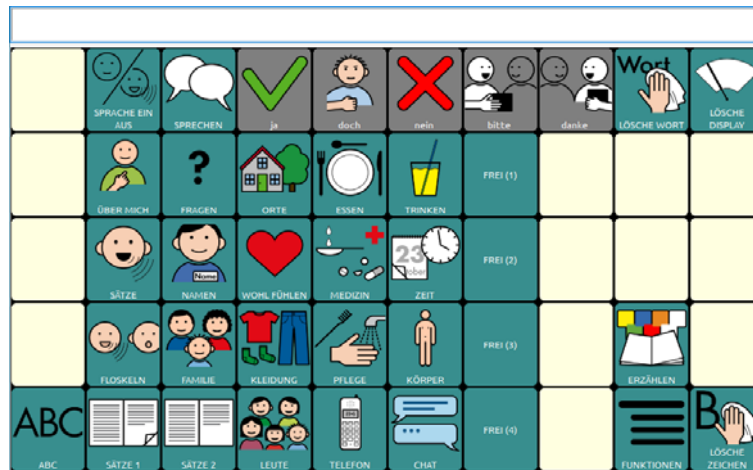

Die grün hinterlegten Tasten öffnen Seiten zu verschiedenen Themenbereichen, die Sie individuell verändern können (weiter hinten in dieser Einführung wird die entsprechende Vorgehensweise erläutert). Auf den Tasten steht jeweils der Name der damit zu öffnenden Seite.

Die grau hinterlegten Aussagen in der rechten Spalte „ja“, „nein“, „doch“, „bitte“ und „danke“ in der rechten Spalte sind auf allen Themenseiten zu finden. **Bei allen grau hinterlegten Tasten gilt: Die Tasten dienen dem Kommentieren, der jeweilige Inhalt wird nicht im Textfenster angezeigt!**




Wechsel zurück zur SCHRIFT-SEITE




Wechsel zurück zur THEMEN-SEITE



Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters.

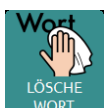

Löscht das letzte Wort im Textfenster.

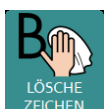

Löscht den zuletzt eingegebenen Buchstaben im Textfenster.

Im Folgenden sind alle Themenseiten abgebildet.

## Die Seite ÜBER MICH



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	ich heiße	ich wohne in	ich bin Jahre alt	Meine Telefonnummer lautet	Meine e-mail Adresse lautet			
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FRAGEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	was ist das?	Was gibt es Neues?						
	Wann kommst du wieder?	Was hast du gestern gemacht?	Wie geht es dir?					
	Wie viel kostet das?							
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite ORTE




THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	Apothete	Bäcker	Bahnhof	Bank	Geschäft	Kino	Kloster	
	Kirche	Markt	Metzgerei	Park	Post	Supermarkt	Tankstelle	
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite ESSEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Ich habe Hunger.	Wann gibt es Essen?	Was gibt es zu Essen?	Ich möchte etwas anderes.	Das reicht.	Mir ist schlecht!	Das darf ich nicht essen!	LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite TRINKEN

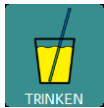

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Ich habe Durst.	Ich brauche Hilfe!	Was gibt es zu Trinken?	Ich möchte etwas anderes.	Das reicht.	Mir ist schlecht!	Das darf ich nicht trinken!	LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite SÄTZE



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
ABC								LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite NAMEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Wie heißt du?	Wie heißen Sie?							B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite WOHLFÜHLEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Mir ist langweilig.	So ist es gut!	So ist es nicht richtig.						B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite MEDIZIN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Ich brauche ein neues Rezept.	Ich brauche Hilfe!	Ich möchte einen Arzt sprechen.	Das habe ich verstanden.	Das habe ich nicht verstanden.	Wann sehen wir uns wieder?			B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite ZEIT



Die Taste



sagt  
Datum und  
Uhrzeit an.

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	<b>Mo</b> Montag	<b>Di</b> Dienstag	<b>Mi</b> Mittwoch	<b>Do</b> Donnerstag	<b>Fr</b> Freitag	<b>Sa</b> Samstag	<b>So</b> Sonntag	Woche	Tag
	1	2	3	4	5	6	Uhr	Wochenende	LEER
	7	8	9	10	11	12	Stunde	Monat	
ABC	früh	gestern	heute	morgen	nach	spät	Minute	Jahr	LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FLOSKELN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Hallo	Guten Tag	Tschüss	Auf Wiedersehen	Moin	Grüß Gott			
	Glückwunsch	Alles Gute	Entschuldigung	Frühe Weihnachten					
ABC									LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FAMILIE



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Enkel	Sohn	Vater	Opa	Bruder	Schwieger- sohn			
	Enkelin	Tochter	Mutter	Oma	Schwester	Schwieger- tochter			
ABC									LÖSCHE ZEICHEN



## Die Seite KLEIDUNG




THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Wie sehe ich aus?	Wie ist das Wetter heute?	Ich möchte mich im Spiegel sehen.						LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite PFLEGE



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Zähne putzen	waschen	duschen	baden					
ABC	Türe zu, bitte.	Ich brauche Hilfe!	Ich muss auf die Toilette.						LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite KÖRPER

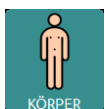

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Ich möchte mich hinlegen.	Ich brauche Hilfe!	Es juckt mich.	Ich habe Schmerzen.	Mir ist schlecht!				LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite SÄTZE 1



THEMEN	TEXT SPEICHERN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite SÄTZE 2



THEMEN	TEXT SPEICHERN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite LEUTE



THEMEN		SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	Besucher	Nachbar							
	Frau	Mann							
	Mädchen	Junge	Kind						
ABC	Krankenschwester	Pfleger							B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite TELEFON



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
Hallo!	Hier spricht	Auf Wiederhören!						
Bitte stellen Sie mir eine Ja-Nein Frage.	Bitte rufen Sie später nochmal an.	Bitte warten sie ich beantworte die Frage mit meinem Sprechcomputer.	Bitte wiederholen Sie das.					
Das habe ich verstanden	Das habe ich nicht verstanden.							
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite CHAT



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
Stelle mir bitte eine Ja-Nein Frage!	Ich bin gerade dabei zu antworten							
Ich verstehe alles, was Sie zu mir sagen.	Wiederholen Sie bitte die Frage.							
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite ERZÄHLEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUFNEHMEN								
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FREI (1)

FREI (1)

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FREI (2)

FREI (2)

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN


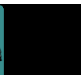










## Die Seite FREI (3)

FREI (3)

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

# Die Seite FREI (4)

FREI (4)

 THEMEN		 SPRECHEN	 ja	 doch	 nein	 bitte	 danke	 Wort LÖSCHE WORT	 LÖSCHE DISPLAY
 ABC									 LÖSCHE ZEICHEN


## Eigene Änderungen einfügen

Bevor wir zu den Sonderfunktionen auf der Seite „FUNKTIONEN“ kommen, erfahren Sie, wie Sie eigene Änderungen in das Programm „ABC 50“ einfügen können.


## Seiten ändern im Editiermodus

Das Programm „ABC 50“ ist aus einzelnen Seiten zusammengesetzt. Um Änderungen auf einer Seite vorzunehmen, müssen Sie die jeweilige Seite zunächst öffnen (anzeigen lassen) und dann den Editiermodus aktivieren.

Im Folgenden wird dies Schritt für Schritt am Beispiel der Seite „ÜBER MICH“ erläutert.

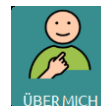

Öffnen Sie die Seite „ÜBER MICH“, indem Sie **THEMEN** und **ÜBER MICH** auswählen

Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät.  
Aktivieren Sie den Editiermodus.




Unten steht: Editiermodus – ABC 50 3.0 Metacom : [ÜBER MICH]


Ändern Sie die für Ihren Namen, Adresse, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse vorbereiteten Tasten.

Tippen und halten Sie die Taste „Ich heiße“ gedrückt, bis im Display das Menüfenster erscheint.


Wählen Sie „Taste bearbeiten“.

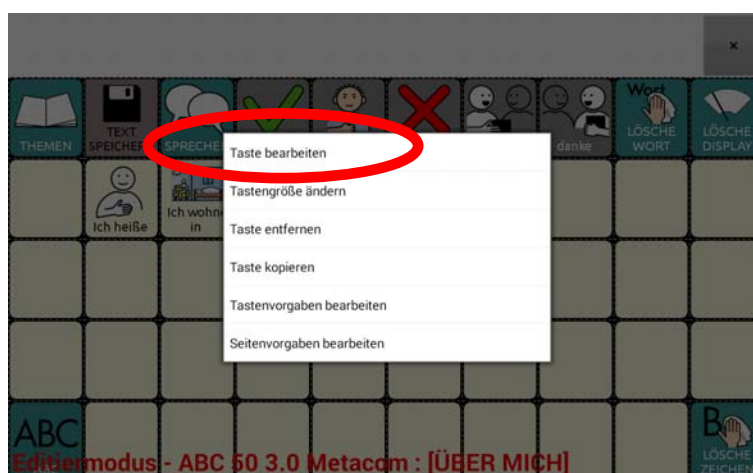


Die aktuelle Belegung der Taste wird angezeigt.

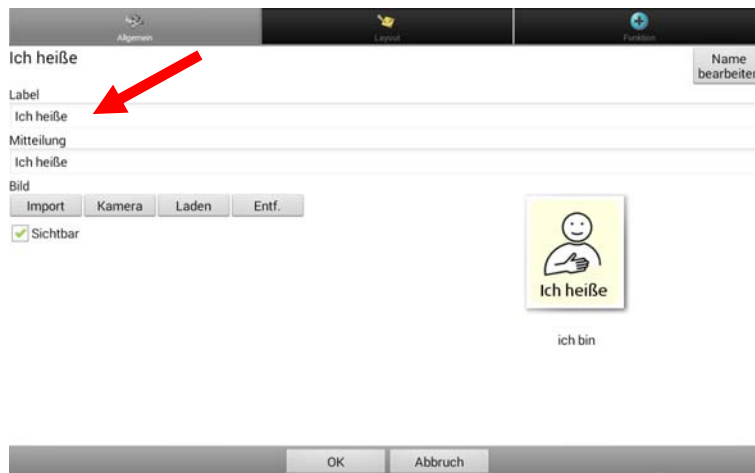


Tippen Sie im Feld „Label“ hinter das Wort „heiße“. Mit Hilfe der Buchstabentastatur, die dann erscheint, können Sie Ihren Namen ergänzen. Die Eingabe wird automatisch in das Feld „Mitteilung“ übernommen.

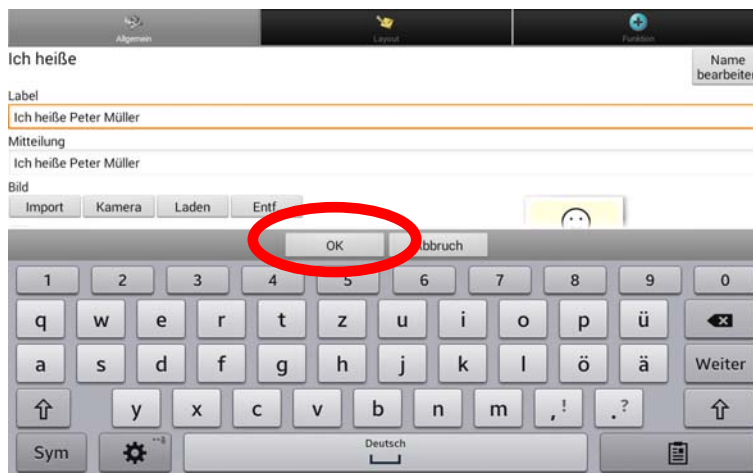

Mit den beiden Tasten  unten links und rechts können Sie die Groß- und Kleinschreibung verändern.

Beenden Sie die Eingabe mit .

Die Anzeige im Display springt zurück und Sie sehen den ergänzten Text:

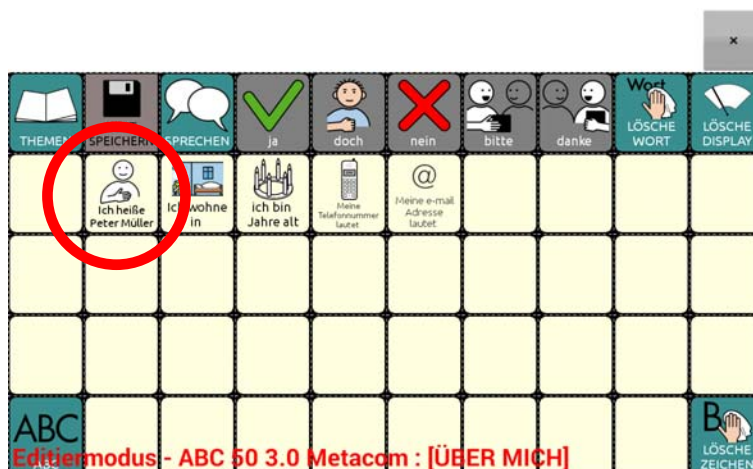



Um auch die Angaben auf den Tasten „Ich wohne in“, „Ich bin Jahre alt“, „Meine Telefonnummer lautet“ und „Meine e-mail-Adresse lautet“ zu ergänzen, tippen und halten Sie die jeweilige Taste und verfahren Sie wie im vorangegangenen Beispiel.


Felder, auf denen noch nichts gespeichert ist, können Sie selbst belegen, indem Sie einen eigenen Text eingeben. Tippen und halten Sie das Feld und wählen Sie die Option „Taste bearbeiten“.

Wenn der Text zu lang ist, um auf der Taste angezeigt zu werden, tippen Sie auf das Feld „Label“ und geben dort nur ein Stichwort als Merkhilfe ein.

Wenn Sie auf der Taste ein Bild hinzufügen möchten, gelangen Sie mit der Funktion „Bild – Laden“ in das Bildarchiv des Talkers. Sie können mittels „Bild – Import“ auch Bilder importieren oder mittels „Bild – Kamera“ Fotos mit der in das Gerät eingebauten Kamera anfertigen.

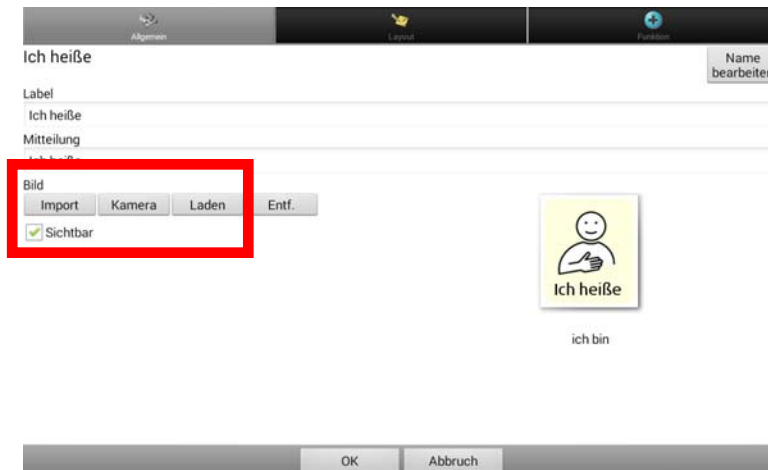

Nachdem Sie Ihre persönlichen Änderungen eingefügt haben, drücken Sie „OK“ und beenden Sie den Editiermodus. Drücken Sie dazu erneut die Taste „Menü“  auf dem Gerät und entfernen Sie den Haken bei „Editiermodus“.

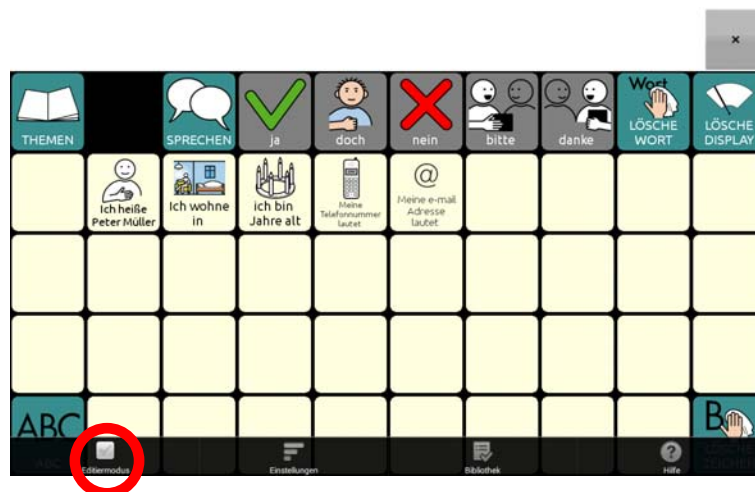

Ausführliche Informationen zum Thema „Seiten gestalten“ entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“ oder der Bedienungsanleitung im Kapitel „Tasten bearbeiten“.



## Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „TEXT SPEICHERN“





Alle Themenseiten enthalten links oben die Taste „TEXT SPEICHERN“, mit der Sie den aktuell im Textfenster befindlichen Text auf einer Taste der aktuellen Seite speichern können.

Haben Sie z. B. eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, weil Sie sie öfter verwenden wollen, können sie sie mit Hilfe der Taste „TEXT SPEICHERN“ bequem auf einer Seite Ihrer Wahl dauerhaft speichern.

Bis auf die Seiten „SÄTZE 1“ und „SÄTZE 2“ ist die Taste „TEXT SPEICHERN“ zunächst ausgeblendet.


### Taste „TEXT SPEICHERN“ sichtbar machen

Wählen Sie die Seite aus, auf der Sie die Taste „TEXT SPEICHERN“ nutzen wollen, z. B.

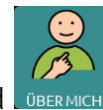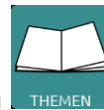


die Seite „ÜBER MICH“. Drücken Sie dazu die Tasten

„Menü“  auf dem Gerät. Aktivieren Sie den Editiermodus.

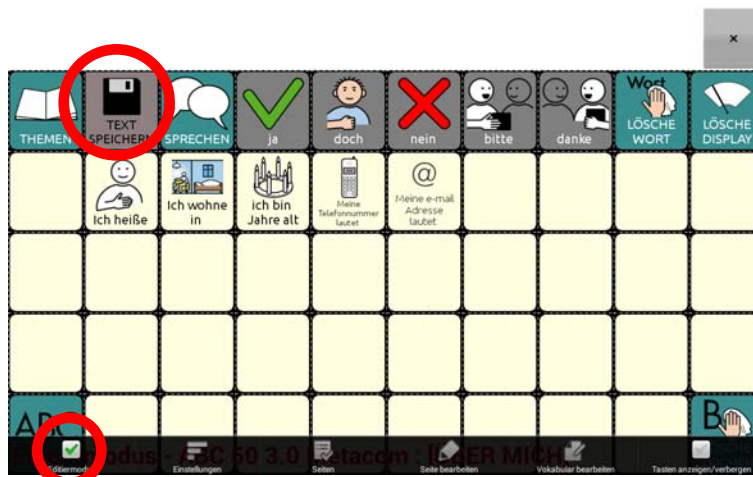


Tippen und halten Sie die Taste „Taste bearbeiten“.

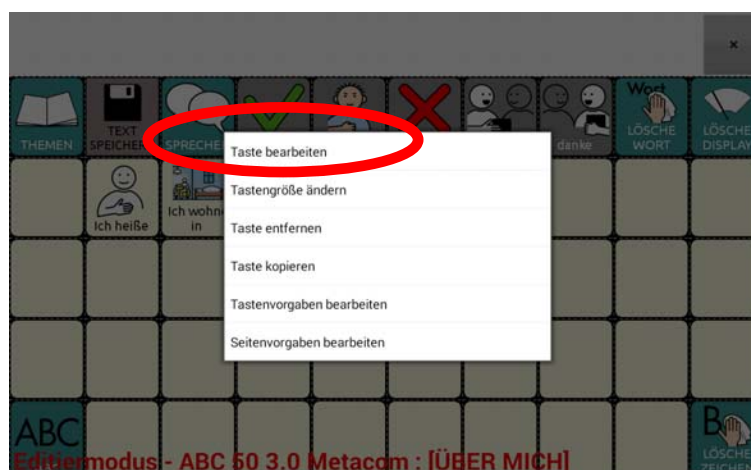


Setzen Sie den Haken bei „Sichtbar“. Wählen Sie anschließend „OK“.




Die Seite „ÜBER MICH“ wird wieder angezeigt. Das Feld „TEXT SPEICHERN“ ist nun nicht mehr ausgegraut.

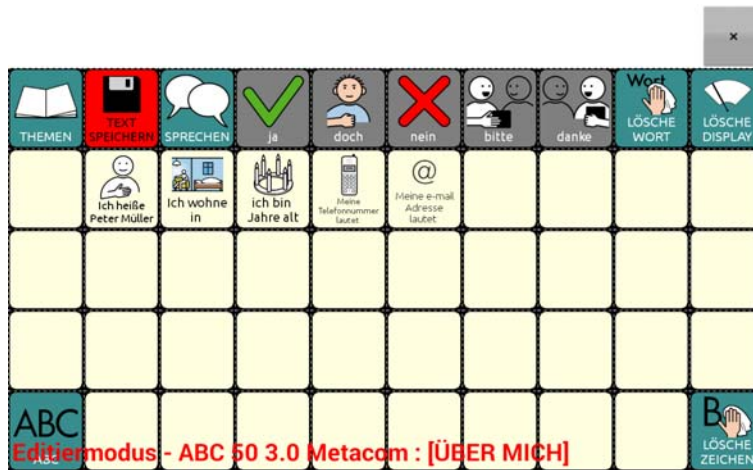

Beenden Sie den Editiermodus, indem Sie erneut die Taste „Menü“  auf dem Gerät drücken und den Haken bei „Editiermodus“ entfernen.


Die Taste „TEXT SPEICHERN“ ist nun auf der Seite „ÜBER MICH“ sichtbar und kann benutzt werden:

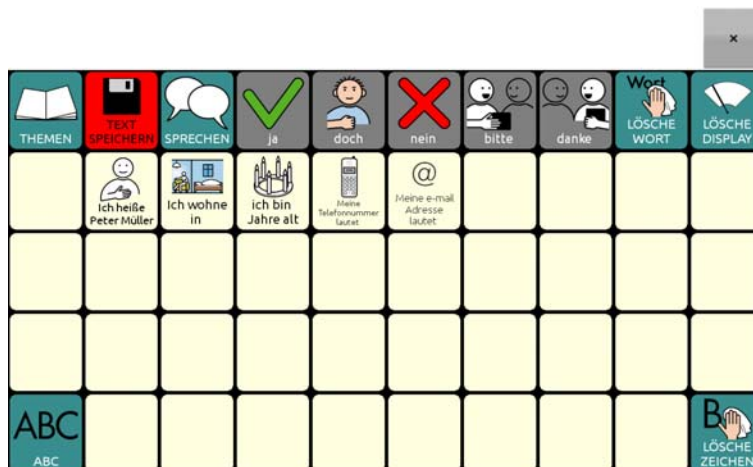


Verfahren Sie entsprechend mit allen Seiten, auf denen Sie die Taste „TEXT SPEICHERN“ nutzen wollen.

## Taste „TEXT SPEICHERN“ benutzen


Formulieren Sie eine Aussage. Öffnen Sie anschließend über die Seite THEMEN die Themenseite, auf der Sie die Aussage dauerhaft speichern möchten (z. B. die Seite ÜBER MICH). Tippen Sie dort auf die Taste TEXT SPEICHERN.

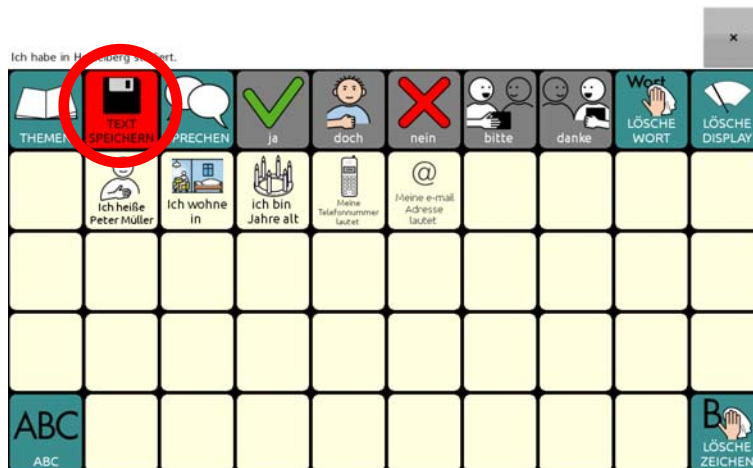

Beantworten Sie die Abfrage „Der Text im Textfenster wird auf der nächsten Taste gespeichert. Fortfahren?“ mit „Ja“.

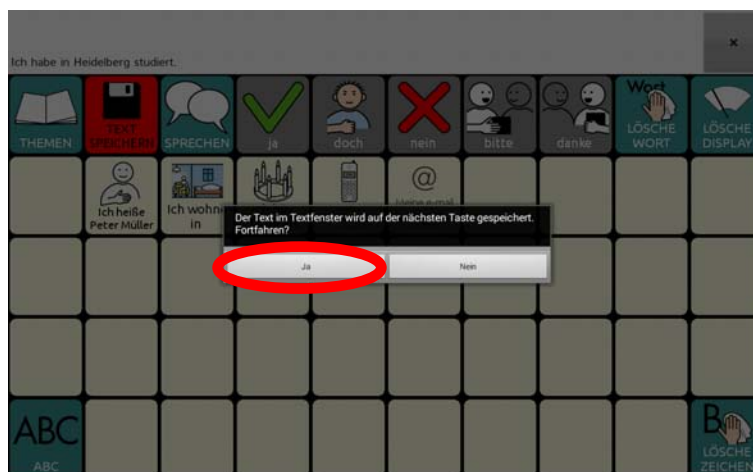

Wählen Sie die Taste aus, auf der die Aussage gespeichert werden soll. Achtung: Wenn Sie eine bereits belegte Taste auswählen, wird der Inhalt der Taste überschrieben!

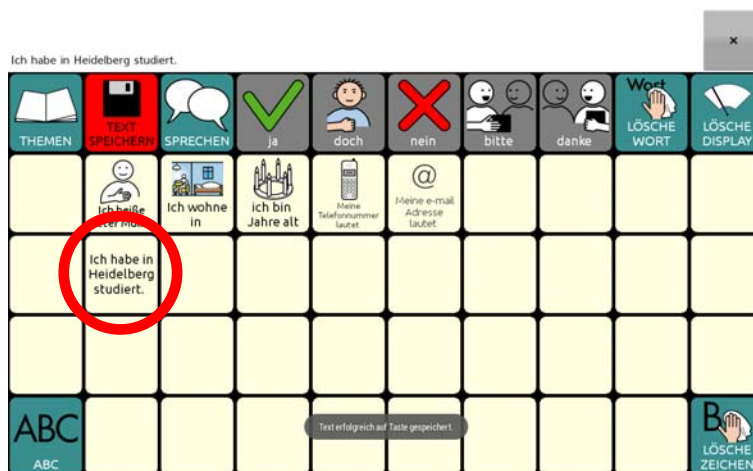

Die Aussage ist auf der Taste gespeichert.


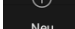
## Aussprache korrigieren

Besonders bei Namen von Personen und Orten kann es vorkommen, dass der Talker den Namen mit der synthetischen Stimme nicht so ausspricht, wie Sie es gerne hätten. In diesem Fall sollten Sie das betreffende Wort zum Aussprache-Lexikon hinzufügen, damit der Talker lernt, den Begriff richtig auszusprechen.

Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät.

Wählen Sie „Einstellungen – Sprachausgabe – Sprachsynthese – Aussprache“  
Das Aussprachelexikon wird angezeigt.



Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät und wählen Sie „Neu“ .  
Geben Sie in das Feld „Wort“ das Wort ein, dessen Aussprache Sie korrigieren möchten (z. B. „Marcel“).

Geben Sie in das Feld „Aussprache“ das Wort in einer phonetischen Schreibweise ein, die zur einer korrekten Aussprache des Worts führt (z. B. „mar sell“).

Tippen Sie auf „Anhören“, um die Aussprache der phonetischen Schreibweise zu testen.




Tippen Sie auf „OK“, wenn Sie mit der Aussprache zufrieden sind. Das Wort wird im Aussprachelexikon gespeichert und ab sofort korrekt gesprochen.

## Besondere Funktionen des Talkers

Auf den Themenseiten „ERZÄHLEN“ und „FUNKTIONEN“ haben Sie Zugang zu besonderen Talkerfunktionen, die im Folgenden vorgestellt werden.


### Die Seite ERZÄHLEN


Auf der Seite ERZÄHLEN können Sie aufgenommene Sprachmitteilungen wiedergeben bzw. Sprachmitteilung aufnehmen.

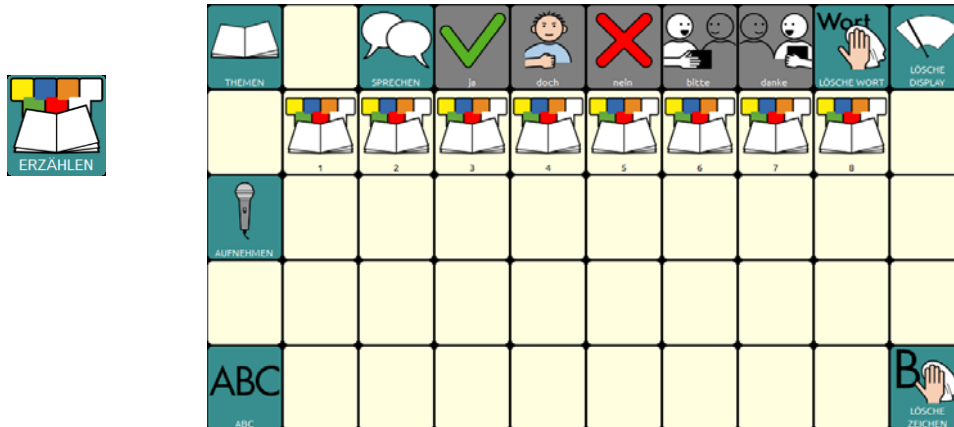

Zur Wiedergabe einer Sprachmitteilung drücken Sie eine der vorbereiteten Tasten 1-8. Die zugehörige Sprachmitteilung wird wiedergegeben.

Zur Neuaufnahme einer Sprachmitteilung drücken Sie die Taste „AUFNEH-


MEN“ . Die Seite zum Neuaufnehmen der Sprachmitteilungen wird angezeigt.

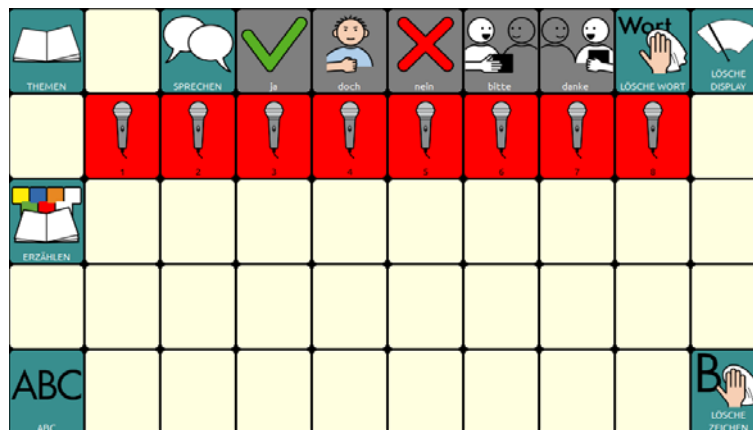

Zur Neuaufnahmen einer Sprachmitteilung drücken Sie die zugehörige Aufnahme-Taste und folgen Sie den Schritten zum Anfertigen einer Sprachaufnahme.

Lesen Sie dazu bitte auch das Kapitel „Sound aufnehmen“ im Chat-Software-Manual.

## Die Seite FUNKTIONEN

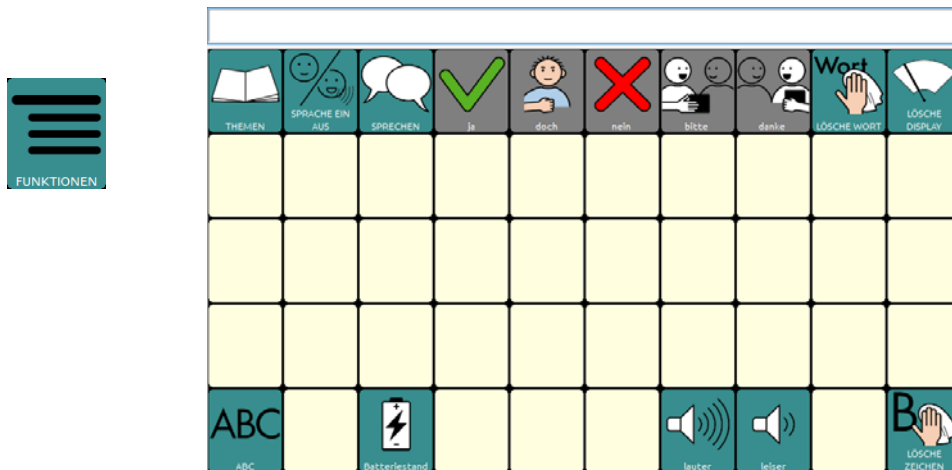

Diese Seite ermöglicht Zugriff auf wichtige Talker-Funktionen.

### Sprache an/aus



Die Taste **SPRACHE EIN/AUS** schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein.

### Batteriestand



Die Taste **Batteriestand** gibt Informationen zur Kapazität und zum Ladezustand der Geräte- und Verstärkerbatterie aus.

### Lauter



Die Taste **lauter** erhöht die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

### Leiser




Die Taste **leiser** reduziert die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

## Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen


Sichern Sie regelmäßig das „ABC 50“ -Programm mit Ihren persönlichen Änderungen, damit Sie im Falle eines Datenverlustes (auch der Talker ist ein Computer!) eine Sicherungskopie Ihres Vokabulars in das Gerät zurück laden können.

### Vokabular vom Gerät in den Chat-Editor kopieren


Schließen Sie den Talker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an. Starten Sie auf dem PC den Chat-Editor. In der Menüzeile des Chat-Editors sollte „Gerät ist verbunden“ erscheinen.

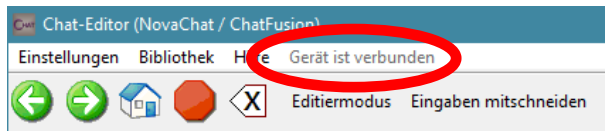

Wählen Sie im Chat-Editor „Bibliothek – Übertragen – Vokabular zum/vom Gerät“.

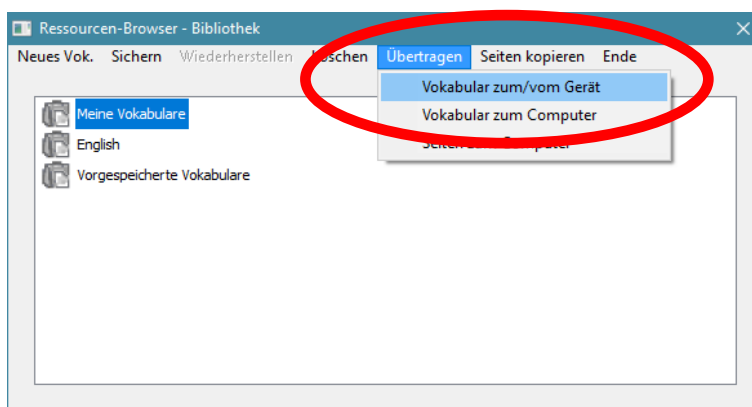


Wählen Sie im rechten Fenster („Vokabulare auf dem Gerät“) das Vokabular, das in den Chat-Editor kopiert werden soll:

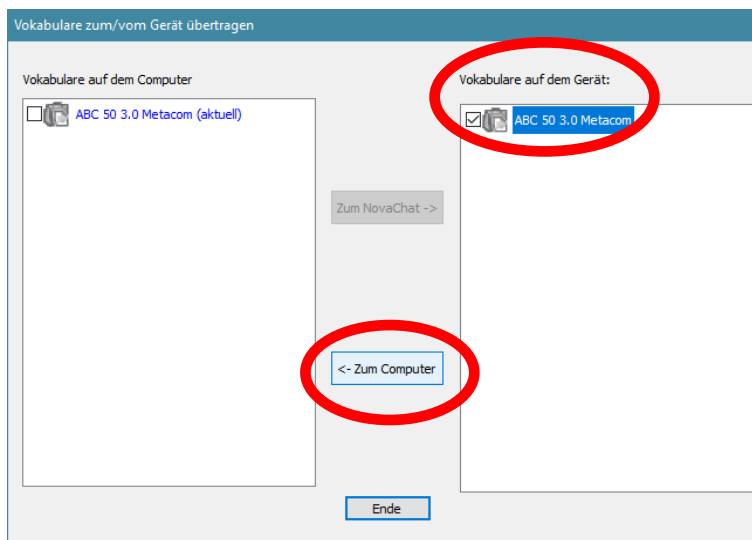


Klicken Sie anschließend auf „<- Zum Computer“. Das Vokabular wird auf den Computer kopiert.

## Vokabular vom Chat-Editor auf das Gerät kopieren


Schließen Sie den Talker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an.  
Starten Sie auf dem PC den Chat-Editor. In der Menüzeile des Chat-Editors sollte „Gerät ist verbunden“ erscheinen.

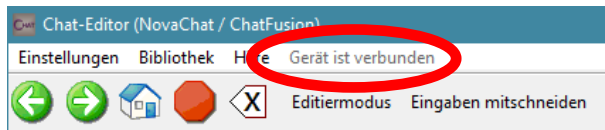

Wählen Sie im Chat-Editor „Bibliothek – Übertragen – Vokabular zum/vom Gerät“

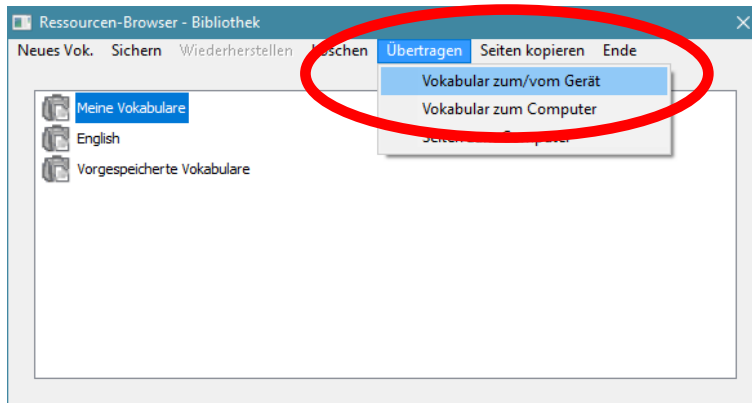

Wählen Sie im linken Fenster („Vokabulare auf dem Computer“) das Vokabular, das auf das Gerät kopiert werden soll:

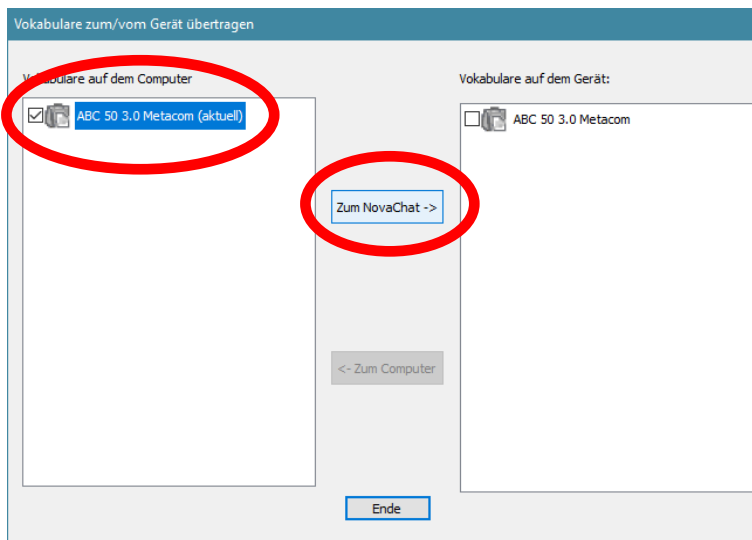

Klicken Sie anschließend auf „Zum NovaChat ->“. Das Vokabular wird auf das Gerät kopiert.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Talker!**




# ABC 60

## Version mit oder ohne Metacom-Symbole

Das Wortschatzprogramm „ABC 60“ gibt es in 2 Versionen, eines mit und eines ohne Metacom-Symbole. Die Version ohne Metacom-Symbole verwendet lediglich Textlabel zur Kennzeichnung von Funktionstasten und Aussagen, die Version mit Metacom nutzt zusätzlich Metacom-Symbole.



ABC 60 ohne Metacom-Symbole

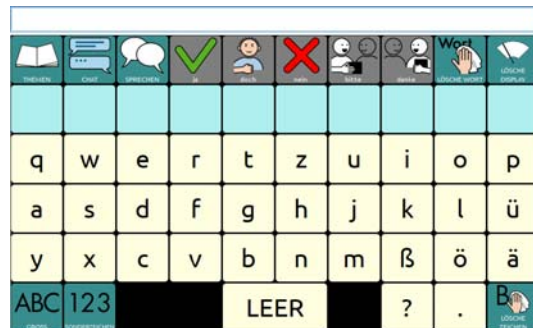


ABC 60 mit Metacom-Symbolen

Die im Folgenden gemachten Angaben gelten für beide Versionen, auch wenn die Grafiken die Version ABC 60 mit Metacom-Symbolen zeigen.

## Die SCHRIFT-SEITE

Schalten Sie den Talker mit der Ein/Aus-Taste ein.

Nach dem Startvorgang erscheint folgendes Bild im Display:

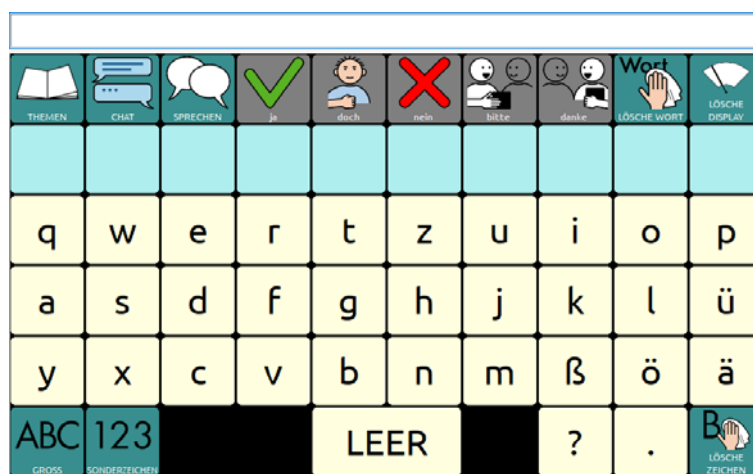

Die oberste Zeile, die im Augenblick noch leer ist, heißt Textfenster. Hier erscheinen im Folgenden die Buchstaben und Wörter, die Sie schreiben.

Die Anordnung der Buchstaben auf der SCHRIFT-SEITE orientiert sich an der QWERTZ-Reihenfolge einer PC-Tastatur.

In den hellblauen Feldern erscheinen die Vorschläge der Wortvorhersage, sobald Sie zu schreiben beginnen. Tippen Sie auf ein Feld, um einen Vorschlag zu übernehmen.

Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen.






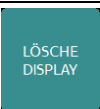

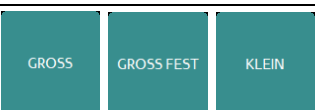

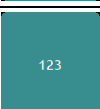

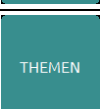

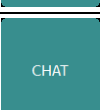

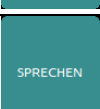
Tippen Sie z. B. nacheinander die einzelnen Buchstaben h a l l o und am Ende die Taste „LEER“ unten in der Mitte.

(Stören Sie sich bitte nicht daran, falls der Talker die einzelnen Buchstaben nicht laut ausspricht. Das liegt daran, dass die Sprache ausgeschaltet ist. Wie man die Sprachausgabe ein- und ausschalten kann, erfahren Sie bei den Erläuterungen zur THEMEN-SEITE weiter hinten in dieser Einführung.)

Im Textfenster in der oberen Zeile erscheint das Wort „hallo“. Tippen Sie auf das angezeigte Wort „hallo“, und der Talker spricht das ganze Wort.

## Grüne Funktionstasten

Auf der SCHRIFT-SEITE befinden sich auch einige grün unterlegte Tasten mit Funktionen, die beim Schreiben wichtig sind:

Version mit META-COM-Symbolen	Version ohne META-COM-Symbole	
		Zeichen löschen
		Wort löschen
		Inhalt des Textfensters löschen
		Wechsel zwischen Groß-, permanent Groß- und Kleinschreibung
		Wechsel zur Seite SONDERZEICHEN
		Wechsel zur THEMEN-SEITE
		Wechsel zur CHAT-SEITE
		Spricht den Inhalt des Textfensters

## Die Seite SONDERZEICHEN

123  
SONDERZEICHEN

Drücken Sie auf der SCHRIFT-SEITE die Taste

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen nun die Seite SONDERZEICHEN:

THEMEN	SPRACHE EIN AUS	SPRECHEN	ja	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
				,	-	!	:	%	&
	1	2	3	;	-	@	/	\	
	4	5	6	€	"	'	(	)	#
	7	8	9	+	*	=	[	]	
ABC ABC	Euro	0	Cent	LEER		?	.		B LÖSCHE ZEICHEN

Die Seite SONDERZEICHEN bleibt geöffnet, bis Sie sie manuell wieder schließen:



Drücken Sie die Taste , um wieder auf die START-SEITE zu gelangen.



Drücken Sie die Taste , um auf die THEMEN-SEITE zu gelangen.


## Wortvorhersage

Der Talker verfügt über eine leistungsfähige Wortvorhersage, bestehend aus einer Wortvervollständigung des gerade eingegebenen Wortes und einer Vorhersage des nächsten Wortes.

Beim Schreiben erscheinen auf den hellblauen Tasten Wortvorschläge, die Sie durch direktes Antippen auswählen können, um den Schreibprozess abzukürzen.



Hinweis: Über „Einstellungen – Schreibhilfen – Wortvorhersage – Wort hinzufügen“ können Sie Wörter zum Wortvorhersagelexikon hinzufügen.

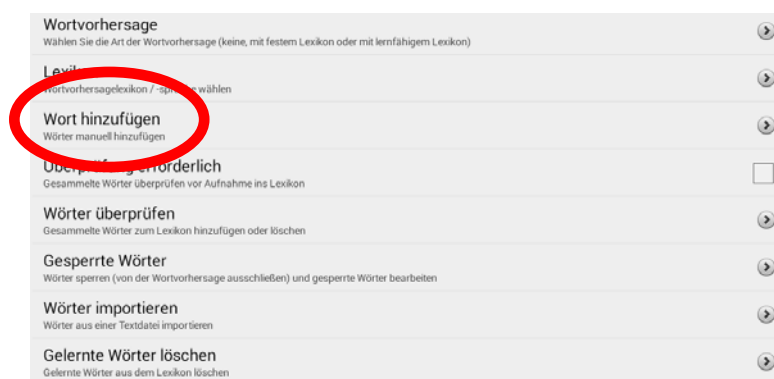


## Die THEMEN-SEITEN

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Schrifteingabe bietet der Talker auch die Funktion, Wörter und Sätze, die man häufig benötigt, als Ganzes abzuspeichern, damit man sie nicht jedes Mal wieder schreiben muss.



Drücken Sie die Taste Themen  auf der SCHRIFT-SEITE.

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen die THEMEN-SEITE:

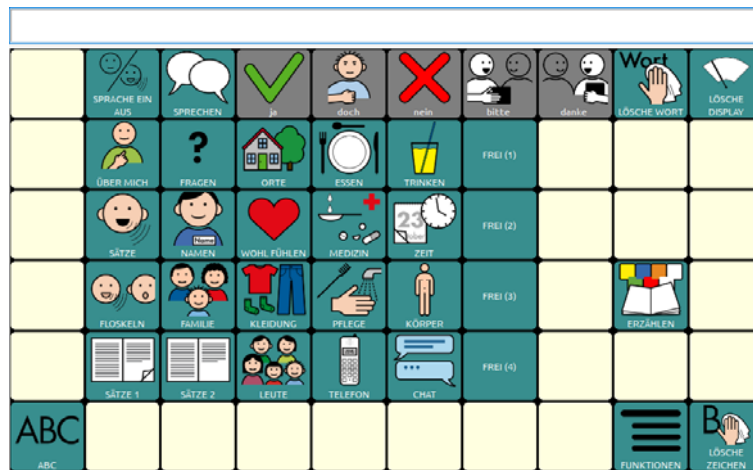

Die grün hinterlegten Tasten öffnen Seiten zu verschiedenen Themenbereichen, die Sie individuell verändern können (weiter hinten in dieser Einführung wird die entsprechende Vorgehensweise erläutert). Auf den Tasten steht jeweils der Name der damit zu öffnenden Seite.

Die grau hinterlegten Aussagen in der oberen Zeile „ja“, „nein“, „doch“, „bitte“ und „danke“ in der rechten Spalte sind auf allen Themenseiten zu finden. **Bei allen grau hinterlegten Tasten gilt: Die Tasten dienen dem Kommentieren, der jeweilige Inhalt wird nicht im Textfenster angezeigt!**




Wechsel zurück zur SCHRIFT-SEITE




Wechsel zurück zur THEMEN-SEITE



Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters.

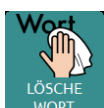

Löscht das letzte Wort im Textfenster.

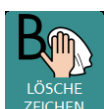

Löscht den zuletzt eingegebenen Buchstaben im Textfenster.

Im Folgenden sind alle Themenseiten abgebildet.

## Die Seite ÜBER MICH



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	Ich heiße	Ich wohne in	Ich bin Jahre alt	Meine Telefonnummer lautet	Meine e-mail Adresse lautet			
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FRAGEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	was ist das?	Was gibt es Neues?						
	Wann kommst du wieder?	Was hast du gestern gemacht?	Wie geht es dir?					
	Wie viel kostet das?							
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite ORTE




THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	Apothek	Bäcker	Bahnhof	Bank	Geschäft	Kino	Kiosk	
	Kirche	Markt	Metzgerei	Park	Post	Supermarkt	Tankstelle	
ABC								B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite ESSEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Ich habe Hunger.	Wann gibt es Essen?	Was gibt es zu Essen?	Ich möchte etwas anderes.	Das reicht.	Mir ist schlecht!	Das darf ich nicht essen!		B
ABC									LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite TRINKEN

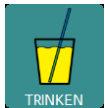

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Ich habe Durst.	Ich brauche Hilfe!	Was gibt es zu trinken?	Ich möchte etwas anderes.	Das reicht.	Mir ist schlecht!	Das darf ich nicht trinken!		B
ABC									LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite SÄTZE



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B
ABC									LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite NAMEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Wie heißt du?	Wie heißen Sie?							B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite WOHLFÜHLEN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Mir ist langweilig.	So ist es gut!	So ist es nicht richtig.						B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite MEDIZIN



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Ich brauche ein neues Rezept.	Ich brauche Hilfe!	Ich möchte einen Arzt sprechen.	Das habe ich verstanden.	Das habe ich nicht verstanden.	Wann sehen wir uns wieder?			B LÖSCHE ZEICHEN



## Die Seite ZEIT




Die Taste



sagt  
Datum und  
Uhrzeit an.

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Mo Montag	Di Dienstag	Mi Mittwoch	Do Donnerstag	Fr Freitag	Sa Samstag	So Sonntag	Minute	Stunde
Zeit/Datum anzeigen	1	2	3	4	5	6	Uhr	Tag	
	7	8	9	10	11	12	Woche	Wochenende	
	früh	spät	gestern	heute	morgen	vor	nach	Monat	Jahr
ABC				LEER					B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FLOSKELN

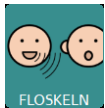

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Hallo	Guten Tag	Tschüss	Auf Wiedersehen	Moin	Grüß Gott			
	Glückwunsch	Alles Gute	Entschuldigung	Frohe Weihnachten					
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FAMILIE



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Enkel	Sohn	Vater	Opa	Bruder	Schwieger- sohn			
	Enkelin	Tochter	Mutter	Oma	Schwester	Schwieger- tochter			
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite KLEIDUNG




THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Wie sehe ich aus?	Wie ist das Wetter heute?	Ich möchte mich im Spiegel sehen.						B
ABC	Wie sehe ich aus?	Wie ist das Wetter heute?	Ich möchte mich im Spiegel sehen.						LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite PFLEGE



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Zähne putzen	waschen	duschen	baden					
ABC	Türe zu, bitte.	Ich brauche Hilfe!	Ich muss auf die Toilette.						B
ABC	Türe zu, bitte.	Ich brauche Hilfe!	Ich muss auf die Toilette.						LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite KÖRPER

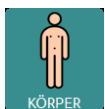

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC	Ich möchte mich hinlegen.	Ich brauche Hilfe!	Es juckt mich.	Ich habe Schmerzen.	Mir ist schlecht!				B
ABC	Ich möchte mich hinlegen.	Ich brauche Hilfe!	Es juckt mich.	Ich habe Schmerzen.	Mir ist schlecht!				LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite SÄTZE 1



THEMEN	TEXT SPEICHERN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite SÄTZE 2



THEMEN	TEXT SPEICHERN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite LEUTE



THEMEN		SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE DISPLAY
	Besucher	Nachbar							
	Frau	Mann							
	Mädchen	Junge	Kind						
	Krankenschwester	Pfleger							
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite TELEFON




THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Hallo!	Hier spricht	Auf Wiederhören!						
	Bitte stellen Sie mir eine Ja-Nein Frage.	Bitte rufen Sie später nochmal an.	Bitte warten sie ich beantworte die Frage mit meinem Sprachcomputer	Bitte wiederholen Sie das.					
	Das habe ich verstanden	Das habe ich nicht verstanden.							
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite CHAT



THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	Stelle mir bitte eine Ja-Nein Frage!	Ich bin gerade dabei, zu antworten							
	Ich verstehe alles, was Sie zu mir sagen.	Wiederholen Sie bitte die Frage.							
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite ERZÄHLEN

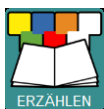

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUFNEHMEN									
ABC									B LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FREI 1

FREI (1)

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B
ABC									LÖSCHE ZEICHEN

## Die Seite FREI 2

FREI (2)

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B
ABC									LÖSCHE ZEICHEN


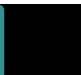










## Die Seite FREI 3

FREI (3)

THEMEN	SPRECHEN	ja	doch	nein	bitte	danke	Wort	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
ABC									B
ABC									LÖSCHE ZEICHEN

# Die Seite FREI 4

FREI (4)

 THEMEN		 SPRECHEN	 ja	 doch	 nein	 bitte	 danke	 LÖSCHE WORT	 LÖSCHE DISPLAY
 ABC									 LÖSCHE ZEICHEN



## Eigene Änderungen einfügen


Bevor wir zu den Sonderfunktionen in der unteren Zeile der THEMEN-SEITE kommen, erfahren Sie, wie Sie eigene Änderungen in das Programm „ABC 60“ einfügen können.


## Seiten ändern im Editiermodus

Das Programm „ABC 60“ ist aus einzelnen Seiten zusammengesetzt. Um Änderungen auf einer Seite vorzunehmen, müssen Sie die jeweilige Seite zunächst öffnen (anzeigen lassen) und dann den Editiermodus aktivieren.

Im Folgenden wird dies Schritt für Schritt am Beispiel der Seite „ÜBER MICH“ erläutert.

Öffnen Sie die Seite „ÜBER MICH“, indem Sie  und  auswählen

Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät.  
Aktivieren Sie den Editiermodus.

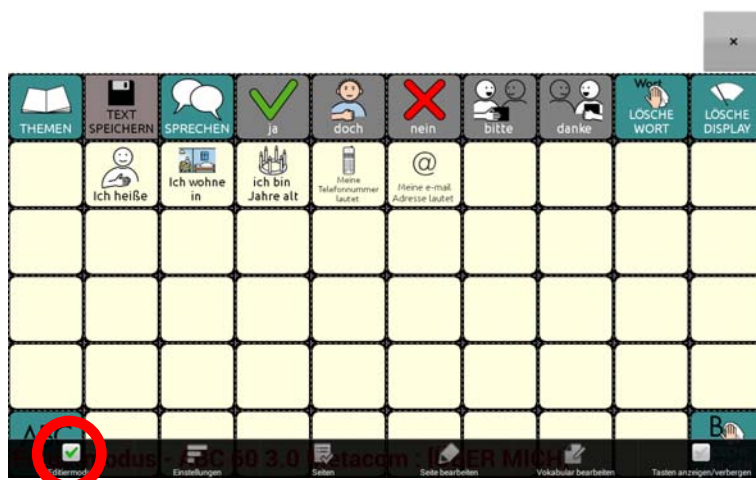


Unten steht: Editiermodus – ABC 60 3.0 Metacom : [ÜBER MICH]


Ändern Sie die für Ihren Namen, Adresse, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse vorbereiteten Tasten.

Tippen und halten Sie die Taste „Ich heiße“ gedrückt, bis im Display das Menüfenster erscheint.


Wählen Sie „Taste bearbeiten“.

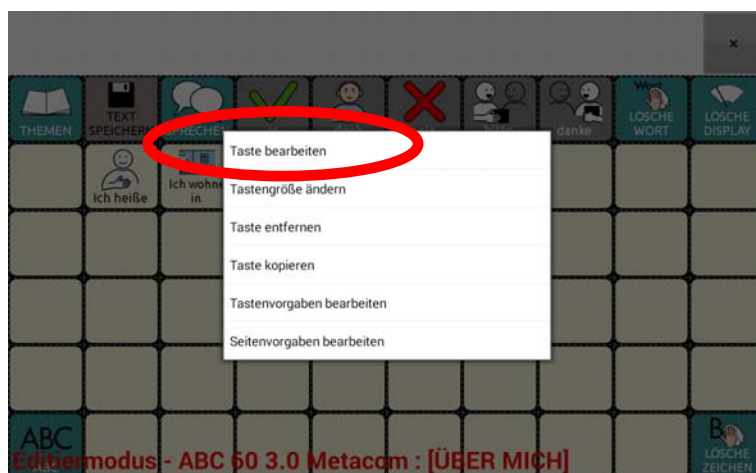


Die aktuelle Belegung der Taste wird angezeigt.

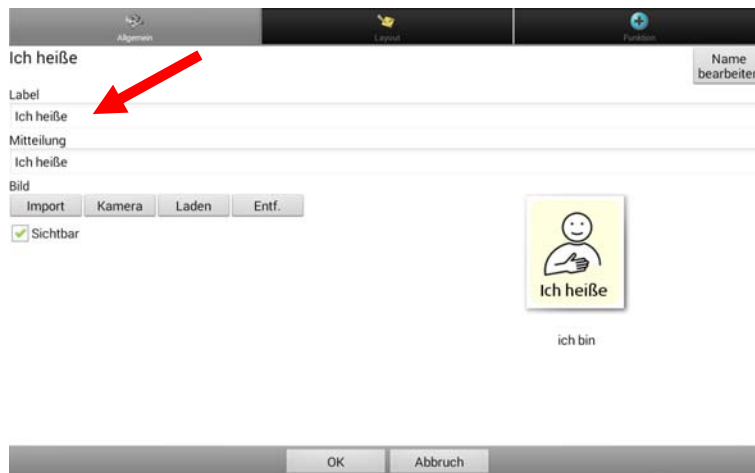


Tippen Sie im Feld „Label“ hinter das Wort „heiße“. Mit Hilfe der Buchstabentastatur, die dann erscheint, können Sie Ihren Namen ergänzen. Die Eingabe wird automatisch in das Feld „Mitteilung“ übernommen.

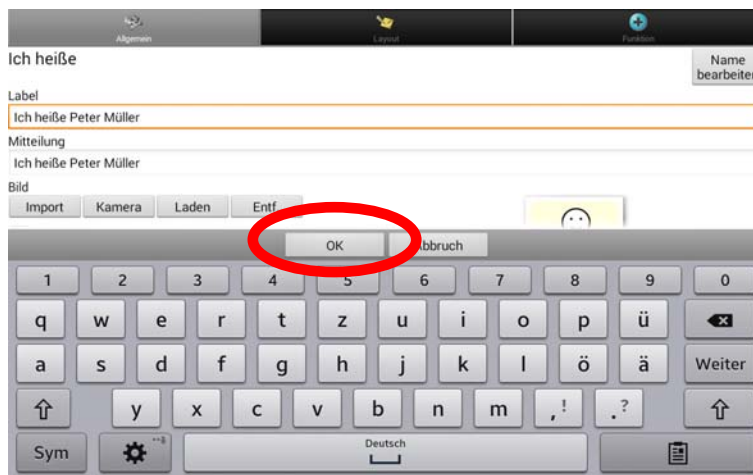

Mit den beiden Tasten  unten links und rechts können Sie die Groß- und Kleinschreibung verändern.

Beenden Sie die Eingabe mit .

Die Anzeige im Display springt zurück und Sie sehen den ergänzten Text:

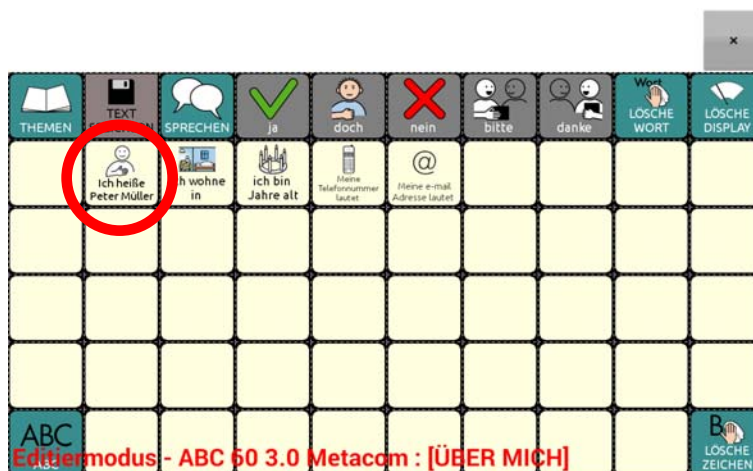


Um auch die Angaben auf den Tasten „Ich wohne in“, „Ich bin Jahre alt“, „Meine Telefonnummer lautet“ und „Meine e-mail-Adresse lautet“ zu ergänzen, tippen und halten Sie die jeweilige Taste und verfahren Sie wie im vorangegangenen Beispiel.




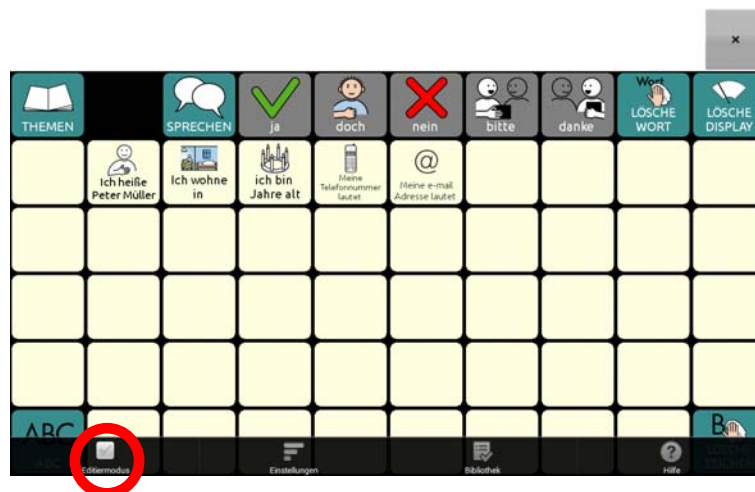
Felder, auf denen noch nichts gespeichert ist, können Sie selbst belegen, indem Sie einen eigenen Text eingeben. Tippen und halten Sie das Feld und wählen Sie die Option „Taste bearbeiten“.

Wenn der Text zu lang ist, um auf der Taste angezeigt zu werden, tippen Sie auf das Feld „Label“ und geben dort nur ein Stichwort als Merkhilfe ein.

Wenn Sie auf der Taste ein Bild hinzufügen möchten, gelangen Sie mit der Funktion „Bild – Laden“ in das Bildarchiv des Talkers. Sie können mittels „Bild – Import“ auch Bilder importieren oder mittels „Bild – Kamera“ Fotos mit der in das Gerät eingebauten Kamera anfertigen.

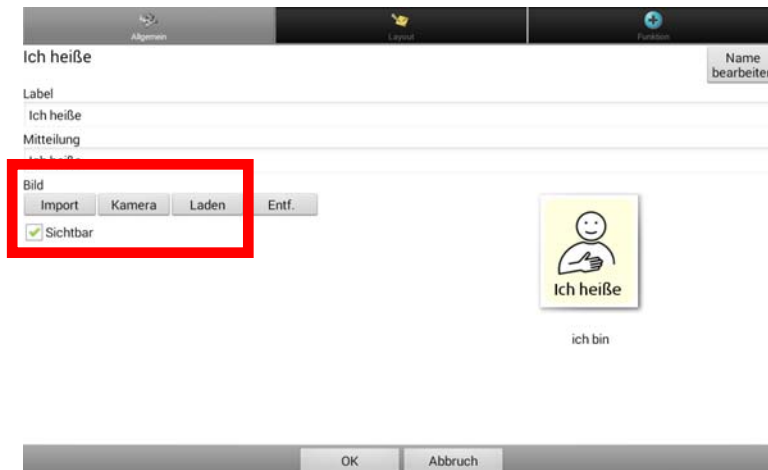

Nachdem Sie Ihre persönlichen Änderungen eingefügt haben, drücken Sie „OK“ und beenden Sie den Editiermodus. Drücken Sie dazu erneut die Taste „Menü“  auf dem Gerät und entfernen Sie den Haken bei „Editiermodus“.



Ausführliche Informationen zum Thema „Seiten gestalten“ entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“ oder der Bedienungsanleitung im Kapitel „Tasten bearbeiten“.

## Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „TEXT SPEICHERN“





Alle Themenseiten enthalten links oben die Taste „TEXT SPEICHERN“, mit der Sie den aktuell im Textfenster befindlichen Text auf einer Taste der aktuellen Seite speichern können.

Haben Sie z. B. eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, weil Sie sie öfter verwenden wollen, können Sie sie mit Hilfe der Taste „TEXT SPEICHERN“ bequem auf einer Seite Ihrer Wahl dauerhaft speichern.


Bis auf die Seiten „SÄTZE 1“ und „SÄTZE 2“ ist die Taste „TEXT SPEICHERN“ zunächst ausgeblendet.


### Taste „TEXT SPEICHERN“ sichtbar machen

Wählen Sie die Seite aus, auf der Sie die Taste „TEXT SPEICHERN“ nutzen wollen, z. B.

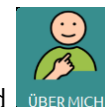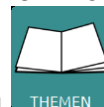


die Seite „ÜBER MICH“. Drücken Sie dazu die Tasten

Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät. Aktivieren Sie den Editiermodus.

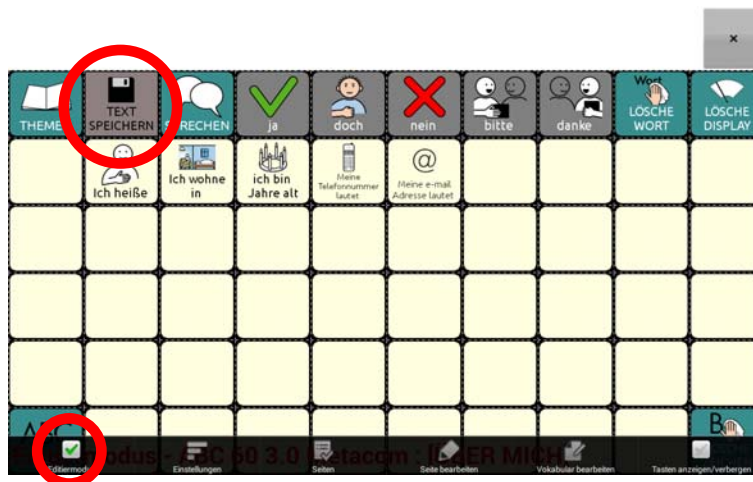

Tippen und halten Sie die Taste


Wählen Sie „Taste bearbeiten“.

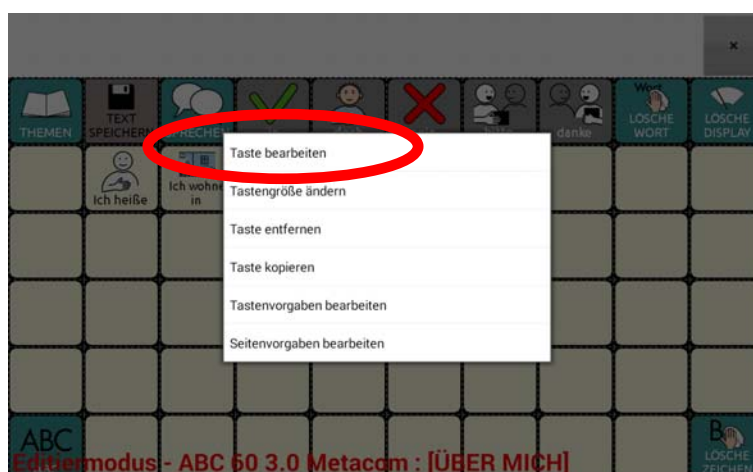


Setzen Sie den Haken bei „Sichtbar“. Wählen Sie anschließend „OK“.




Die Seite „ÜBER MICH“ wird wieder angezeigt. Das Feld „TEXT SPEICHERN“ ist nun nicht mehr ausgegraut.

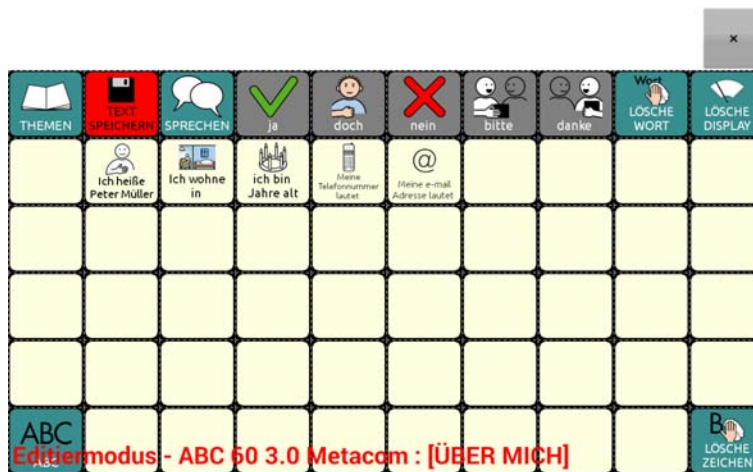

Beenden Sie den Editiermodus, indem Sie erneut die Taste „Menü“  auf dem Gerät drücken und den Haken bei „Editiermodus“ entfernen.


Die Taste „TEXT SPEICHERN“ ist nun auf der Seite „ÜBER MICH“ sichtbar und kann benutzt werden:

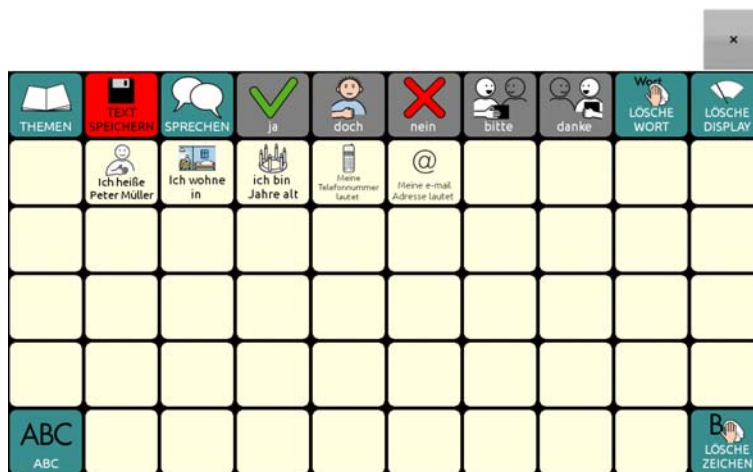


Verfahren Sie entsprechend mit allen Seiten, auf denen Sie die Taste „TEXT SPEICHERN“ nutzen wollen.

## Taste „TEXT SPEICHERN“ benutzen


Formulieren Sie eine Aussage. Öffnen Sie anschließend über die Seite „THEMEN“ die Themenseite, auf der Sie die Aussage dauerhaft speichern möchten (z. B. die Seite „ÜBER MICH“). Tippen Sie dort auf die Taste „TEXT SPEICHERN“.

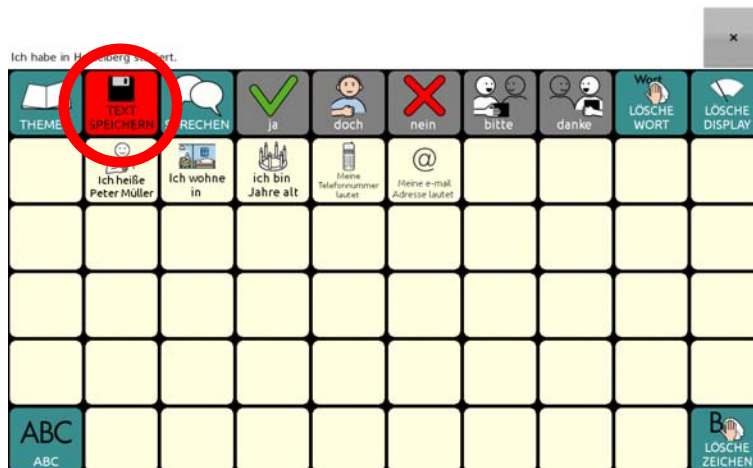

Beantworten Sie die Abfrage „Der Text im Textfenster wird auf der nächsten Taste gespeichert. Fortfahren?“ mit „Ja“.

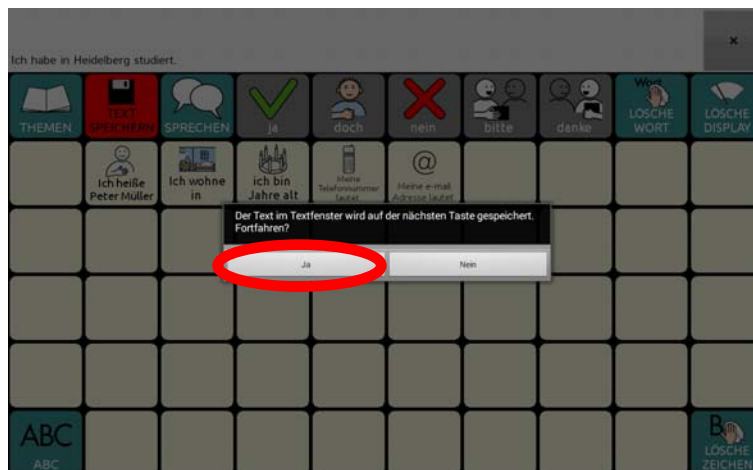

Wählen Sie die Taste aus, auf der die Aussage gespeichert werden soll. Achtung: Wenn Sie eine bereits belegte Taste auswählen, wird der Inhalt der Taste überschrieben!

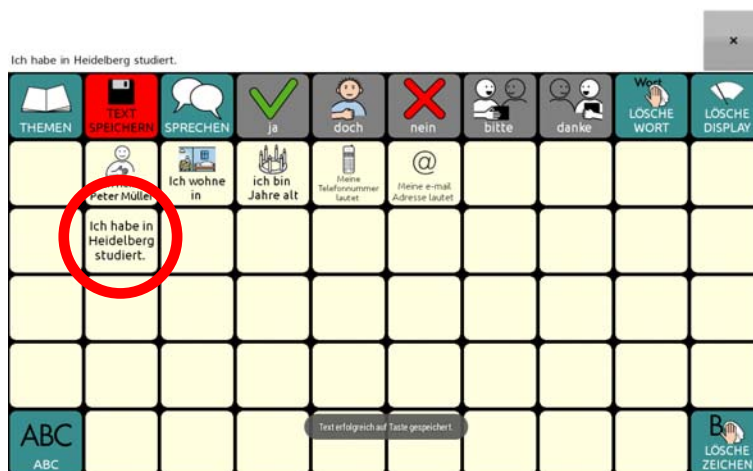

Die Aussage ist auf der Taste gespeichert.


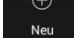
## Aussprache korrigieren

Besonders bei Namen von Personen und Orten kann es vorkommen, dass der Talker den Namen mit der synthetischen Stimme nicht so ausspricht, wie Sie es gerne hätten. In diesem Fall sollten Sie das betreffende Wort zum Aussprache-Lexikon hinzufügen, damit der Talker lernt, den Begriff richtig auszusprechen.

Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät.

Wählen Sie „Einstellungen – Sprachausgabe – Sprachsynthese – Aussprache“  
Das Aussprachelexikon wird angezeigt.



Drücken Sie die Taste „Menü“  auf dem Gerät und wählen Sie „Neu“ .  
Geben Sie in das Feld „Wort“ das Wort ein, dessen Aussprache Sie korrigieren möchten (z. B. „Marcel“).

Geben Sie in das Feld „Aussprache“ das Wort in einer phonetischen Schreibweise ein, die zur einer korrekten Aussprache des Worts führt (z. B. „mar sell“).

Tippen Sie auf „Anhören“, um die Aussprache der phonetischen Schreibweise zu testen.




Tippen Sie auf „OK“, wenn Sie mit der Aussprache zufrieden sind. Das Wort wird im Aussprachelexikon gespeichert und ab sofort korrekt gesprochen.

## Besondere Funktionen des Talkers

Auf den Themenseiten ERZÄHLEN und FUNKTIONEN haben Sie Zugang zu besonderen Talkerfunktionen, die im Folgenden vorgestellt werden.

### Die Seite ERZÄHLEN

Auf der Seite ERZÄHLEN können Sie aufgenommene Sprachmitteilungen wiedergeben bzw. Sprachmitteilung aufnehmen.

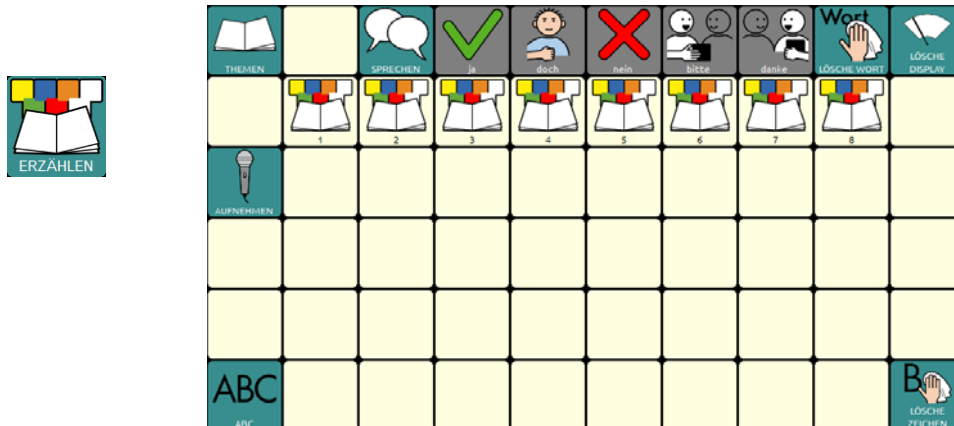


Zur Wiedergabe einer Sprachmitteilung drücken Sie eine der vorbereiteten Tasten 1-8. Die zugehörige Sprachmitteilung wird wiedergegeben.

Zur Neuaufnahme einer Sprachmitteilung drücken Sie die Taste „AUFNEH-




MEN“. Die Seite zum Neuaufnehmen der Sprachmitteilungen wird angezeigt.

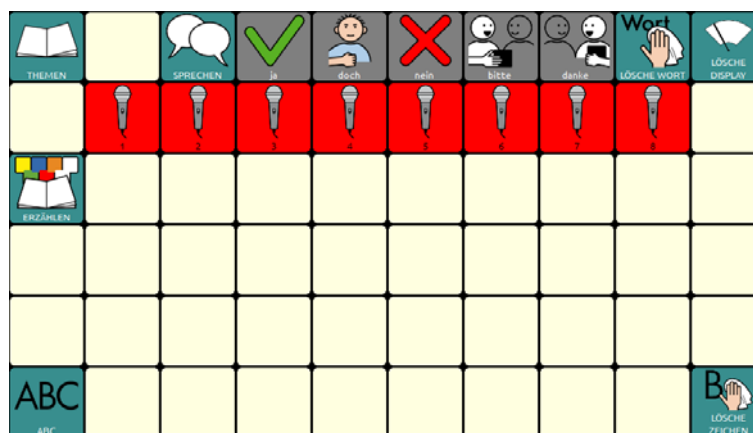

Zur Neuaufnahmen einer Sprachmitteilung drücken Sie die zugehörige Aufnahme-Taste und folgen Sie den Schritten zum Anfertigen einer Sprachaufnahme.


Lesen Sie dazu bitte auch das Kapitel „Sound aufnehmen“ im Chat-Software-Manual.

## Die Seite FUNKTIONEN

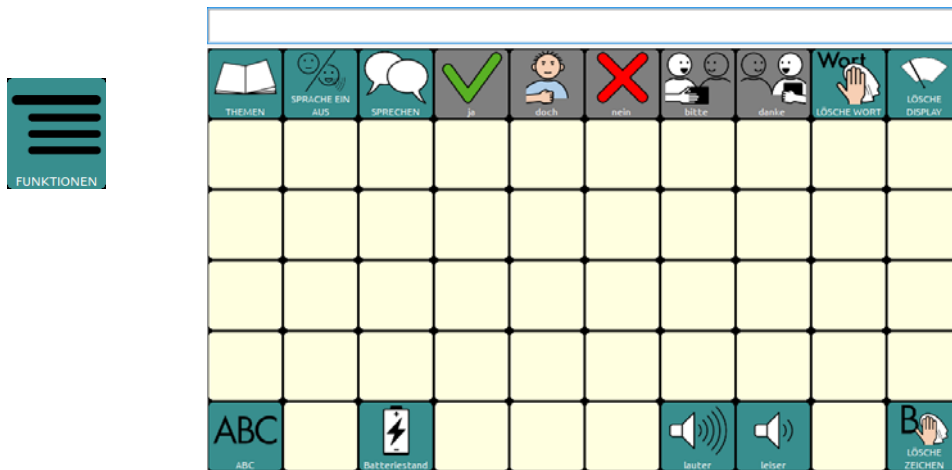

Diese Seite ermöglicht Zugriff auf wichtige Talker-Funktionen.

### Sprache an/aus

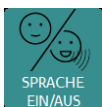

Die Taste **SPRACHE EIN/AUS** schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein.

### Batteriestand



Die Taste **Batteriestand** gibt Informationen zur Kapazität und zum Ladezustand der Geräte- und Verstärkerbatterie aus.

### Lauter



Die Taste **lauter** erhöht die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

### Leiser




Die Taste **leiser** reduziert die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

## Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen


Sichern Sie regelmäßig das „ABC 60“ -Programm mit Ihren persönlichen Änderungen, damit Sie im Falle eines Datenverlustes (auch der Talker ist ein Computer!) eine Sicherungskopie Ihres Vokabulars in das Gerät zurück laden können.

### Vokabular vom Gerät in den Chat-Editor kopieren


Schließen Sie den Talker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an. Starten Sie auf dem PC den Chat-Editor. In der Menüzeile des Chat-Editors sollte „Gerät ist verbunden“ erscheinen.

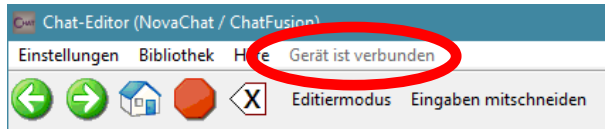

Wählen Sie im Chat-Editor „Bibliothek – Übertragen – Vokabular zum/vom Gerät“.

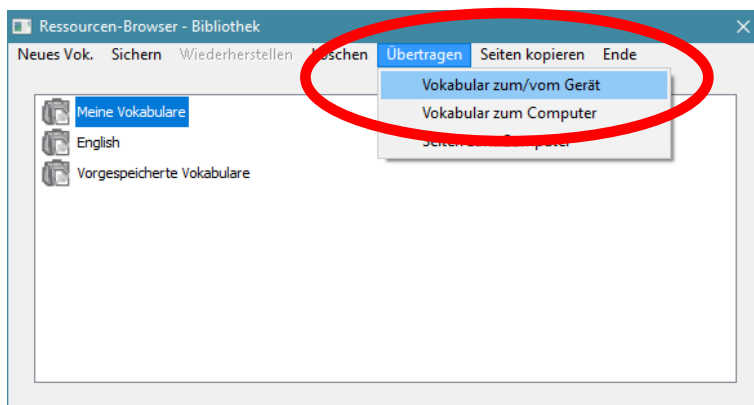

Wählen Sie im rechten Fenster („Vokabulare auf dem Gerät“) das Vokabular, das in den Chat-Editor kopiert werden soll:

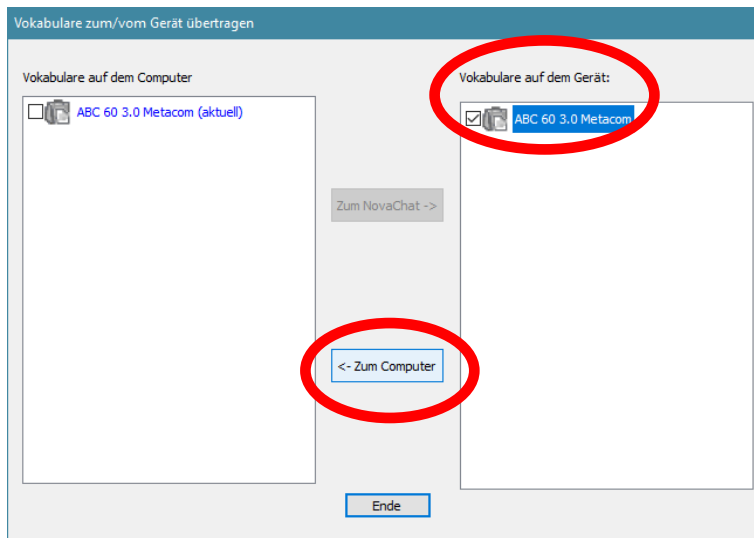


Klicken Sie anschließend auf „<- Zum Computer“. Das Vokabular wird auf den Computer kopiert.




## Vokabular vom Chat-Editor auf das Gerät kopieren


Schließen Sie den Talker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an.  
Starten Sie auf dem PC den Chat-Editor. In der Menüzeile des Chat-Editors sollte „Gerät ist verbunden“ erscheinen.

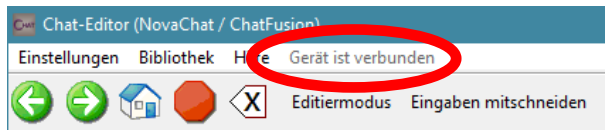

Wählen Sie im Chat-Editor „Bibliothek – Übertragen – Vokabular zum/vom Gerät“

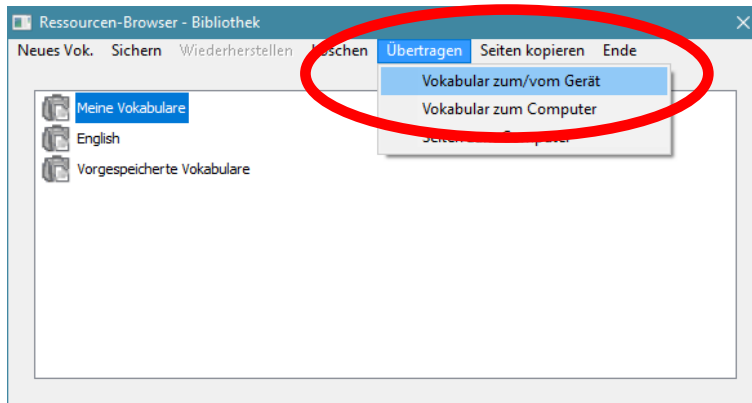

Wählen Sie im linken Fenster („Vokabulare auf dem Computer“) das Vokabular, das auf das Gerät kopiert werden soll:

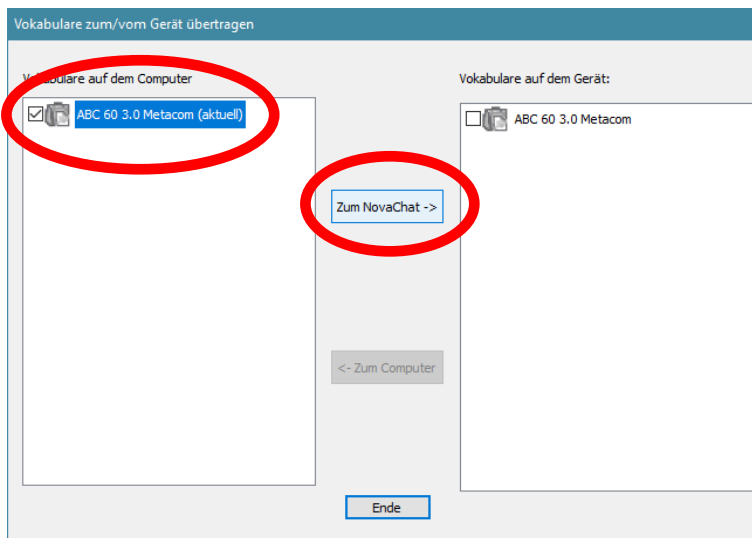

Klicken Sie anschließend auf „Zum NovaChat ->“. Das Vokabular wird auf das Gerät kopiert.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Talker!**