



Gebrauchsanweisung

Accent 1400

Hardware

100000v5



prentke romich deutschland
weil jede:r was zu sagen hat!

Hinweise

Accent 1400-30 Gebrauchsanweisung © Prentke Romich GmbH 2024. Kommerzielle Nutzung und Weiterveräußerung verboten.

AAC Coaching Corner™, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey™, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS™, ChatWrap™, CoreScanner™, Deutsche Wortstrategie™, Dialogue™, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iSharePRC®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look™, Minspeak®, NovaChat™, NuEye®, NuPoint™, NuVoice®, PASS™, PRIO™, Quasselkiste™, Realize Language™, Semantic Compaction™, Timocco-on-Accent™, TouchChat™, UNIDAD®, Unity™, Via®, VersaChat™, VersaSpeaker™, VersaWrap™ und VocabPC™ sind Warenzeichen von PRC-Saltillo.

AirDrop®, App Store®, Apple®, Apple Books®, FaceTime®, Guided Access®, iCloud®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPadOS®, iPad Pro®, iPhone®, iPod®, iTunes®, Lightning®, Mac®, Macintosh®, Safari®, Siri®, TouchID® und TrueDepth® sind Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und in anderen Ländern.

AcapelaGroup® und my-own-voice sind Warenzeichen der AcapelaGroup. AcapelaGroup, © 2020-2024. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung. Die Acapela Text-to-Speech-Technologie und die in der Software verwendeten synthetischen Stimmen dürfen nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von PRC-Saltillo in Lizenz verwendet.

CAVIWIPES ist ein Warenzeichen der Metrex Research LLC.

Dropbox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dropbox, Inc.

Google™, Google Drive™, Google Play™, Android™ und YouTube™ sind Warenzeichen der Google Inc.

iOS® ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und in anderen Ländern, das unter Lizenz verwendet wird.

METACOM © Annette Kitzinger. Nutzung mit Genehmigung.

Microsoft® und Windows® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

PCS® ist ein Warenzeichen der Tobii Dynavox LLC. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung.

The Voice Keeper und Almagu Voices sind Eigentum von Almagu.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuchs sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung dieses Geräts oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung dieses Geräts oder der in dieser Anleitung gemachten Angaben ergeben.

Hersteller	Der Bevollmächtigte in der EU	Importeur
		
PRC-Saltillo 1022 Heyl Road Wooster, OH 44691 U.S.A. Tel. +1 330 262-1984 Fax +1 330 262-4829 E-Mail info@prentrom.com Web prentrom.com	Prentke Romich GmbH Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de	Prentke Romich GmbH Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de

Dokumentenversion

100000v5 – 21.08.2024

Bezieht sich auf Modell Accent 1400-30 (Seriennummern 10000AC14 und höher) mit Software „NuVoice“ oder Software „Empower“.

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise	2
Sicherheitshinweise	4
DEN ACCENT 1400 KENNENLERNEN	11
Die Oberseite des Accent 1400	12
Die Unterseite des Accent 1400	13
Die linke und die rechte Seite des Accent 1400	14
Das Gerät einschalten	15
Den Touchscreen benutzen	15
Den Akku laden	16
Aufstellfuß	18
Aufstellfuß demontieren	19
Tragegriff demontieren	20
Portabdeckung montieren	21
IR-Reflektor montieren	22
Rahmen demontieren	23
Rahmen montieren	25
Abdeckgitter montieren	27
Abdeckgitter hochklappen	28
Abdeckgitter demontieren	29
Fingerführungshilfe montieren	30
Fingerführungshilfe demontieren	31
Tragegurt befestigen	32
Aufnahmeplatte für Halterungssystem	33
EyeTracker montieren	34
HDMI-Ausgang verwenden	36
Computersteuerung	39
Drahtlose Internetverbindung einrichten	40
Windows-Energiemanagement	42
Den Accent 1400 benutzen	43
Transportschutzmodus aktivieren bei längerer Nichtbenutzung des Geräts (NuVoice)	44
Gerät benutzen aus dem Transportschutzmodus	44
Reinigung & Desinfektion	45
Hygienische Wiederaufarbeitung des Geräts und/oder des Zubehörs	47
Hinweise zum Wiedereinsatz	48
FEHLERSUCHE UND PROBLEMBEHEBUNG	49
Akku-Problembhebung	50
Pannenhilfe	51
Windows-Fehlersuche	52
ANHANG	55
Konformitätsinformationen	56
Endkunden-Lizenzvereinbarung	62
INDEX	63

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Netzkabel, Netzteile und andere Komponenten können Sicherheitsrisiken erzeugen, die vor allem bei nicht sachgerechter Verwendung dieser Komponenten zu Personen- oder Sachschäden führen können. Um diese Risiken zu verringern, folgen Sie den in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen, beachten Sie alle Warnungen, die sich auf dem Produkt und in den Bedienungsanweisungen befinden, und lesen Sie die Informationen in dieser Anleitung sorgfältig. Sie können sich selbst vor Gefahren schützen und eine sichere Umgebung für die Nutzung dieses Geräts schaffen, indem Sie die Informationen in dieser Anleitung genau einhalten.

Wichtige Informationen zur Verwendung Ihrer Kommunikationshilfe

Beachten Sie stets die nachfolgend aufgeführten Hinweise. Andernfalls kann es zu Hautreizungen oder Verletzungen kommen, oder am Gerät können Fehler auftreten.

Schützen Sie sich vor der vom Gerät erzeugten Wärme.

Wenn dieses Gerät eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird, können die Unterseite und andere Komponenten der Kommunikationshilfe Wärme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand des Akkus.

Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen führen.

- Vermeiden Sie es, die Komponenten der Kommunikationshilfe, die sich erwärmen, über einen längeren Zeitraum mit den Händen, den Oberschenkeln oder einem anderen Körperteil zu berühren.

Schützen Sie sich vor der vom Netzteil erzeugten Wärme

Das Netzteil erwärmt sich, wenn es an die Kommunikationshilfe angeschlossen und mit einer Netzsteckdose verbunden ist. Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautverbrennungen führen.

- Vermeiden Sie es, das Netzteil über einen längeren Zeitraum zu berühren, wenn Sie es verwenden.
- Verwenden Sie ein Netzteil niemals, um z. B. Ihre Hände aufzuwärmen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Netzteil.

Schützen Sie dieses Gerät vor Feuchtigkeit.

Bewahren Sie in der Nähe dieses Geräts keine Flüssigkeiten auf, um das Verschütten von Flüssigkeiten auf dieses Gerät und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Schützen Sie die Kabel vor Beschädigungen

Behandeln Sie Kabel immer sorgfältig; beschädigen oder knicken Sie sie nicht. Verlegen Sie Leitungen und Kabel von Netzteilen, externen Eingabegeräten und anderen elektronischen Geräten so, dass sie nicht von diesem Gerät oder von anderen Objekten eingeklemmt werden. Benutzer nicht über die Kabel stolpern oder darauf treten können und der Betrieb der Kommunikationshilfe nicht auf andere Weise behindert wird.

Gehen Sie vorsichtig mit diesem Gerät um

Vermeiden Sie Erschütterungen der Kommunikationshilfe wie z. B. Stöße, Fallenlassen, Vibrationen und Verdrehungen, und vermeiden Sie Kratzer an den Einheiten. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.

Gehen Sie beim Transport der Kommunikationshilfe vorsichtig vor

- Wählen Sie für den Transport einen qualitativ hochwertigen Transportbehälter wie die optional erhältliche Transporttasche, durch den Erschütterungen aufgefangen werden und das Gerät geschützt ist.
- Verstauen Sie das Gerät nicht in einem vollen Koffer oder in einer vollen Tasche.
- Bevor Sie das Gerät in einen Transportbehälter legen, schalten Sie es aus, versetzen Sie es in den Energiesparmodus oder aktivieren Sie den Transportschutzmodus.
- Legen Sie das Gerät nicht in den Transportbehälter, solange es noch eingeschaltet ist.








Situationen, in denen sofort reagiert werden muss

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer der folgenden Umstände eintritt, oder wenn Sie irgendwelche Sicherheitsbedenken bezüglich Ihres Produkts haben, beenden Sie die Verwendung des Produkts, und unterbrechen Sie die Verbindung zur Stromquelle, bis Sie mit dem technischen Support Kontakt aufnehmen können und Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise erhalten.

- Netzkabel, Netzstecker, Netzteile, Verlängerungskabel oder Überspannungsschutzeinrichtungen sind rissig, brüchig oder beschädigt.
- Anzeichen von Überhitzung wie Rauch, Funken oder Feuer treten auf.
- Geräusche wie Knacken, Rauschen, Knallen oder strenge Gerüche gehen von dem Produkt aus.
- Anzeichen dafür treten auf, dass eine Flüssigkeit auf die Kommunikationshilfe, das Netzkabel oder das Netzteil verschüttet wurde oder ein Gegenstand auf eines dieser Teile gefallen ist.
- Die Kommunikationshilfe, das Netzkabel oder das Netzteil sind mit Wasser in Berührung gekommen.
- Das Produkt wurde fallen gelassen oder auf irgendeine andere Weise beschädigt.
- Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Sie die Bedienungsanweisungen befolgen.

Erläuterung der verwendeten Warnsymbole

In diesem Handbuch werden sieben (7) Warnsymbole zur Anzeige unterschiedlicher Warnstufen verwendet:

	Das Symbol „Hinweis“ soll den Benutzer auf wichtige Hinweise oder Punkte, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, aufmerksam machen.
	Das Symbol „Tipps“ weist auf Punkte hin, an die der Benutzer möglicherweise nicht gedacht hat.
	Das Symbol „Achtung“ wird verwendet, um auf etwas hinzuweisen, das Schäden oder Fehlfunktionen an der Ausrüstung verursachen kann.
	Das Symbol „Gefahr“ wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass ein erhebliches Schadensrisiko für den Benutzer besteht, wenn der Warnhinweis nicht beachtet wird.
	Das Symbol „Hohe Lautstärke“ wird verwendet, um auf etwas hinzuweisen, das Hörschäden verursachen kann.
	Das Symbol „Hohe Temperatur“ weist auf hohe Oberflächentemperaturen hin, die zu Verletzungen führen oder unangenehme Empfindungen auslösen können.
	Das Symbol „Bitte von Kindern unter 3 Jahren fernhalten“ weist auf Ersticken durch Verschlucken kleiner Teile sowie auf Verletzungsgefahr durch scharfe Spitzen und Kanten einzelner Bauteile hin.

Sicherheit

Notfallgerät



Dieses Gerät ist nicht gedacht oder geeignet als Notrufgerät oder als alleinige Kommunikationshilfe. Falls dieses Gerät ausfällt, kann es vom Benutzer nicht zur Kommunikation verwendet werden.

Reinigung, Wartung, Service



Das Gerät nicht reinigen oder warten, während es in Benutzung ist. Ziehen Sie das Ladegerät ab und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen, hygienisch aufarbeiten oder eine Wartung durchführen.



Ist das Gerät oder ein Zubehörteil beschädigt, wenden Sie sich an den Kundendienst des Händlers, von dem Sie das Gerät bekommen haben. Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen.

Zubehör



Verwenden Sie keine Zubehörteile, abnehmbare Teile oder Materialien, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.



Verwenden Sie Zubehörteile, abnehmbare Teile und Materialien nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Montage und Positionierung



Zur Vermeidung von Muskel-, Gelenk- und Skeletterkrankungen (RSI, Repetitive Strain Injury) darf die Positionierung des Geräts nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.



Tisch- und Rollstuhlhalterungen sowie Bett- bzw. Bodenständer (Floor Mount) sind nur durch qualifiziertes Personal aufzubauen und einzustellen. Bei fehlerhaft montierten oder befestigten Halterungen droht erhebliches Verletzungsrisiko!



Augengesteuerte Geräte müssen zum Betrieb stets an einer Halterung (Tischständer, Rollstuhlhalterung, Bettständer oder Bodenständer) montiert sein.



Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es nur schwer zugänglich ist oder wo das Ladegerät nicht einfach angeschlossen und ausgestöpselt werden kann.

Beschädigung



Benutzen Sie das Look-Modul nicht, wenn die Oberfläche (Filterscheibe) beschädigt ist.

Seh- und Hörvermögen



Wenn Sie eine Brille benutzen, konsultieren Sie Ihren Augenarzt oder Augenoptiker bzgl. einer Nutzung und der Positionierung des Geräts.



Vermeiden Sie bei Benutzung eines Kopfhörers hohe Lautstärken, da diese auf Dauer das Gehör beeinträchtigen können. Wählen Sie eine geringe Lautstärke und erhöhen Sie diese ggf. nur leicht, um komfortabel hören zu können.

Kleinteile, Kabel, Leitungen, Aufstellfuß, Gurte und Ösen



Kabel, Leitungen, Gurte und Ösen stellen eine Gefährdung durch Erfassen oder Aufwickeln sowie ein potenzielles Strangulationsrisiko dar. Berücksichtigen Sie dies beim Positionieren des Geräts sowie beim Anschluss von Zubehör wie externen Tasten.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Prüfen Sie Stecker und Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung schalten Sie das Gerät umgehend aus und wenden Sie sich an den Kunden-

dienst des Herstellers.



Wenn Sie ein Kabel abziehen, halten Sie es am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel. Anderenfalls riskieren Sie eine Beschädigung des Kabels / der Leitung.



Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten (Netzteil, Tasten, Kabel, Speichermedien etc.) anschließen oder entfernen.



Schließen Sie kabelgebundenes Zubehör nur wie in dieser Anleitung beschrieben an.



Bei Benutzung des ausklappbaren Aufstellfußes besteht Gefahr des Einklemmens oder Quetschens von Fingern.



Wenn Sie den ausklappbaren Ständer demontieren, verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort. Beim Herumspielen mit dem Ständer besteht die Gefahr von Augenverletzungen!



Verwahren Sie den mitgelieferten USB-Stick bei Nichtbenutzung an einem sicheren Ort und lassen Sie ihn nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Verwahren Sie den optional mitgelieferten Stylus bei Nichtbenutzung an einem sicheren Ort und lassen Sie ihn nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen. Beim Herumspielen mit dem Stylus besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Bildschirm



Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Bildschirm beschädigt, gesplittert oder zerbrochen ist.



Entfernen Sie den Touchscreen (die berührungsempfindliche Schicht auf dem Display) nicht. Der Touchscreen schützt Sie vor Glassplittern im Falle eines Displaybruchs.

Interferenzen



Wenn Sie dies Gerät in einer medizinischen Umgebung benutzen, folgen Sie den Anweisungen für mobile Geräte und Smartphones.



Verwenden Sie dies Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Störungen verursachen, es können Interferenzen auftreten. Entfernen Sie sich wenn möglich von der Störquelle.

Feuchtigkeit



Das Gerät niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!



Ist das Gerät mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen, schalten Sie es umgehend aus. Lassen Sie das Gerät vor dem Wiedereinschalten komplett trocknen. Feuchtigkeit in den USB-Buchsen können Sie entfernen, indem Sie das Gerät mit dem USB-Buchse nach unten richten und es mehrfach stark schütteln. Trocken Sie anschließend die USB-Buchse mit reinem Mikrofasertuch. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis sich keine Feuchtigkeit mehr in der / den USB-Buchse(n) befindet.

Ermüdung



Bei Verwendung der Augensteuerung: Legen Sie regelmäßig Pausen bei der Benutzung ein, vor allem wenn Sie erst anfangen, ein Augensteuerungsgerät zu benutzen.



Bei Verwendung der Augensteuerung: Legen Sie Pausen bei der Benutzung ein, wenn die Nutzung der Augensteuerung Sie ermüdet oder wenn Sie trockene Augen bekommen.


Krampfanfälle




Bei Verwendung der Augensteuerung: Personen mit photosensitiver Epilepsie können anfällig sein für epileptische Anfälle oder Bewusstlosigkeit, wenn sie im alltäglichen Leben bestimmten Blinklichtern, Lichtmustern oder der Lichtquelle des Eyetrackers


ausgesetzt sind. Solche Personen sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden. Der Benutzer sollte schnellstmöglich vom Gerät entfernt werden, wenn eines der folgenden Verhalten beobachtet wird: unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Krämpfe, Zuckungen, Verlust des Bewusstseins oder Sehstörungen!

Infrarotstrahlung


 Bei Verwendung der Augensteuerung: Das Look-Modul sendet impulsartiges Infrarotlicht (IR) aus. Bestimmte medizinische Geräte sind anfällig für Störungen durch IR-Licht und/oder IR-Strahlung. Verwenden Sie die Augensteuerung daher nicht in der Nähe solcher Geräte. Ist Ihnen nicht klar, ob ein medizinisches Gerät empfindlich gegen Infrarotstrahlung ist, konsultieren Sie den Hersteller des Geräts.


 Bei Verwendung der Augensteuerung: Haben Sie Fragen zur Empfindlichkeit eines medizinischen Geräts gegenüber Infrarotstrahlung des Look-Moduls, konsultieren Sie den Hersteller des Geräts oder Ihren Gesundheitsdienstleister.


Wichtiger Hinweis bei Nutzung eines Pulsoximeters


 Bei Verwendung der Augensteuerung: Pulsoximeter sind empfindlich gegenüber bestimmten Wellenlängen des Umgebungslichts wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung oder Infrarotlicht. Um die gewünschten Ergebnisse unter allen Lichtbedingungen zu erhalten, empfehlen Hersteller von Pulsoximetern i. d. R. das Abdecken des Pulsoximeter-Sensors mit einem lichtundurchlässigen Material. Alternativ können Sie versuchen, den Sensors des Pulsoximeters unter der Augensteuerung zu positionieren. Das Abdecken des Sensors mit einem lichtundurchlässigen Material bietet einen zuverlässigeren Schutz gegen reflektiertes Infrarotlicht und andere Fremdlichteinflüsse.


Batterien und Laden


 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Laden der in das Gerät eingebauten Akkus.


 Verwenden Sie das Gerät nicht an unübersichtlichen Stellen oder an Orten, wo das Netzteil nicht einfach abgezogen werden kann.


 Befolgen Sie zum Laden des Geräts immer die in dieser Anleitung gemachten Angaben.


 Führen Sie keine Objekte in die Ladebuchse(n) ein, da diese die Buchse(n) beschädigen könnten.


 Zur Vermeidung eines Kurzschlusses oder eines Schadens am Gerät, laden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist oder in einer Umgebung, wo es nass werden könnte.

 Bedienen Sie das Gerät, das Netzteil oder Zubehörteile nicht mit feuchten oder nassen Händen.


 Laden Sie das Gerät nur sicheren, trockenen Umgebungen. Laden Sie das Gerät nicht außerhalb geschlossener Räume.


 Halten Sie das Ladegerät fern von Wasser und stellen Sie sicher, dass es keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

 Bei Ladegeräten mit mehreren Ländersteckern, verwahren Sie nicht benötigte Länderstecker an einen sicheren Ort auf. Ladestecker nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

 Ist das Ladegerät oder dessen Zuleitung beschädigt, darf es nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

Wärme

 Legen Sie das Gerät nicht in eine Mikrowelle oder einen Backofen und halten Sie es von offenen Flammen und Feuer fern.

 Lassen Sie das Gerät nicht offen im Fahrzeug liegen es könnte dort sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sein.

Umgebung



Bringen Sie das Gerät nicht in sauerstoffreiche Umgebungen (Operationsräume, Sauerstoffzelte etc.).



Benutzen Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven oder brennbaren Gasen.

Die Oberfläche berühren



Das Berühren der Geräteoberfläche mit einer Hautverletzung kann die Wunde verschärfen



Kinder und andere Risikogruppen sollten die Geräteoberfläche nicht berühren, wenn die Möglichkeit einer Verbrennung besteht

Entsorgung



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Implantierbare Medizinprodukte



Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen diesem tragbaren Gerät und einem implantierten Gerät wie Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator, um potenzielle Interferenzen mit diesem Gerät zu vermeiden.

Menschen, denen ein Gerät wie ein Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator implantiert wurde, sollten

- IMMER einen Mindestabstand von mindestens 15 cm zwischen diesem Gerät und dem implantierten Gerät einhalten, solange dieses Gerät eingeschaltet ist;
- dieses Gerät nicht in einer Tasche oder am Gurt in einem Abstand von weniger als 15 cm vom implantierten Gerät tragen, da dieses Gerät nach dem Einschalten – auch dann, wenn es nicht verwendet wird – Signale aussenden kann. Dieses Gerät sollte stets auf der dem implantierten Gerät ABGEWANDTEN Seite getragen werden;
- dieses Gerät SOFORT AUSSCHALTEN, wenn die Gefahr einer Interferenz besteht.
- alle Anweisungen des Herstellers des implantierten Geräts lesen und befolgen. Haben Sie Fragen zur Verwendung dieses Geräts in Verbindung mit einem implantierten Gerät, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers des implantierten Geräts.

DEN ACCENT 1400 KENNENLERNEN

Die Oberseite des Accent 1400



1	Mikrofone
2	Ösen für Tragegurt
3	Griff
4	Lichtsensor
5	Vordere Kamera
6	Kamerabetriebsanzeige
7	Ein/Aus-Taste
8	Akku-/Lade-Anzeige
9	Betriebsanzeige
10	Lautstärkewippe
11	Display mit Touchscreen

Die Unterseite des Accent 1400



1	Befestigungspunkte (Gewindebuchsen) für Tragegriff oder Kopfmaus NuPoint®
2	Mini-USB-Buchse für Kopfmaus NuPoint® (vom Griff verdeckt)
3	Hintere Kamera
4	Aufnahmeplatte für Gerätehalterung TBH
5	Schacht für SD-Karte
6	USB 3.0-Anschluss
7	USB 2.0-Anschlüsse
8	USB Mini-Port

9	Befestigungspunkte (Gewindebuchsen) für Augensteuerungsmodul „Look“® ^u
10	USB-Buchse für Augensteuerungsmodul „Look“® ^u
11	Mikrofon
12	HDMI-Anschluss
13	Ladebuchse
14	Tastenbuchse A
15	Tastenbuchse B
16	Kopfhörerbuchse

Die linke und die rechte Seite des Accent 1400



1	Mikrofon
2	Schacht für Mirko-SD-Karte
3	USB 3.0-Anschluss
4	USB 2.0-Anschluss
5	USB 2.0-Anschluss
6	USB Mini-Port ³

1	Mikrofon
2	HDMI-Anschluss ¹
3	Ladebuchse
4	Tastenbuchse A ²
5	Tastenbuchse B ²
6	Kopfhörerbuchse

¹) Benutzer mit visuellen Problemen können einen externen Bildschirm an die HDMI-Buchse anschließen.

²) Steuern Sie das Gerät mit einer oder zwei externen Tasten an, so schließen Sie diese an die Buchse A (bei einer Taste) bzw. A und B (bei zwei Tasten) an. Zur Benutzung eines analogen Joysticks mit DSUB-9-Stecker benötigen Sie einen Adapter, den Sie bei PRD erwerben können. Ist Ihr Joystick mittels Adapter angeschlossen und reagiert nicht normal, so vertauschen Sie die Stecker A und B des Adapters.

³) Eine Funktionalität ist nur bei geöffnetem Gerät (internes Windows aktiviert) gegeben.

Das Gerät einschalten

1. Drücken und Halten Sie den I/O-Taste rechts oben auf dem Gerät.
2. Sobald ein Piepton ertönt, lassen Sie die Taste los. Die grüne LED beginnt zu leuchten



Die grüne LED leuchtet, solange das Gerät eingeschaltet oder im Standby-Modus ist.

3. Warten Sie ab, bis die Software gestartet hat.



Der Accent 1400 benötigt ca. 30 Sekunden, bis der Bootvorgang nach einem Neustart abgeschlossen und das Gerät zur Benutzung bereit ist.



Drücken Sie während des Startvorgangs NICHT noch einmal die Ein/Aus-Taste, sonst könnte der Accent 1400 in den Wiederherstellungsmodus umschalten.

Haben Sie versehentlich den Wiederherstellungsmodus aktiviert, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm oder wenden Sie sich an den technischen Service von PRD.

Die Wiederherstellung des Accent 1400 kann bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch nehmen.

Den Touchscreen benutzen



Achtung: Verwenden Sie für das Drücken auf den Touchscreen keine scharfkantigen Objekte. Der Touchscreen ist gedacht zur Benutzung mit dem Finger oder dem mitgelieferten Stylus, der speziell zur Nutzung mit kapazitiven Displays konstruiert wurde. Andere Objekte können den Bildschirm beschädigen oder gar zerstören.



Unter dem Touchscreen befindet sich die Flüssigkristallanzeige (LCD). Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Display zerbricht und Kristallflüssigkeit auf die Haut gelangt, wischen Sie die Flüssigkeit ab und spülen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser ab. Waschen Sie die betroffenen Stellen anschließend gründlich mit Seife. Achten Sie darauf, dass Sie nicht am zersplitterten Glas verletzen.

Der Touchscreen ist sehr berührungsempfindlich. Seine Oberseite sollte frei von Staub, Fingerabdrücken und andere Verschmutzungen gehalten werden, um Leistungseinbußen zu verhindern. Der Touchscreen reagiert empfindlich auf Regentropfen und extreme Temperaturen (Kondensation).

Zur Reinigung des Touchscreens verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung wischen Sie den Touchscreen mit einem feuchten (nicht nassen!), fusselfreien Tuch ab und trocknen Sie ihn mit einem anderen weichen, fusselfreien Tuch.

Den Akku laden

Die Akkulaufzeit Ihres Geräts hängt davon ab, wie Sie das Gerät benutzen. Die Ladedauer hängt davon ab, wie weit das Gerät zu Beginn des Aufladens entleert war. Wenn das Gerät geladen werden muss, suchen Sie die Ladebuchse auf der Unterseite des Geräts und schließen Sie das Ladegerät an.

Die aktuelle Ladestand des Akkus wird Ihnen permanent in der Statuszeile der Software (NuVoice / Empower) des Accents angezeigt.

Weitere Informationen zum Akku finden Sie in der Toolbox im Menü SYSTEM > Menü Akku.


Stark und ganz entladenen Akku laden


Einen stark entladenen Akku zu laden dauert ca. 10 Stunden. Die Ladezeit verlängert sich um weitere 2 Stunden, sollte der Akku komplett leer sein. Ein weniger stark entladener Akku wird entsprechend schneller aufgeladen.

Regelmäßiges Aufladen

Bei normaler täglicher Benutzung sollte das Gerät täglich – z.B. über Nacht – aufgeladen werden. Weiterhin sollten Sie das Gerät aufladen, wenn die Ladekontrollleuchte blinkt oder leuchtet oder die Akkustandanzeige nur noch rote Balken anzeigt. Können Sie das Gerät nicht aufladen, schalten Sie es in Phasen der Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen.

Ladegerät anschließen


 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Laden des Akkus. Andere Netzteile können das Gerät beschädigen.

 Verwahren Sie das Gerät beim Laden an einem sicheren Ort.

1. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
2. Heben sie den Portschutz an der rechten Seite an.



3. Stecken Sie den runden Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse.

 Sie können das Gerät während des Ladens benutzen.

Die Akku-/Lade-Anzeige

Bei eingeschaltetem Gerät:

- Akku-/Lade-Anzeige ist aus: Akku hat noch ausreichend Kapazität
- Akku-/Lade-Anzeige blinkt: Akku hat weniger als 15% Kapazität (ca. 3 Stunden)

Bei angeschlossenem Ladegerät:

- Akku-/Lade-Anzeige leuchtet gelb: Akku wird geladen
- Akku-/Lade-Anzeige leuchtet grün: Akku ist vollständig geladen

Entsorgung des Geräts und/oder des Akkus



Entsorgung des Geräts: Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.



Entsorgung des Akkus: Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für Altbatterien und abgelaufene Akkus. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können Altbatterien und abgelaufene Akkus an Sammelstellen im Handel oder an Wertstoffhöfe kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Aufstellfuß

Der Accent 1400 verfügt über einen eingebauten Drahtbügel, der als Aufstellfuß dient. Der Aufstellfuß verfügt über 2 Positionen, eingeklappt und aufgeklappt.



Tragen Sie das Gerät nicht am Aufstellfuß. Benutzen Sie zum Tragen stets den eingebauten Griff oder einen ordnungsgemäß montierten Gurt!



Bei Benutzung des ausklappbaren Aufstellfußes besteht Gefahr des Einklemmens oder Quetschens von Fingern.

Aufstellfuß (Drahtbügel) ausklappen

Aufgeklappt ermöglicht der Drahtbügel die Nutzung des Accent 1400 auf ebenen Oberflächen in einem Winkel von ca. 60°.

1. Drehen Sie den Accent 1400 um und legen Sie ihn flach auf den Tisch.
2. Ziehen Sie den Drahtbügel an seinem unteren Enden nach oben.
3. Richten Sie das Gerät auf.
4. Stellen Sie sicher, dass der Drahtbügel ganz ausgeklappt ist, bevor sie den Accent 1400 auf den Bügel stellen.



Aufstellfuß (Drahtbügel) einklappen

1. Drehen Sie den Accent 1400 um und legen Sie ihn flach auf den Tisch.
2. Drücken Sie den Drahtbügel an seinem oberen Ende nach unten, bis er in der Parkposition einrastet.

Wenn Sie den Aufstellfuß nicht benötigen, klappen Sie ihn ein oder demontieren Sie ihn komplett. Eingeklappt stört er nicht und blockiert auch keine sonstigen Elemente.

Aufstellfuß demontieren

Drehen Sie den Accent 1400 um und legen Sie ihn flach auf den Tisch.



1. Nehmen Sie einen Schraubendreher und entfernen Sie die Schrauben der beiden Bügelhalter.



Kleinteile wie Schrauben und Bügelhalter nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickengefahr!



2. Ziehen Sie den Aufstellbügel an beiden Seiten nach außen.
3. Entnehmen Sie den Aufstellbügel und verwahren Sie ihn an einen sicheren Ort.



Wenn Sie den Drahtbügel wieder montieren, schrauben Sie die Bügelhalter ebenfalls fest. So verhindern Sie, dass jemand den Bügel versehentlich löst.



Beim Hantieren mit dem Aufstellbügel besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Tragegriff demontieren

Wenn Sie den Griff nicht benötigen oder die Kopfmaus NuPoint verwenden wollen, können Sie ihn demontieren.

1. Drehen Sie den Accent 1400 um und legen Sie ihn flach auf den Tisch.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Tragegriff am Gehäuse befestigt ist.
3. Entnehmen Sie den Griff und verwahren Sie ihn zusammen mit den beiden Schrauben an einen sicheren Ort.



! Achtung: Wenn Sie keine Kopfmaus NuPoint montieren, müssen Sie unbedingt die Portabdeckung montieren (siehe nächste Seite)!

Montage des Griffs

1. Setzen Sie den Griff so ein, dass der geneigte Teil zum Display zeigt.
2. Die beiden Zentrierhilfen passen in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Gehäuse.
3. Befestigen Sie den Griff durch festes Anziehen der beiden Schrauben.



Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz!



Kleinteile wie Schrauben und Griff nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Beim Hantieren mit dem Griff besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Portabdeckung montieren

Montieren Sie die Portabdeckung zum Schutz des Mini-USB-Anschlusses auf der Oberseite, wenn Sie den Tragegriff abmontiert und keine Kopfmaus NuPoint montiert haben.

1. Halten Sie die Portabdeckung so, dass die beiden Löcher über den Gewindebuchsen befinden.



2. Befestigen Sie die Portabdeckung mit den beiden Schrauben.



Portabdeckung demontieren

Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Portabdeckung am Gehäuse befestigt ist. Montieren Sie anschließend den Griff oder die Kopfmaus NuPoint.

Verwahren Sie die Portabdeckung an einen sicheren Ort.



Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz!




Kleinteile wie Schrauben und Portabdeckung nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Beim Hantieren mit der Portabdeckung besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

IR-Reflektor montieren

Der IR-Reflektor ist ein Zubehör, das das Abstrahlen von Signalen des in das Gerät eingebauten Infrarot-Moduls erleichtern bzw. verbessern kann.

 Das IR-Modul steht nur bei Geräten zur Verfügung, die nicht als geschlossene Anlage konfiguriert sind.

Das IR-Modul sitzt im rückseitig angebrachten Verstärker und strahlt die Infrarotsignale nach oben ab. Haben Sie Ihren Accent senkrecht montiert (z.B. bei Benutzung der Augensteuerung Look oder der Kopfmaus NuPoint, kann es sein, dass nicht genügend Signal bei dem zu steuernden Gerät ankommt. Der IR-Reflektor lenkt die Infrarotsignale um ca. 45° nach hinten ab.

Montage bei Verwendung des Griffs

Der IR-Reflektor wird über seine äußeren Öffnungen an den beiden Gewindebuchsen des Handgriffs befestigt. Sollten dort bereits Schrauben eingeschraubt sein, entfernen Sie diese zunächst.



Montage bei Verwendung der Kopfmaus NuPoint


Der IR-Reflektor wird über seine inneren Öffnungen an den beiden Gewindebuchsen der Kopfmaus befestigt. Sollten dort bereits Schrauben eingeschraubt sein, entfernen Sie diese zunächst.



Montage bei Verwendung der Portabdeckung

Der IR-Reflektor wird über seine äußeren Öffnungen an den beiden Gewindebuchsen der Portabdeckung befestigt. Sollten dort bereits Schrauben eingeschraubt sein, entfernen Sie diese zunächst.




 Achtung: Stellen Sie sicher, dass der IR-Reflektor nach hinten geneigt ist

Rahmen demontieren

Ihr Gerät wurde ab Werk mit einem Rahmen geliefert. Zum Entfernen (Demontieren) des Rahmens gehen Sie so vor:

1. Entfernen Sie ein ggf. montiertes Abdeckgitter bzw. Fingerführungshilfe.
2. Wenn der Rahmen mit dem Gehäuse verschraubt ist, entfernen Sie die 6 Schrauben (2 oben am Griff und je 2 links und rechts, siehe vorige Seite).




 Verwahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort, Sie benötigen sie, wenn Sie den Rahmen wieder befestigen wollen.

 Kleinteile wie Schrauben nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!


3. Ziehen sie die Laschen des Rahmens oben im Bereich des Griffs aus den Aussparungen heraus.



 Nehmen Sie ggf. einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe, um die Laschen vorsichtig aus den Aussparungen zu drücken.


4. Oben beginnend, ziehen Sie den Rahmen vorsichtig auf der einen Seite vom Gerät ab.



 Nehmen Sie ggf. einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe, um die Laschen vorsichtig aus den Aussparungen zu drücken.

5. Ziehen Sie den Rahmen vorsichtig auf der anderen Seite vom Gerät ab.
6. Ziehen sie die Laschen des Rahmens unten aus den Aussparungen heraus.



 Wenn der Rahmen an keiner anderen Seite mehr befestigt ist, können Sie ihn einfach nach unten wegziehen.

7. Ziehen Sie den Rahmen ab.

 Kleinteile wie Schrauben nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickenungsgefahr!

Rahmen montieren


Zur Befestigung eines Abdeckgitter (Keyguard) oder einer Fingerführungshilfe (Touchguide) muss der Rahmen am Accent 1400 montiert werden. Der Rahmen wird weiterhin als farbgebendes Element verwendet. Wollen Sie Ihren Accent 1400 mit einer gelben, roten, blauen oder grünen Farboption versehen, so müssen Sie den Rahmen montieren, auch wenn sie kein Abdeckgitter oder Fingerführungshilfe verwenden



Wenn Sie ein Augensteuerungsmodul Look an Ihrem Accent 1400 befestigt haben, müssen Sie dieses zunächst demontieren, bevor Sie den Rahmen montieren können!

Rahmen ohne Verschraubung montieren

1. Legen Sie den Rahmen auf das Gerät.

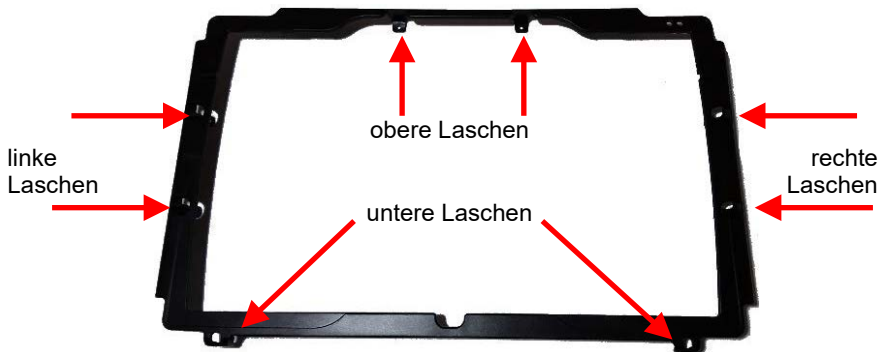


2. Schieben Sie die beiden oberen Laschen in die Aussparungen zwischen Griff und Gehäuse.
3. Ziehen Sie den Rahmen auf einer Seite über den Accent 1400.
4. Ziehen Sie den Rahmen unten über das Gerät und lassen Sie die beiden Laschen in die Aussparungen einrasten.
5. Pressen Sie den Rahmen reihum fest an das Gehäuse, bis der Rahmen gleichmäßig aufliegt und alle Laschen in den zugehörigen Aussparungen sind.

Der Rahmen ist nun montiert. Bei einer Verwendung rein als farbgebendes Element ist keine weitere Befestigung nötig.


Rahmen verschrauben

Falls Sie ein Abdeckgitter oder eine Fingerführungshilfe verwenden, können Sie den Rahmen zusätzlich verschrauben. Der Rahmen verbleibt auch dann noch auf dem Gerät, wenn der Benutzer z. B. hart am Abdeckgitter reißt.

1. Montieren Sie den Rahmen wie auf der vorigen Seite beschrieben auf dem Gerät.
2. Nehmen Sie die Schrauben, die Sie beim Demontieren des Rahmens entfernt haben, und verschrauben Sie den Rahmen damit mit dem Gehäuse.
3. Beachten Sie, dass es 2 verschiedene Schrauben gibt für die 6 Gewinde. Die 4 Schrauben mit dem Metallgewinde sind für die Seiten.

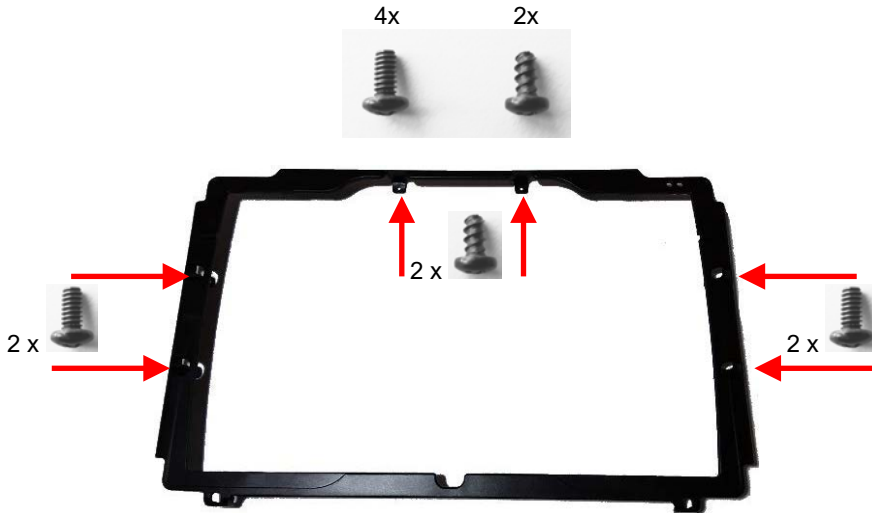

4. Schrauben Sie zunächst die beiden oberen Schrauben fest und dann die Schrauben an den Seiten.


 Kleinteile wie Schrauben nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Abdeckgitter montieren

Zur Befestigung eines Abdeckgitters muss der Rahmen am Accent 1400 befestigt sein (siehe Seite 22).

Richten Sie das Abdeckgitter aus. Oben ragen 2 Stifte links und rechts aus dem Abdeckgitter heraus, unten ist eine halbkreisförmige Aussparung. Die seitlichen Stege zum Einrasten müssen unten (dem Display zugewandt) sein.

1. Schieben Sie eine der Stifte in die Aussparung im Rahmen.

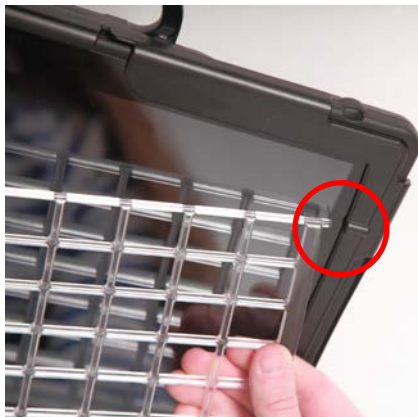


2. Biegen Sie das Abdeckgitter und schieben Sie den andern Stift in die gegenüberliegenden Aussparung.



3. Drücken Sie das Abdeckgitter unten an (außen links und rechts), bis Sie das Klicken der einrastenden Stege hören.



 Falls das Abdeckgitter nicht einrastet, haben Sie es vermutlich falsch herum montiert und die Stege sind oben.

 Beim Hantieren mit dem Gitter besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Abdeckgitter hochklappen

Zur Reinigung des Displays oder um Zugang zur Toolbox zu bekommen können Sie das Abdeckgitter hochklappen.

1. Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Gehäuse fest.
2. Fassen Sie mit einem Finger der anderen Hand unter die halbkreisförmige Aussparung unten in der Mitte des Abdeckgitters und ziehen Sie es nach oben.



3. Das Abdeckgitter verbleibt in der oberen Position, bis Sie es wieder herunterklappen.
4. Drücken Sie das Abdeckgitter unten (außen links und rechts) an, bis die Stege einrasten.

Abdeckgitter demontieren

Zum Entfernen des Abdeckgitters vom Gerät gehen Sie so vor.

1. Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Gehäuse fest.
2. Fassen Sie mit einem Finger der anderen Hand unter die halbkreisförmige Aussparung unten in der Mitte des Abdeckgitters und ziehen Sie es etwas nach oben, so dass die Stege unten nicht mehr eingerastet sind, die das Abdeckgitter fixieren.



3. Greifen Sie das Abdeckgitter oben in der Mitte und biegen Sie es nach oben (vom Display weg).
4. Ziehen Sie die beiden Stifte links und rechts oben am Abdeckgitter aus dem Rahmen.




Beim Hantieren mit dem Gitter besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Fingerführungshilfe montieren

Zur Befestigung einer Fingerführungshilfe muss der Rahmen am Accent 1400 befestigt sein (siehe Seite 22).

1. Richten Sie die Fingerführungshilfe aus: in einer Ecke sind zwei kleine quadratische Öffnungen, diese gehört nach rechts oben.

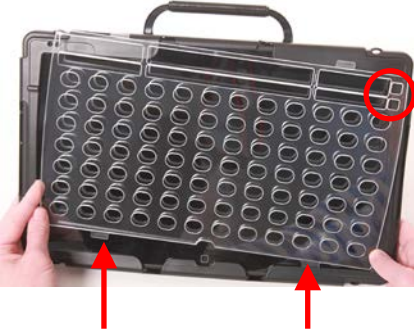

2. Schieben Sie die beiden unteren Zungen in die Aussparungen unten im Rahmen.




3. Biegen Sie die Fingerführungshilfe leicht horizontal und schieben Sie die beiden oberen Zungen nacheinander in die entsprechenden Aussparungen im Rahmen.



Beim Hantieren mit der Fingerführungshilfe besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Fingerführungshilfe demontieren

1. Greifen Sie in eine der breiteren Öffnungen in der zweiten Zeile von oben.
2. Biegen Sie die Fingerführungshilfe horizontal, in den Sie die Finger nach unten ziehen, bis die oberen Zungen aus den Aussparungen am Rahmen heraus-schauen.

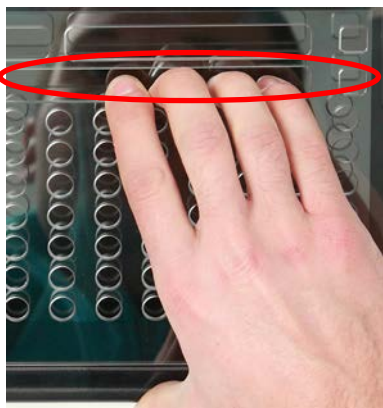

3. Nehmen Sie die Fingerführungshilfe heraus.



Beim Hantieren mit der Fingerführungshilfe besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Tragegurt befestigen

An den Accent 1400 kann ein Tragegurt (Schultergurt) befestigt werden, der als Zubehör erhältlich ist. Zur Befestigung des Gurtes verfügt der Accent 1400 über 4 Ösen (jeweils 2 unten und oben). Im Lieferumfang des Gurtes sind 2 Befestigungsclips enthalten.

1. Der Accent 1400 verfügt über 4 Gurtösen.

Entscheiden Sie, ob der der Tragegurt oben oder unten befestigt werden soll.



2. Trenne Sie den Clip vom Gurt



3. Fädeln Sie de Clipdurch die Öse.



4. Ziehen Sie den Clipverschluss durch die Schlaufe.



5. Ziehen Sie die Schlaufe stramm.



6. Stecken Sie den Clip in die Schnalle am Ende des Gurtes.



7. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Clip.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Aufnahmeplatte für Halterungssystem

Zur Montage des Accent 1400 an einem Halterungssystem (Tisch-, Rollstuhl- oder Bethalterung) ist eine trapezförmige Aufnahmeplatte auf der Unterseite des Gerätes vormontiert. Die Aufnahmeplatte erlaubt die Montage des Accent 1400 auf allen bei Prentke Romich Deutschland erhältlichen Halterungssystemen mit TBH-3-Talkerhalterung.

Aufnahmeplatte demontieren

Zum Entfernen der Aufnahmeplatte drehen Sie den Accent 1400 um und entfernen die 4 Schrauben und die beiden Unterlegscheiben, mit denen die Aufnahmeplatte am Gerät befestigt ist. Verwahren Sie Aufnahmeplatte, Schrauben und Unterlegscheiben an einem sicheren Ort.



Achten Sie auf die Unterlegscheiben, die bei den beiden oberen Schrauben verwendet werden.



Kleinteile wie Schrauben und Unterlegscheiben nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Aufnahmeplatte montieren

Zum Montieren der Aufnahmeplatte drehen Sie den Accent 1400 um. Legen Sie die Aufnahmeplatte auf das Gerät und befestigen Sie sie mit den 4 Schrauben. Legen Sie bei den beiden oberen Schrauben die Unterlegscheiben unter.



Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz!

Eyetracker montieren

Haben Sie das Augensteuerungsmodul Look separat zu Ihrer Kommunikationshilfe erhalten, so müssen Sie das Augensteuerungsmodul zunächst montieren.

1. Sofern vorhanden, entfernen Sie den Rahmen (siehe Seite 23).
2. Drehen Sie den Accent 1400-30 um und legen Sie ihn auf einen Tisch. Achten Sie darauf, dass das Display nicht zerkratzt.
3. Den unteren Teil des Gehäuses kann man entfernen. Lösen Sie die 7 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Accent 1400-30 befestigt ist.




4. Nehmen Sie das Gehäuseunterteil ab.



5. Nehmen Sie das Gehäuseunterteil, das Sie im vorigen Schritt entfernt haben, und drehen Sie es um. Entfernen Sie die beiden Einsätze, indem Sie die zugehörigen Schrauben lösen. Verwahren Sie Schrauben und Einsätze sorgfältig.



6. Lösen Sie die beiden Schrauben der Portabdeckung und nehmen Sie die Portabdeckung ab.

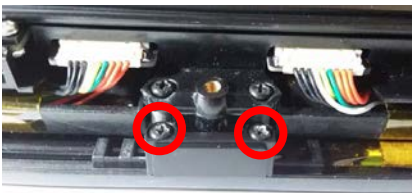

Die Schrauben benötigen Sie, um das Look-Modul zu befestigen. Verwahren Sie die Portabdeckung an einem sicheren Ort.

7. Drehen Sie das Look-Modul um und schieben Sie dessen USB-Anschluss vorsichtig in die zugehörige USB-Buchse im Gehäuse des Accent 1400-30.



8. Befestigen Sie die Look-Augensteuerung mit den beiden Schrauben der Portabdeckung, die Sie in Schritt 6. entfernt haben, links und rechts vom USB-Stecker am Accent 1400-30.



9. Verschrauben Sie dann die Look-Augensteuerung außen mit den beiden mitgelieferten Senkkopf-Schrauben mit dem Accent 1400-30.



10. Schieben Sie das Gehäuseunterteil wieder auf den Accent 1400-30.
11. Befestigen Sie das Gehäuseunterteil wieder mit den 7 in Schritt 3. entfernten Schrauben.



Kleinteile wie Schrauben, Einsätze und Portabdeckungen nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Augengesteuerte Geräte müssen zum Betrieb stets an einer Halterung (Tischständer, Rollstuhlhalterung, Bettständer oder Bodenständer) montiert sein.

Kopfmaus NuPoint montieren

Für den Accent 1400 steht optional die interne Kopfmaus NuPoint zur Verfügung. Haben Sie Ihren Accent 1400 mit Kopfmaus bestellt, so wird diese bereits montiert sein. Wollen Sie die Kopfmaus nachrüsten, so folgen Sie diesen Anweisungen zur Montage der Kopfmaus.

1. Drehen Sie den Accent 1400 um und legen Sie ihn flach auf den Tisch.
2. Haben Sie einen Rahmen montiert und dieser ist verschraubt, so entfernen Sie die beiden kleinen Schrauben oben im Bereich des Griffs bzw. der Portabdeckung. Verwahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort.
3. Entfernen Sie den Griff bzw. die Portabdeckung (siehe Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.**). Sie benötigen Sie dabei erhaltenen Schrauben zur Befestigung der Kopfmaus.
4. Richten Sie die Kopfmaus so aus, dass die beiden Schraubenlöcher in der Kopfmaus über den Gewindebuchsen des Accents liegen und der Mini-USB-Anschluss in der Mitte der Kopfmaus über der zugehörigen Buchse des Accents liegt.



5. Schieben Sie die Kopfmaus in den Accent hinein. Versichern Sie sich, dass der USB-Stecker der Kopfmaus in der USB-Buchse des Accents steckt.
6. Befestigen Sie die Kopfmaus mit den beiden Schrauben.
7. Die Kopfmaus ist bereit zur Benutzung.



Zur Nutzung der Kopfmaus NuPoint beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kommunikationssoftware (NuVoice bzw. Empower).



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

HDMI-Ausgang verwenden

Sie können Ihren Accent 1400 mit einem HDMI-Kabel zwecks Bild- und Tonwiedergabe mit einem externen Monitor, einem TV-Gerät oder einem Projektor verbinden. Dabei haben Sie die Wahl, ob

- nur das externe Anzeigegerät die Bildschirmanzeige übernimmt,
- das externe Anzeigegerät und der Accent 1400 das gleiche Bild anzeigen,
- das externe Anzeigegerät einen erweiterten Bildschirm abzeigt.


Sie benötigen ein HDMI-Kabel mit HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker (Micro). Schließen Sie den kleinen Stecker des HDMI-Kabels an die Buchse auf der linken Seite des Accent 1400 an. Schließen Sie den großen Stecker des HDMI-Kabels an Ihr externes Anzeigegerät an.

Audiowiedergabe auf Accent umstellen

Auch die Audiowiedergabe erfolgt bei angeschlossenem HDMI-Kabel über das externe Anzeigegerät. Sollte Ihr externes Anzeigegerät keine Audiowiedergabe ermöglichen, stellen Sie die Audiowiedergabe manuell auf die im Accent 1400 eingebauten Lautsprecher um.

- Minimieren Sie die Kommunikationssoftware NuVoice bzw. Empower, um den Windows-Desktop anzuzeigen.



- Tippen Sie auf das Windows-Symbol
- Wählen Sie **Einstellungen** .
- Wählen Sie **System**.
- Wählen Sie **Sound**.
- Wählen Sie bei **Ausgabegerät auswählen** die Option „Speakers (USB Audio Device)“
- Tippen Sie auf das NuVoice- bzw. Empower-Symbol in der Taskleiste, um zu dieser Anwendung zurückzukehren.

Anzeigegerät und -art wählen



Wenn Sie das externe Anzeigegerät das erste Mal an den Accent 1400 anschließen, erfolgt die Anzeige ausschließlich über das externe Anzeigegerät. Das Display im Accent 1400 wird abgeschaltet.


Sie können wählen, ob

- die Inhalte des Accents nur auf dem Accent sichtbar sein sollen (Nur „PC-Bildschirm“),
- das externe Anzeigegerät und der Accent 1400 das gleiche Bild anzeigen („Duplizieren“),
- das externe Anzeigegerät einen anderen (erweiterten) Bildschirm anzeigt („Erweitern“).
- nur das externe Anzeigegerät die Bildschirmanzeige übernimmt (Nur „PC-Bildschirm“),

Wollen Sie die Accent-Bildschirmausgabe auf dem externen Anzeigegerät sichtbar machen, wählen Sie „Duplizieren“.

Wollen Sie z. B. eine Präsentation vorführen, wählen Sie „Erweitert“ und lassen Sie das Präsentationsprogramm im erweiterten Desktop anzeigen.

- Minimieren Sie die Kommunikationssoftware NuVoice bzw. Empower, um den Windows-Desktop anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Info-Center  in der Taskleiste.
- Wählen Sie Projizieren .
- Wählen Sie, was auf dem externen Bildschirm angezeigt werden soll:

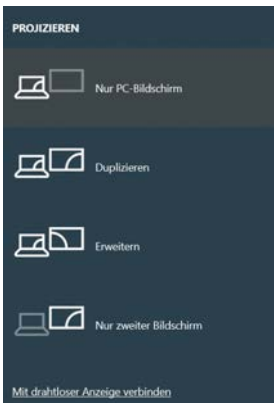

- Tippen Sie auf das NuVoice- bzw. Empower-Symbol in der Taskleiste, um zu dieser Anwendung zurückzukehren.

Computersteuerung

Kabelgebundene Computersteuerung

Der Accent 1400 verfügt über eine Mini-USB-Buchse, über die die Steuerung eines externen Computers möglich ist.

- Verbinden Sie den Accent 1400 mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem Computer.

Für weitere Informationen zur Steuerung eines externen Computers schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Kommunikationssoftware (NuVoice bzw. Empower) nach.

Drahtlose Computersteuerung

Der Accent 1400 verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle, über die er mit kompatibelem Zubehör verbunden werden kann.

Sie benötigen den PRC-Bluetooth-Adapter, um drahtlos einen externen PC steuern zu können.



- Stecken Sie den PRC-Bluetooth-Adapter in eine freie USB-Schnittstelle des zu steuernden Computers.

Für weitere Informationen zur Nutzung des PRC-Bluetooth-Adapters schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Kommunikationssoftware (NuVoice bzw. Empower) nach.



Kleinteile wie Adapter nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Drahtlose Internetverbindung einrichten

Der Accent 1400 verfügt über eine WLAN-Schnittstelle, über die er mit dem Internet verbunden werden kann.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um

- Software-Updates für den Accent 1400 herunterzuladen;
- Windows-Updates durchzuführen.

Haben Sie ein offenes System, können Sie die WLAN-Schnittstelle weiterhin nutzen, um mit dem Accent 1400 direkt auf das Internet zuzugreifen.


Die Nutzung einer Internetverbindung kann mit Kosten verbunden sein.



Weder die Prentke Romich GmbH noch PRC-Satillo sind verantwortlich für das Zur-Verfügung-Stellen einer Internetverbindung.


Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene Gefahr.

1. Schalten Sie den Accent 1400 ein.
2. Minimieren Sie die Kommunikationssoftware NuVoice bzw. Empower, um den Windows-Desktop anzuzeigen.


3. Tippen Sie auf das WLAN-Symbol in der Statusleiste . Verfügbare Drahtlosnetzwerke werden angezeigt:




4. Tippen Sie auf das gewünschte WLAN und anschließend auf **Verbinden**:

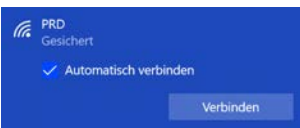

5. Öffnen Sie die Bildschirmtastatur  und geben Sie den Netzwerksicherheitschlüssel ein:

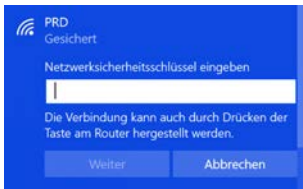

6. Tippen Sie auf **Weiter**:

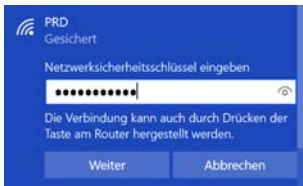

7. Der Accent 1400 verbindet sich mit dem Netzwerk.
8. Tippen Sie auf das NuVoice- bzw. Empower-Symbol in der Taskleiste, um zu dieser Anwendung zurückzukehren.

Windows-Energiemanagement

Der Accent 1400 verwendet das Betriebssystem Windows 10.

Zur Nutzung der Energiesparoptionen schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der von Ihnen verwendeten Kommunikationssoftware (NuVoice bzw. Empower) nach.

Windows herunterfahren

Diese Funktion fährt den Accent 1400 komplett herunter. Das Herunterfahren dauert ca. 30 Sekunden. Der Accent 1400 kann anschließend nur durch Drücken der Ein/Aus-Taste wieder eingeschaltet werden.

Windows-Neustart

Diese Funktion fährt den Accent 1400 komplett herunter und startet ihn anschließend wieder. Ein Neustart dauert 1-2 Minuten.

Belegung der Ein/Aus-Taste

Wählen Sie, was der Accent machen soll, wenn die Ein/Aus-Taste betätigt wird. Mögliche Werte sind

- **Deaktiviert:** die Taste hat keine Funktion
- **Standby-Modus** [Standardwert]: der Accent 1400 geht in den Standby-Modus. Tippen Sie kurz auf die Taste TOOLS oder die Ein/Aus-Taste, um ihn wieder aufzuwecken
- **Ruhezustand** (nur NuVoice): der Accent 1400 geht in den Ruhezustand. Tippen Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um ihn wieder aufzuwecken
- **Herunterfahren:** der Accent 1400 wird heruntergefahren. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um ihn neu zu starten.

Display ausschalten nach (nur NuVoice)

Wählen Sie, wann die Beleuchtung des Displays heruntergeregelt wird, sofern keine Eingaben mehr vorgenommen werden. Mögliche Werte sind Aus, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten und 30 Minuten.

Standby nach (nur Empower)

Wählen Sie, wann der Accent 1400 in den Standby-Modus geht, sofern keine Eingaben mehr vorgenommen werden.

Bildschirmhelligkeit (nur Empower)

Wählen Sie die Stärke der Hintergrundbeleuchtung des Displays. Je heller das Display leuchtet, umso mehr Strom verbraucht es.

Den Accent 1400 benutzen

Zur Nutzung des Accent 1400 (Auswahl eines Vokabulars, Wahl der Ansteuerung sowie das Anpassen dieser an die individuellen Bedürfnisse) schlagen Sie bitte im Handbuch zu der von Ihnen verwendeten Kommunikationssoftware NuVoice oder Empower nach.

Transportschutzmodus aktivieren bei längerer Nichtbenutzung des Geräts (NuVoice)



Wenn Sie die Software NuVoice verwenden und ihr Gerät für einen längeren Zeitraum nicht nutzen werden, gehen Sie so vor:

1. Laden Sie den Akku vollständig.
2. Lassen Sie das Netzteil angeschlossen.
3. Öffnen Sie das Menü SYSTEM.
4. Wählen Sie das Menü Akku.
5. Wählen Sie die Option „Transportschutz aktivieren“.
6. Bestätigen Sie die Abfrage mit „Ja“.
7. Schließen Sie die Menüs.
8. Ziehen Sie das Netzteil ab.

Lagern Sie ihr Gerät an einem trockenen, nicht zu warmen und nicht zu kalten Ort.

Gerät benutzen aus dem Transportschutzmodus

Wollen Sie ihr Gerät aus dem Transportschutzmodus wieder benutzen, gehen Sie so vor:

1. Schließen Sie das Netzteil an.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ca. 1 Sekunden lang, bis die beiden Pieptöne ertönen und die grüne Kontrollleuchte leuchtet.
3. Das Gerät bootet.
4. Lassen Sie das Netzteil angeschlossen, bis der Akku vollständig geladen ist.

Reinigung & Desinfektion

Wird das Gerät nur von einer Person benutzt, sollte es regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.



Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Ladegerät ab, bevor Sie das Gerät reinigen oder desinfizieren.

Reinigung des Geräts



Achtung: Verwenden Sie keine Lösemittel, Scheuermittel, Spritzwasser oder Reiniger auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse.

Reinigung des Gehäuses

Zur Reinigung des Accents wischen Sie ihn bitte mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab. Vor dem Wiedereinschalten ist das Gerät gründlich zu trocknen.

Reinigung des Touchscreens

Der Touchscreen ist sehr berührungsempfindlich. Seine Oberseite sollte frei von Staub, Fingerabdrücken und andere Verschmutzungen gehalten werden, um Leistungseinbußen zu verhindern. Der Touchscreen reagiert empfindlich auf Regentropfen und extreme Temperaturen (Kondensation). Zur Reinigung des Touchscreens verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung wischen Sie den Touchscreen mit einem feuchten (nicht nassen!), fusselfreien Tuch ab und trocknen Sie ihn mit einem anderen weichen, fusselfreien Tuch.

Reinigung des Abdeckgitters und der Fingerführungshilfe

Nehmen Sie das Abdeckgitter bzw. die Fingerführungshilfe vom Gerät ab. Spülen Sie es in warmem Wasser mit Spülmittel ab. Vor dem Wiedereinsetzen ist das Abdeckgitter / die Fingerführungshilfe gründlich zu trocknen.

Desinfektion des Geräts

Zum Desinfizieren des Geräts außer dem Display mischen Sie eine Viertel Tasse Essig mit einer Tasse Wasser. Befeuchten Sie ein Tuch mit der Essiglösung. Entfernen Sie Rahmen und Abdeckgitter bzw. Fingerführungshilfe. Wischen Sie das Gehäuse (aber nicht das Display!) mit dem Tuch ab. Waschen Sie Rahmen, Abdeckgitter und Fingerführungshilfe separat mit der Essiglösung. Lassen Sie alles gründlich trocknen.



Das Display niemals mit Essiglösung oder essighaltigen Reinigern reinigen!

Entfernen von Speichel

Speichel, der auf das Display tropft, sollte möglichst umgehend mit einem fusselfreien Lappen abgewischt werden.

Entfernen von Flüssigkeit

Wurde Flüssigkeit auf das Gerät geschüttet oder das Gerät ist in einem Regenguss nass geworden, schalten Sie es umgehend aus und trocknen Sie es gründlich. Schalten Sie das Gerät nach dem Trocken wieder ein. Sollte es nicht starten, wenden Sie sich an den technischen Service von PRD.

Reinigung des EyeTrackers



Niemals den Eyetracker in Wasser eintauchen!



Benutzen Sie niemals Scheuermittel, scharfe Reiniger oder kratzende, scheuernde Reinigungsgeräte. Eine Beschädigung der lichtdurchlässigen Oberseite des Eyetrackers könnte die Folge sein!

Zur Reinigung des Look-Moduls nehmen Sie ein Mikrofasertuch und wischen Sie die Oberfläche des Look-Moduls damit ab. Verwenden Sie keine anderen Tücher, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

Sollte das Look-Modul stark verschmutzt sein, feuchten Sie ein Mikrofasertuch leicht an. Das Tuch darf nur leicht feucht, nicht aber tropfend nass sein. Wischen Sie die Oberfläche des Look-Moduls mit dem feuchten Tuch ab. Reiben Sie anschließend das Look-Modul mit einem fusselfreien Tuch vorsichtig trocken.

Ist die lichtdurchlässige Oberseite des Look-Moduls verschmiert oder verschmutzt, feuchten Sie ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch leicht an (das Tuch darf nur leicht feucht, nicht aber tropfend nass sein) und reinigen Sie damit vorsichtig die Oberfläche des Look-Moduls. Trocknen und polieren Sie die Oberfläche anschließend mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch

Führen Sie am besten immer ein Mikrofasertuch mit sich und reinigen Sie die Oberseite des Look-Moduls täglich.

Hygienische Wiederaufarbeitung des Geräts und/oder des Zubehörs



Den hier gemachten Angaben zur hygienischen Wiederaufarbeitung von Geräten und Zubehör ist stets zu folgen, wenn ein und dasselbe Gerät bzw. Zubehör von mehreren Patienten verwendet werden soll. In solch einem Fall ist es unerlässlich, das Hilfsmittel und das verwendete Zubehör effektiv zu desinfizieren, bevor es an einen anderen Patienten ausgehändigt wird.

1. Ziehen Sie Einmalhandschuhe an.
2. Demontieren Sie Zubehör wie Fingerführungsgitter und Fingerführungshilfen (Keyguards und Touchguides) sowie den zugehörigen Rahmen.
3. Reinigen Sie Gerät und Zubehör
 - 3.1 Wischen Sie Gerät und Zubehör mit einem Desinfektionstuch (viruzid, bakterizid, pseudomonizid, tuberkulozid, fungizid) ab, z. B. Metrex CaviWipes. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionstuchs für die Reinigung.
 - 3.2 Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit einem Glasreiniger und reinigen Sie alle Zwischenräume der Kommunikationshilfe. Benutzen Sie ggf. eine Bürste (z.B. eine Zahnbürste), um in Zwischenräumen und Spalten zu reinigen.
 - 3.3 Trocknen Sie das Gerät mit einem Fön oder wischen Sie es trocken.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass aller Schmutz vom Gerät und vom Zubehör entfernt wurde, bevor Sie das Equipment desinfizieren.

4. Desinfizieren Sie Gerät und Zubehör
 - 4.1 Wischen Sie Gerät und Zubehör mit einem neuen Desinfektionstuch (viruzid, bakterizid, pseudomonizid, tuberkulozid, fungizid) gründlich ab, z. B. Metrex CaviWipes. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionstuchs für die Desinfizierung.
 - 4.2 Wischen Sie auch alle Ecken, Kanten und Spalten gründlich.
 - 4.3 Wischen Sie Gerät und Zubehör mindestens drei (3) Minuten lang ab.
 - 4.4 Lassen Sie Gerät und Zubehör trocknen.
5. Reinigung des Touchscreens
 - 5.1 Sobald das Gerät trocken ist, reinigen Sie Display / Touchscreen mit für Displays und Computermonitore geeignetem Glasreiniger. Verwenden Sie keine essighaltigen Reiniger, da diese das Display verfärben könnten.
 - 5.2 Lassen Sie das Gerät trocknen.



Das Gerät niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!



Ist das Gerät mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen, schalten Sie es umgehend aus. Lassen Sie das Gerät vor dem Wiedereinschalten komplett trocknen. Feuchtigkeit in den USB-Buchsen können Sie entfernen, indem Sie das Gerät mit dem USB-Buchse nach unten richten und es mehrfach stark schütteln. Trocken Sie anschließend die USB-Buchse mit reinem Mikrofasertuch. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis sich keine Feuchtigkeit mehr in der / den USB-Buchse(n) befindet.

Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Gerät ist für den Wiedereinsatz geeignet. Im Falle eines Wiedereinsatzes sind durch den Hersteller folgende Maßnahmen durchzuführen:

Das Gerät ist für den Wiedereinsatz geeignet. Im Falle eines Wiedereinsatzes sind durch den Hersteller folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Re-Imaging des Accents
- Reinigung des Hilfsmittels
- Hygienische Wiederaufarbeitung des Hilfsmittels
- Durchführen von NuVoice- und Windows-Updates
- Funktionsprüfung
- Inspektion / Wartung gemäß §7 MPBetreibV

FEHLERSUCHE UND PROBLEMBEBEHUNG

Akku-Problembhebung



Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn Sie einen anderen als den vom Hersteller verwendeten und freigegebenen Akku einsetzen.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Laden der in das Gerät eingebauten Akkus.



Wenn der Akku komplett entleert ist:

Zeigt die Akkukontrollanzeige in der Statuszeile des Displays nur noch rote und gelbe Balken, erscheint ein Warnhinweis zum Anschluss des Netzteils.

Läuft die Software NuVoice nicht, erscheint die Windows-Meldung zum niedrigen Energiestand und dass das System demnächst heruntergefahren wird.

Schließen Sie umgehend das Netzteil an, um das Herunterfahren zu verhindern.

Um das Gerät nach einem Herunterfahren wieder nutzen zu können, schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste kurz, bis die beiden Pieptöne ertönen und das Gerät startet.

Ist der Akku total entladen, laden Sie den Accent 1400 ca. 30 Minuten lang, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Sollten Sie vom Betriebssystem die Meldung erhalten „Windows wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren“ und entsprechende Optionen zum Neustart angeboten bekommen, warten Sie 30 Sekunden oder schließen Sie eine USB-Tastatur an den Accent 1400 an und wählen Sie die Option „Windows normal starten“.

Pannenhilfe

Was mache ich, wenn...

Das Gerät selektiert falsche Tastenfelder

Reinigen Sie das Display vorsichtig mit einem milden Reiniger wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ auf S. 45 beschrieben.

Die Umfeldkontrolle funktioniert nicht

Sollten Sie sich unter starken Leuchtstoffröhren aufhalten, besteht die Möglichkeit, dass die vom Gerät ausgesendeten IR-Signale durch die von Leuchtstofflampen ausgehenden elektromagnetischen Wellen gestört werden. Schalten Sie die Leuchtstofflampen aus oder wechseln Sie den Platz, um die Umfeldkontrolle wieder nutzen zu können.

Wenn Sie das Gerät in einer senkrechten Position verwenden (z. B. weil Sie eine Look-Augensteuerung oder eine NuPoint-Kopfmaus verwenden), strahlt das Gerät die IR-Signale überwiegend nach oben ab und nicht nach vorne in Richtung des zu steuernden Geräts. Bei PRD gibt es für diese Fälle einen als Zubehör erhältlichen IR-Reflektor, der die Signale nach vorne umlenkt. Die Montage des IR-Reflektors ist auf Seite 22 erklärt.

Das Gerät reagiert nicht auf Eingaben oder spricht nicht

Setzen Sie das Verstärkermodul zurück. Nehmen Sie eine aufgebogene Büroklammer und führen Sie ein Ende in die kleine Öffnung neben der I/O-Taste ein. Drücken Sie den darunter liegenden Knopf. Das Gerät schaltet sich aus. Betätigen Sie anschließend die I/O-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.





Vorsicht beim Hantieren mit der Büroklammer, es besteht die Gefahr von Augenverletzungen.


Windows-Fehlersuche

Haben Sie Probleme bei der Ausführung der NuVoice-Anwendung oder von Windows-Programmen, führen Sie wie unten beschrieben einen Windows-Neustart durch. **DRÜCKEN SIE NICHT DIE I/O-TASTE!**


1. Öffnen Sie die Toolbox.
2. Wählen Sie das Menü SYSTEM.
3. Wählen Sie das Menü „Energiesparoptionen und Belegung der I/O-Taste.“
4. Wählen Sie die Option „Windows-Neustart“.


Können Sie die Toolbox nicht mehr öffnen, so gehen Sie so vor:

1. Minimieren Sie die NuVoice-Software. Der Windows-Desktop wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf „Start“ .
3. Tippen Sie auf „Ein/Aus“ .
4. Wählen Sie „Neu starten“

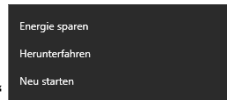

Können Sie die Toolbox nicht mehr öffnen und haben Sie geschlossenes System, schließen Sie eine USB-Tastatur an den Accent an:

1. Drücken Sie auf der Tastatur gleichzeitig die Tasten Strg + Alt + Entf.
2. Der Bildschirm „Benutzer wechseln“ wird angezeigt.
3. Drücken Sie wiederholt die Tab-Taste, bis das I/O-Zeichen  markiert wird.
4. Drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „Neu starten“ aus.
6. Drücken Sie die Eingabetaste.

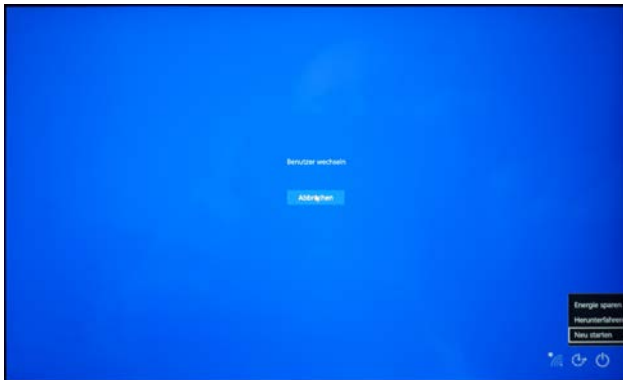

Führt keiner dieser Schritte zum Erfolg, gehen Sie so vor (ungesicherte Daten gehen dabei verloren):

- a. Drücken und Halten Sie die I/O-Taste oben auf dem Gerät. Der Accent fährt herunter.
- b. Drücken Sie die I/O-Taste erneut, um das Gerät wieder zu starten.



Sollte ihr Gerät weiterhin nicht starten, befolgen Sie die Hinweise im nächsten Kapitel „Windows neu installieren“.


Windows neu installieren

i Die Neuinstallation löscht sämtliche auf dem Gerät vorhandene Daten!

i Eine Neuinstallation dauert 30 Minuten bis 1 Stunde. Sie müssen am Anfang und zum Ende dabei sein, um Eingaben vornehmen zu können. Dazwischen läuft der Installationsprozess weitgehend automatisch ab.

Diese Anleitung gilt für offene Systeme. Haben Sie ein geschlossenes System, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von PRD.

1. Schließen Sie das Netzteil an.
2. Minimieren Sie die NuVoice-Software, um den Desktop zu sehen.
3. Tippen Sie auf „Start“ .
4. Tippen Sie auf „Einstellungen“ .
5. Wählen Sie die Option „Update und Sicherheit“.
6. Wählen Sie links das Menü „Wiederherstellung“.
7. Wählen Sie die Option „Diesen PC zurücksetzen“. Tippen Sie dazu auf „Los geht's“.
8. Das Fenster „Diesen PC zurücksetzen“ erscheint.

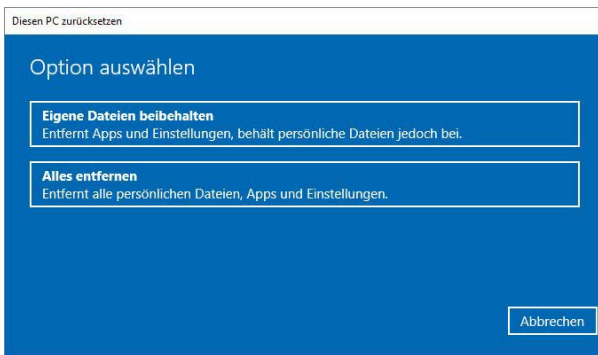

Wählen Sie „Eigene Dateien beibehalten“, wenn Sie Ihre Dateien behalten wollen. Wählen Sie „Alles entfernen“, wenn Sie Ihre Dateien löschen wollen.

9. Haben Sie „Alles entfernen“ gewählt, erscheint das Fenster „Der PC besitzt mehr als ein Laufwerk“.
Wählen Sie „Nur das Laufwerk, auf dem Windows installiert ist“, wenn Sie die Dateien auf der internen Speicherkarte nicht löschen wollen.
Wählen Sie „Alle Laufwerke“, wenn Sie neben dem Windows-Laufwerk auch Dateien auf der internen Speicherkarte löschen wollen.
10. Das Fenster „Möchten Sie auch die Laufwerke bereinigen?“ erscheint.
Wählen Sie „Nur meine Dateien entfernen“, wenn Sie nur Ihre Dateien entfernen wollen.
Wählen Sie „Dateien entfernen und Laufwerk bereinigen“, wenn Sie neben dem Löschen der Dateien auch die Laufwerke bereinigt haben möchten.
11. Das Fenster „Bereit zum Zurücksetzen dieses PCs“ erscheint. Wählen Sie „Zurücksetzen“, um den das Zurücksetzen zu starten, oder „Abbrechen“.

Windows einrichten








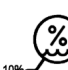




1. Nach Abschluss des Zurücksetzens folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Einrichten von Windows.
2. **Wichtig:** Wählen Sie stets **Accent 1400** als **Kontoname**.
3. Beim ersten Starten von NuVoice müssen Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren.
4. NuVoice startet. Spielen Sie Ihre Datensicherung wieder ein oder wählen Sie ein Vokabular.
5. Führen Sie ein Software-Update durch, um NuVoice auf die neueste Version zu aktualisieren.
6. Führen Sie Windows-Updates durch, um Windows auf den aktuellen Stand zu bringen.

ANHANG

Konformitätsinformationen

Symbole und Kennzeichnungen

Folgende Symbole werden auf dem Gerät, dem mitgelieferten Zubehör und der Verpackung verwendet:

Symbol	Erklärung
	Das Gerät entspricht den Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC)
	Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelssystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.
	Das Gerät entspricht den EU-Bestimmungen für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz
	Das gesamte Gerät mit Ausnahme des Netzteils und den Signalein- und -ausgabeparts ist ein Anwendungsteil des Typs BF. „Anwendungsteil“ bezieht sich auf den Teil des Geräts, mit dem der Benutzer bei bestimmungsgemäßer Nutzung in physischen Kontakt kommt.
	Das Gerät strahlt allgemein erhöhte, potenziell gefährliche Mengen von nicht-ionisierender elektromagnetischer Strahlung aus.
	Achtung! Lesen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.
IP22	Geschützt vor mittelgroßen festen Fremdkörpern (Durchmesser ≥ 12 mm) sowie vor schräg (bis 15°) fallendem Tropfwasser.
	Temperatur der Betriebsumgebung während der Benutzung: 0°C bis 40°C , Temperatur bei Transport oder Lagerung: -20°C bis 60°C . Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Temperaturbedingungen für direkten Kontakt“ auf Seite 61.
	Relative Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung während der Benutzung sowie bei Transport und Lagerung: 10% bis 90%. Atmosphärendruck während der Benutzung sowie bei Transport und Lagerung: 80 bis 106 kPa.
	Gebrauchsanweisung beachten
	Das Gerät verwendet die Bluetooth-Funktechnologie
	Name und Adresse des Herstellers des Geräts.
	Der Bevollmächtigte in der EU

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B. Diese Bestimmungen dienen dazu, in Wohnräumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u.U. auch ab. Bei unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann eine Funkstörung auftreten. In bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (Feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Gerätes), können die folgenden Behebungsmaßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Aufstellung des Gerätes in einer größeren Entfernung vom Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine andere Steckdose, so dass dieses Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Gegebenenfalls kann der Fachhändler oder ein erfahrener Funk- und Fernseh-techniker weitere Ratschläge geben.

Änderungen und Modifikationen, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der PRC-Salttillo vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Für Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen ICES-003-Bestimmungen. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Funktechnologien

Geräte mit Funktechnologie wie drahtlose Netzwerkgeräte, Mobiltelefone, Schnurlos-telefone und ihre Basisstationen sowie Sprechfunkgeräte können das Gerät beeinflussen. Halten Sie mit diesem Gerät stets einen Abstand von mindestens 15 cm zu Geräten mit Funktechnologie ein.

Limitierung auf Zweckbestimmung, Ansprüche Dritter und Datenverlust

- PRC-Salttillo und die Prentke Romich GmbH übernehmen keine Gewähr für irgendeine Funktionalität dieses Geräts außerhalb der ausdrücklichen Gewährleistung in Bezug auf die Zweckbestimmung als Kommunikationshilfe. PRC-Salttillo und die Prentke Romich GmbH übernehmen keine Gewähr für Softwares von Dritten und sind nicht verantwortlich für Verletzungen, Schäden oder Verluste, die aus Programmfunktionen oder Programmfehlern von Technologien von Dritten, Internetseiten, Produkten und Programmen resultieren. Weitere Anwendungen könnten eine weitere klinische Bestimmung über die Möglichkeiten eines Sprachausgabegeräts hinaus erforderlich machen.
- Weder die Prentke Romich GmbH noch PRC-Salttillo übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die Dritten durch die Benutzung dieses Geräts entstanden sein könnten.
- Weder die Prentke Romich GmbH noch PRC-Salttillo übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste im Falle eines Datenverlustes aufgrund einer Fehlfunktion, einer Reparatur oder eines Akkuwechsels. Sichern Sie stets alle relevanten Daten auf einem externen Speichermedium.

Zweckbestimmung

Dieses Gerät ist ein Hilfsmittel zur Unterstützten Kommunikation (UK) für Menschen, die aufgrund einer Verletzung, Behinderung oder Krankheit über eine eingeschränkte Sprechfähigkeit verfügen. Das Gerät ermöglicht seinem Benutzer verbesserte Möglichkeiten der Kommunikation und größere Unabhängigkeit.

Das Gerät inkl. seiner Software zur Sprachdarstellung gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Konversationen zu initiieren, Informationen einzuholen, seine Meinung auszudrücken sowie Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen. Es kann zur Benutzung in der Hand gehalten oder mittels eines geeigneten Halterungssystems auf einem Tisch, an einem Rollstuhl oder an einem Bett befestigt werden. Die Ansteuerung kann – einzeln oder in Kombination – direkt mit der Hand erfolgen oder mittels geeigneter Eingabegeräte wie Augensteuerung, Maus, Trackball, Kopfmaus oder externe Tasten.

Der Look Eyetracker ermittelt die Blickrichtung des Benutzers des Geräts und ermöglicht es dem Benutzer so, Eingaben nur mit den Augen (ohne weiteren motorischen Aufwand) vorzunehmen und die volle Kontrolle über das Gerät auszuüben.

Das Look-Modul wird dazu an das Gerät des Benutzers montiert, welches wiederum an einer Tischhalterung, einem Bettständer oder einem Bodenständer befestigt wird

Das Gerät enthält keine medizinischen Substanzen, menschliches Blut oder Plasmaprodukte und wird ohne die Verwendung von Gewebe tierischen Ursprungs hergestellt.

Kontraindikationen



Dieses Gerät ist nicht gedacht oder geeignet als Notrufgerät oder als alleinige Kommunikationshilfe. Falls dieses Gerät ausfällt, kann es vom Benutzer nicht zur Kommunikation verwendet werden!

Vorgesehene Nutzungsdauer

Die vorgesehene Nutzungsdauer des Geräts, des Ladegeräts sowie des Zubehörs beträgt 5 Jahre. Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Vorgesehene Betreiber/Anwender

Vorgesehene Betreiber/Anwender sind

- die Person, die das Gerät zur Kommunikation einsetzt,
- der Kommunikationspartner der Person, die das Gerät zur Kommunikation einsetzt
- Menschen, die Einstellungen im Gerät vornehmen, Gerätesoftware aktualisieren, das Gerät reinigen oder desinfizieren

Die in dieser Anleitung gemachten Angaben und Grafiken helfen den vorgesehenen Betreibern/Anwendern, das Gerät zweckbestimmt einzusetzen.

Position bei der Benutzung

Bei normaler Benutzung befindet sich das Gerät in einem Abstand von 30 - 35 cm vor dem Benutzer. Der Abstand hängt davon ab, ob das Gerät in der Hand gehalten wird oder an einem Halterungssystem montiert ist. Bei der Benutzung einer Kopfmaus kann der Abstand größer sein.

Bei Verwendung der Augensteuerung Look muss das Gerät auf einer Halterung befestigt sein. Der Benutzer sollte sich in einem Bereich von 56 - 66 cm vor dem Gerät befinden.

Besondere Fähigkeiten und Vorkenntnisse

Es sind keine besonderen Fähigkeiten oder Vorkenntnisse erforderlich, um das Gerät zu verwenden und/oder Einstellungen vorzunehmen. Die in dieser Anleitung gemachten Angaben und Grafiken helfen den vorgesehenen Betreibern/Anwendern, das Gerät zweckbestimmt einzusetzen.

Anleitung zur Benutzung

- Die Nutzung aller Gerätefunktionen ist für den Benutzer unbedenklich. Um beste Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie die Angaben in dieser Anleitung.
- Bei täglicher Benutzung besteht keine Notwendigkeit, das Gerät oder den Verstärker auszuschalten. Es wird empfohlen, es bei Nichtbenutzung in den Standby-Modus zu setzen, es täglich zu laden und einmal pro Woche einen Neustart durchzuführen.
- Vorkommnisse melden Sie bitte umgehend Ihrem Händler, der Prentke Romich GmbH sowie ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.
- Informationen zur Reinigung und zu hygienischen Wiederaufarbeitung finden Sie in den Kapiteln „Reinigung“ (siehe S. 45) und hygienische Wiederaufarbeitung“ (siehe S.47).

Kontaktinformation

Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung, Benutzung oder Wartung des Geräts oder wollen Sie ein ungewöhnliches Verhalten oder ein ungewöhnliches Ereignis des Geräts melden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Prentke Romich GmbH unter Tel. +49 (0)561 78559-16 bzw. E-Mail technik@prentke-romich.de.

Informationen zur Lagerung

Sollten Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, so fahren Sie es komplett herunter und lagern Sie es an einen kühlen, trockenen Ort. Gelagerte Geräte müssen spätestens alle 6 Monate geladen werden.

Ladegerät/Netzteil

Zu diesem Gerät ist das folgende Netzteil kompatibel:

Megmeet MANGO60S-18BB-PRC (erhältlich bei PRC-Salttillo bzw. PRD).



Verwenden Sie nur dieses Netzteil zum Laden der in das Gerät eingebauten Akkus.

Inspektion / Wartung gemäß §7 MPBetreibV

Der Betreiber hat Prüfungen nach DIN EN 62353 (VDE 0751-1) durchzuführen oder durchführen zu lassen. Er hat für die Prüfungen solche Fristen vorzusehen, dass entsprechende Mängel, mit denen aufgrund der Erfahrung gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden können. Die Prüfungen sind jedoch spätestens alle zwei Jahre mit Ablauf des Monats durchzuführen, in dem die Inbetriebnahme des Medizinproduktes erfolgte oder die letzte Überprüfung durchgeführt wurde.

Klassifikationen

Schutz gegen elektrischen Schlag	Klasse II / interne Stromversorgung
Schutz gegen schädigenden Wassereintritt	IP22
Betriebsweise	kontinuierlich
Art des Anwendungsteils	BF

Technische Daten Accent 1400

Gewicht	2676 g
Abmessungen (BxHxT)	36 x 22,3 x 4 / 7,5 cm (Höhe mit Griff: 26 cm)
Bildschirm	kapazitiver 14"-Touchscreen (35,5 cm Diagonale), Auflösung 1980 x 1080 Bildpunkte, Betrachtungswinkel >170°, Bildschirmhelligkeit >300 nits
Akkulaufzeit	18-20 h, mit Augensteuerung 10-12 h
Speicher	8 GB RAM, 16 GB interne Speicherkarte, 256 GB SSD, Micro-SD-Kartenschacht für Speicherkarten bis 128 GB
Betriebssystem	Windows 10 Pro 64 Bit
Prozessor	Intel Core i5-7Y54
Lieferumfang	Rahmen, Griff, Aufstellbügel aus Metall, Ladegerät, USB-Stick, Stylus
Lieferbares Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)	Trage- und Transporttasche, Tragegurt, Schultergurt, Bildschirmschutzfolie, Befestigungsplatte für Halterungssystem, Fingerführungsgitter (Keyguard), Fingerführungshilfe (Touchguide)

Technische Daten Look Eyetracker

Modell	PRCL-2
Gewicht	45 g
Abmessungen	28,2 cm x 2,54 cm x 1,78 cm

Betriebsumgebung

Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%.
Atmosphärendruck	80 kPa bis 106 kPa
Schützen Sie das Gerät bei der Benutzung vor Feuchtigkeit.	

Umgebungsbedingungen bei Transport und Lagerung

Umgebungstemperatur	-20°C bis 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%.
Atmosphärendruck	80 kPa bis 106 kPa
Schützen Sie das Gerät bei Transport und Lagerung vor Feuchtigkeit.	

Temperaturbedingungen für direkten Kontakt

Bedingungen für einen sicheren Kontakt – Zeit

Zugänglicher Teil	Zeitlimit für Kontakt
Touchscreen	Weniger als 1 Minute
Ein-/Aus-Taste	Weniger als 1 Minute
Lautstärketaste	Weniger als 1 Minute

Bedingungen für einen sicheren Kontakt – Temperatur

Zugänglicher Teil	Maximale Temperatur während der Benutzung bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C
Touchscreen	54,3°C
Ein-/Aus-Taste	50,5°C
Lautstärketaste	41,2°C



Das Berühren der Geräteoberfläche mit einer Hautverletzung kann die Wunde verschärfen



Kinder und andere Risikogruppen sollten die Geräteoberfläche nicht berühren, wenn die Möglichkeit einer Verbrennung besteht.

Endkunden-Lizenzvereinbarung

Sie haben ein Gerät erworben, das Software enthält, die PR-Saltillo durch eine oder mehrere Lizenzgeber (Microsoft Licensing Inc., eine 100%ige Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation), lizenziert wurde. Diese Software-Produkte inklusive aller Begleitmaterialien, Online- oder elektronischer Dokumentationen (die „SOFTWARE“) unterliegen deutschen sowie internationalen Urheberrechtsbestimmungen sowie weiteren Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Die Software wird nicht verkauft, sondern ihre Nutzung erfolgt unter Lizenz.

Falls Sie den Bestimmungen dieser Endkunden-Lizenzvereinbarung (EULA) nicht zustimmen, benutzen Sie das Gerät nicht und kopieren Sie keine Software. Wenden Sie sich unverzüglich an Prentke Romich Deutschland und fragen Sie nach, wie Sie das unbenutzte Gerät gegen volle Rückerstattung des Preises zurückgeben können. Durch Benutzung der Software und/oder durch die Benutzung des Gerätes zeigen Sie Ihr Einverständnis mit der folgenden Endkunden-Lizenzvereinbarung an.

Microsoft Lizenz-Gewährung

Die SOFTWARE ist nicht gekauft, sie darf in Lizenz genutzt werden. Diese Endkunden-Lizenzvereinbarung gewährt Ihnen folgende Rechte an der SOFTWARE:

- **Die Software darf nur in Verbindung mit diesem Gerät verwendet werden.**
- **Keine Fehlertoleranz.** Diese SOFTWARE ist nicht fehlertolerant. PRC-Saltillo hat eigenständig festgelegt, wie die SOFTWARE zu benutzen ist und Microsoft verlässt sich darauf, dass PRC ausreichend getestet hat, dass die SOFTWARE für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist.
- **Hinweis zur Unterstützung von Java.** Die SOFTWARE kann Unterstützung für Programme enthalten, die in Java geschrieben wurden. Die Java-Technologie ist nicht fehlertolerant und wurde nicht entwickelt, hergestellt oder geplant zur Benutzung oder zum Wiederverkauf als Steuerungssystem in gefährdeten Umgebungen, die fehlerfreien Betrieb erfordern wie z. B. Atomanlagen, Navigations- und Kommunikationssysteme von Flugzeugen, Geräte zur Flugsicherheit, medizinische Geräte oder Waffensysteme, bei denen ein Versagen der Java-Technologie direkt zum Tod oder zum Schaden von Menschen oder zur Beschädigung der Umwelt führen kann.
Sun Microsystems Inc. hat Microsoft vertraglich verpflichtet, diesen Hinweis abzdrukken.
- **Keine Haftung für bestimmte Schäden.** Microsoft übernimmt über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Nutzung der SOFTWARE ergeben. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung der SOFTWARE für einen bestimmten Zweck. Die Haftung von Microsoft ist auf einen Höchstbetrag von zweihundertfünfzig US-Dollar (US-\$ 250) beschränkt.
- **Einschränkungen beim Zurückentwickeln, Dekompilieren und Entassemblieren.** Sie dürfen die SOFTWARE nicht zurückentwickeln (reverse engineering), dekompilieren oder entassemblieren außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen.
- **Begrenzte Weitergabe der SOFTWARE erlaubt.** Sie dürfen die SOFTWARE und jedwede begleitende Hardware und Benutzerdokumentation auf Dauer übertragen, vorausgesetzt, dass Sie keine Kopien zurückbehalten und sich der Empfänger mit den Bestimmungen dieses Vertrages einverstanden erklärt. Falls es sich bei der SOFTWARE um eine aktualisierte Version (Update) handelt oder diese aktualisiert worden ist, muss jegliche Übertragung das neueste Update und alle früheren Versionen umfassen.
- **Export-Beschränkungen.** Sie erkennen an, dass es sich um Software US-amerikanischen Ursprungs handelt. Sie sind mit der Einhaltung aller geltenden internationalen und nationalen Gesetze einverstanden, die für die Software gelten, einschließlich der US-Exportkontrollgesetze sowie der von der US-Regierung und anderen Regierungen erlassenen Beschränkungen in Bezug auf den Endverbraucher, die endgültige Verwendung und das Zielland. Zusätzliche Informationen zum Export der Software erhalten Sie unter <http://www.microsoft.com/exporting/>.

INDEX

A

Abdeckgitter demontieren 29
Abdeckgitter hochklappen 28
Abdeckgitter montieren 27
Abdeckgitter reinigen 45
Accent 1400 benutzen 43
Akku laden 16
Akku-/Lade-Anzeige 17
Akku-Problembeseitigung 50
Anzeigegerät und -art wählen 38
Audiowiedergabe auf Accent umstellen 37
Aufnahmeplatte demontieren 33
Aufnahmeplatte für Halterungssystem 33
Aufnahmeplatte montieren 33
Aufstellfuß 18
Aufstellfuß demontieren 19

B

Belegung der Ein/Aus-Taste 42
Betriebsumgebung 60

C

Clips (Tragegurt) 32
Clipverschluss (Tragegurt) 32
Computersteuerung 39
Computersteuerung, drahtlos 39
Computersteuerung, kabelgebunden 39

D

Deaktiviert (Belegung der Ein/Aus-Taste) 42
Den Accent 1400 kennen lernen 11
Desinfektion 45
Desinfizieren 47
Display ausschalten nach 42
Display reinigen 45
Drahtlose Computersteuerung 39
Drahtlose Internetverbindung einrichten 40

E

Ein/Aus-Taste 42
Einschalten 15
Endkunden-Lizenzvereinbarung 62
Energiemanagement 42

Entfernen von Flüssigkeit 45
Entfernen von Speichel 45
Entsorgung 17
Eyetracker montieren 34

F

Fingerführung reinigen 45
Fingerführungshilfe demontieren 31
Fingerführungshilfe montieren 30

G

Gehäuse reinigen 45
Gerät benutzen aus dem
 Transportschutzmodus 44

H

HDMI-Ausgang verwenden 37
Herunterfahren (Belegung der Ein/Aus-
 Taste) 42
Hinweise 2
Hinweise zum Wiedereinsatz 48
hygienische Wiederaufbereitung 47

I

Implantierbare Medizinprodukte 10
Inhaltsverzeichnis 3
Inspektion / Überprüfung gemäß §7
 MPBetreibV 59
Internetverbindung einrichten 40
IR-Reflektor montieren 22

K

Kabelgebundene Computersteuerung 39
Klassifikationen 60
Konformitätsinformationen 55, 56
Kopfmaus montieren 36

L

Linke und rechte Seite des Accent 1400 14

M

Mini-USB-Buchse 39

N

NuPoint montieren 36

O

Oberseite des Accent 1400 12

P

Pannenhilfe 51
Portabdeckung demontieren 21
Portabdeckung montieren 21
PRC-Bluetooth-Adapter 39

R

Rahmen demontieren 23
Rahmen montieren 25
Rahmen verschrauben 26
Reinigung 45, 46
Reset-Taste 51

S

Sicherheit 7

Sicherheitshinweise 4
Standby nach 42
Standby-Modus (Belegung der Ein/Aus-Taste) 42
Symbole und Kennzeichnungen 56

T

Technische Daten 60
Temperaturbedingungen für direkten Kontakt 61
Touchscreen 15
Tragegriff demontieren 20
Tragegriff montieren 20
Tragegurt befestigen 32
Transportschutzmodus aktivieren 44

U

Umgebungsbedingungen bei Transport und Lagerung 60
Unterseite des Accent 1400 13

W

Warnsymbole 6
Wiedereinsatz, Hinweise zum 48
Windows herunterfahren 42
Windows neu installieren 53
Windows Neustart 50
Windows normal starten 50
Windows-Energiemanagement 42
Windows-Fehlersuche 52
Windows-Neustart 42



prentke romich deutschland
weil jede:r was zu sagen hat!

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3
D-34117 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de